



ACUVUE®  
BRAND CONTACT LENSES  
SEE WHAT COULD BE®

## NASAZOVÁNÍ A SNÍMÁNÍ KONTAKTNÍCH ČOČEK

Přehledný návod krok za krokem od značky ACUVUE®


# NASAZOVÁNÍ

1




Důkladně si umyjte ruce jemným mýdlem, opláchněte je a osušte ručníkem nebo utěrkou, která nepouští vlákna.

2

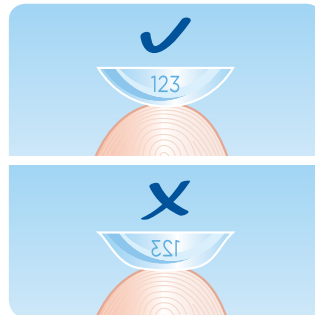


Vyndejte čočku z balení nebo z pouzdra a položte ji na špičku ukazováku. Zkontrolujte, zda je čistá, a přesvědčte se, že ji neдрžíte naruby.

3

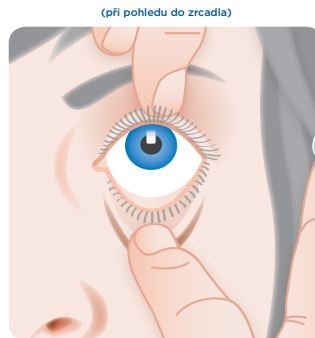


Prostředník téže ruky položte pod spodní řasy a odtáhněte spodní víčko. Ukazovákem nebo prostředníkem druhé ruky zvedněte horní víčko a hleďte vzhůru.

4

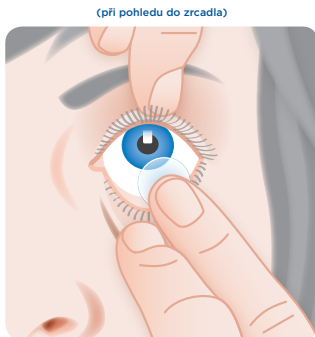

Přiložte čočku na spodní, bílou část oka (bélmo) a uvolněte víčka.


5

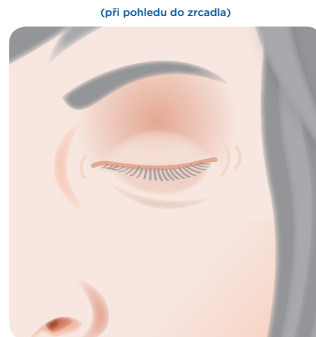

Zavřete oči a několikrát mrkněte, aby se čočka posunula a usadila na místo.

# SNÍMÁNÍ

1

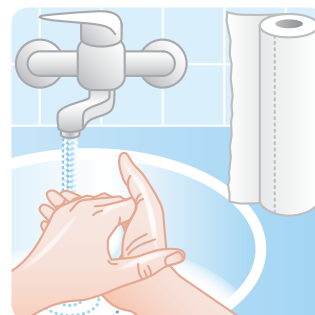

Důkladně si umyjte ruce jemným mýdlem, opláchněte je a osušte ručníkem nebo utěrkou, která nepouští vlákna.

2




Podívejte se vzhůru a prostředníkem odtáhněte spodní víčko.

3



Přiložte prostředník na spodní okraj čočky a posuňte čočku směrem dolů k okrajům oka.

4

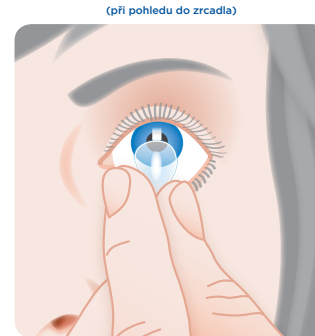

Pomocí palce a ukazováku čočku jemně zmáčknete a opatrně ji sejměte z oka.

TIP



Abyste předešli záměně, při nasazování i snímání čoček začínejte vždy PRAVÝM okem.

**ACUVUE®**  
BRAND CONTACT LENSES  
SEE WHAT COULD BE®



ACUVUE®, SEE WHAT COULD BE®, ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS, 1-DAY ACUVUE® MOIST®, 1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM, 1-DAY ACUVUE® TruEye®, HYDRACLEAR® a LACREON® jsou registrované ochranné známky společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. © Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2014.