

JEDNODENNÍ MĚKKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY Z MATERIÁLU NELFILON A K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ

 **NÁVOD K POUŽITÍ - TENTO PŘÍBALOVÝ LETÁK OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE TYKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO POUŽITÍ VÝROBKU. PEČLIVĚ SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ. VÝBĚR A APLIKACI KONTAKTNÍCH ČOČEK BY MĚL VŽDY PROVÁDĚT OČNÍ SPECIALISTA. JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE DODRŽOVALI A POKYNY OČNÍHO SPECIALISTY A VŠECHNY INSTRUKCE KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ KONTAKTNÍCH ČOČEK UVEDENÉ VÝROBCEM NA ŠTÍTKU.**

NÁZVY PRODUKTŮ
DAILIES® AquaComfort Plus®
DAILIES® AquaComfort Plus® Toric
DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal
DAILIES® FRESHLOOK® ILLUMINATE
FOCUS® DAILIES®
FOCUS® DAILIES® Progressives
FOCUS® DAILIES® Toric
FRESHLOOK® One-Day

MATERIÁL A BALENÍ

Měkké kontaktní čočky **DAILIES® AquaComfort Plus®** / **DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal** / **DAILIES® AquaComfort Plus® Toric** obsahují 31 % materiálu nelfilon A a 69 % vody. Čočky jsou světle modře zbarveny pro lepší manipulaci; barvivo obsahuje Cu-ftalocyanin.

Kontaktní čočky **DAILIES® AquaComfort Plus®** / **DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal** / **DAILIES® AquaComfort Plus® Toric** jsou baleny v jednotlivých blistrech spojených po 5ti kusech obsahujících izotonický fyziologický roztok pufovaný fosfát-acetátem. Fyziologický roztok obsahuje HPMC a PEG400. Fyziologický roztok může obsahovat až 0,05 % Poloxameru.

Měkké kontaktní čočky **DAILIES® FRESHLOOK® ILLUMINATE** obsahují 31 % materiálu nelfilon A a 69 % vody. Čočky jsou potišteny intermitentním barvivem obsahujícím kombinaci následujících pigmentů: oxidy železa, karbazolová violet, PCN modř a oxid titaničitý.

Kontaktní čočky **DAILIES® FRESHLOOK® ILLUMINATE** jsou baleny v jednotlivých blistrech spojených po 5ti kusech obsahujících izotonický fyziologický roztok pufovaný fosfát-acetátem. Fyziologický roztok může obsahovat až 0,02 % Poloxameru.

Měkké kontaktní čočky **FOCUS® DAILIES®** / **FOCUS® DAILIES® Progressives** / **FOCUS® DAILIES® Toric** obsahují 31 % materiálu nelfilon A a 69 % vody. Čočky jsou světle modře zbarveny pro lepší manipulaci; barvivo obsahuje Cu-ftalocyanin. Čočky **FOCUS® DAILIES®** / **FOCUS® DAILIES® Progressives** / **FOCUS® DAILIES® Toric** jsou baleny v jednotlivých blistrech spojených po 5ti kusech obsahujících izotonický fyziologický roztok pufovaný fosfát-acetátem. Fyziologický roztok může obsahovat až 0,02 % Poloxameru.

Měkké kontaktní čočky **FRESHLOOK® One-Day** obsahují 31 % materiálu nelfilon A a 69 % vody. Čočky jsou potišteny intermitentním barvivem obsahujícím kombinaci následujících pigmentů: oxidy železa, oxid titaničitý, Cu-ftalocyanin, oxid chromu, ftalocyaninová zeleň a karbazolová violet.

Kontaktní čočky **FRESHLOOK® One-Day** jsou baleny v jednotlivých blistrech spojených po 5ti kusech obsahujících izotonický fyziologický roztok pufovaný fosfát-acetátem. Fyziologický roztok může obsahovat až 0,02 % Poloxameru.

Čočky jsou tepelně sterilizovány . Výrobek používejte pouze tehdy, jsou-li obal a folie neporušeny.

POUŽITÍ

Kontaktní čočky **DAILIES® AquaComfort Plus®** jsou určeny pro denní nošení (po dobu kratší než 24 hodin mimo dobu spánku) za účelem optické korekce zraku u osob bez očního onemocnění a s nízkým astigmatismem, který neovlivňuje ostrost vidění.

Kontaktní čočky **DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal** jsou určeny pro denní nošení (po dobu kratší než 24 hodin mimo dobu spánku) za účelem optické korekce

zraku, včetně presbyopie, u osob bez očního onemocnění a s nízkým astigmatismem, který neovlivňuje ostrost vidění.

Kontaktní čočky **DAILIES® AquaComfort Plus® Toric** jsou určeny pro denní nošení (po dobu kratší než 24 hodin mimo dobu spánku) za účelem optické korekce zraku u osob bez očního onemocnění, kteří potřebují další korekci pro astigmatismus.

Kontaktní čočky **DAILIES® FRESHLOOK® ILLUMINATE** jsou určeny pro denní nošení (po dobu kratší než 24 hodin mimo dobu spánku) v jednom oku nebo v obou očích za účelem optické korekce zraku u osob bez očního onemocnění a s nízkým astigmatismem, který neovlivňuje ostrost vidění.

Barevný potisk splývá s vlastní barvou oka, kterou přirozeně zvýrazní.

Kontaktní čočky **FOCUS® DAILIES®** jsou určeny pro denní nošení (po dobu kratší než 24 hodin mimo dobu spánku) za účelem optické korekce zraku u osob bez očního onemocnění a s nízkým astigmatismem, který neovlivňuje ostrost vidění.

Kontaktní čočky **FOCUS® DAILIES® Progressives** jsou určeny pro denní nošení (po dobu kratší než 24 hodin mimo dobu spánku) za účelem optické korekce zraku, včetně presbyopie, u osob bez očního onemocnění a s nízkým astigmatismem, který neovlivňuje ostrost vidění.

Kontaktní čočky **FOCUS® DAILIES® Toric** jsou určeny pro denní nošení (po dobu kratší než 24 hodin mimo dobu spánku) za účelem optické korekce zraku u osob bez očního onemocnění, kteří potřebují další korekci pro astigmatismus.

Kontaktní čočky **FRESHLOOK® One-Day** jsou určeny pro denní nošení (po dobu kratší než 24 hodin mimo dobu spánku) v jednom oku nebo v obou očích za účelem optické korekce zraku u osob bez očního onemocnění a s nízkým astigmatismem, který neovlivňuje ostrost vidění.

Barevný potisk splývá s vlastní barvou oka, kterou přirozeně pozmění nebo zvýrazní.

Všechny kontaktní čočky z materiálu nelfilon A jsou určeny pouze k jednorázovému dennímu použití. 

DOPORUČENÝ REŽIM NOŠENÍ A VÝMĚNY

Jednodenní kontaktní čočky z materiálu nelfilon A jsou určeny k jednorázovému použití a po použití se vyhodí. Váš oční specialista stanoví maximální dobu nošení čoček. Jednodenní jednorázové kontaktní čočky z nelfilonu nejsou určeny k použití s čistícími roztoky nebo dezinfekčními systémy na kontaktní čočky. Kontaktní čočky je nutno po použití vyhodit. Začněte každou periodu nošení nasazením nové čočky.

STĚMITO ČOČKAMI NESPĚTE. Jednodenní jednorázové kontaktní čočky z materiálu nelfilon A nebyly vyvinuty k ponechání na očích při spánku. Jednodenní jednorázové kontaktní čočky z materiálu nelfilon A nesmíte používat během spánku.

MANIPULACE S ČOČKAMI

Váš oční specialista Vám poskytne podrobné pokyny k nasazování a vyjímání kontaktních čoček. Před manipulací s kontaktními čočkami si vždy umyjte a pečlivě osušte ruce. Před otevřením blistrem opatrně zafixujte. Odstraňte fóliové víčko.

Vylijte obsah blistru na dlaň, anebo pokud je to nutné, opatrně vsuňte čočku z obalu ukazováčkem. Zkontrolujte, zda není čočka obrácená naruby a zda máte správnou čočku pro příslušné oko. Před nasazením čočky zkontrolujte, a pokud jsou poškozené, nenasazujte je.

Při vyjímání čočky z oka dbejte na to, aby byly Vaše ruce čisté a zcela suché.

Několikrát zamrkejte, při pohledu vzhůru posuňte čočku dolů na bělmo oka. Čočku vyndejte opatrným sevřením mezi palcem a ukazováčkem. Pokud je obtížné čočku vyjmout, nikdy nestlačujte oční tkáň. Aplikujte lubrikační a zvlhčující kapky a po několika minutách znovu zkuste čočku vyjmout.

• Nikdy k vyjmutí čoček z pouzdra nebo z oka nepoužívejte pinzetu, přísavná zařízení, ostré předměty či nehty.

KDY ČOČKY NEPOUŽÍVAT

Nepoužívejte měkké kontaktní čočky v následujících situacích nebo prostředích. Mezi stavy a podmínky, které by mohly bránit bezpečnému použití kontaktních čoček nebo je omezovat, patří:

- Alergie, zánět, infekce nebo podráždění uvnitř nebo v okolí oka nebo očního víčka.
- Zhoršený zdravotní stav nebo onemocnění, například nachlazení nebo chřipka.
- Používání některých léků, včetně očních léků.
- Nedostatečně slzný film (suché oči).
- Nadměrně suché nebo prašné prostředí, které by mohlo snížit komfort při nošení kontaktních čoček.
- Vodní sporty bez použití ochranných (plavečkových) brýlí.

V těchto nebo podobných situacích se obraťte na svého očního specialistu.

NEZAPOMĚŇTE

• Tento zdravotnický prostředek je určen pouze na jedno použití. Opakované použití může zvýšit riziko infekce nebo poškození čoček v důsledku opotřebení materiálu.

• Nikomu Vaše čočky **nepůjčujte**, hrozí riziko infekce mikroorganismy, které mohou způsobit závažnou infekci očí.

• Každý den kontrolujte své oči, zda vypadají zdravě, dobře se cítíte a zda je vidění ostré.

• Uživatelé kontaktních čoček by měli pravidelně chodit na kontroly ke svému očnímu specialistovi.

• Nepoužívejte čočky po uplynutí doby použitelnosti. 

• Za zhoršených světelných podmínek mohou uživatelé zbarvených čoček hůře vidět předměty s menším kontrastem. Uživatelé progresivních čoček mohou při slabém osvětlení zaznamenat zhoršenou zrakovou ostrost.

• Poznamenejte si správnou dioptrickou hodnotu čoček pro každé oko.

• Před každým nasazením čoček zkontrolujte, zda dioptrie čočky uvedené na fóliovém krytu odpovídá danému oku.

• Vždy s sebou noste náhradní balení kontaktních čoček.

• Kosmetické přípravky, tělová mléka, mýdla, krémy nebo deodoranty mohou způsobovat podráždění, pokud se dostanou do kontaktu s čočkami. Proto je používejte s opatrností.

• Kontaktní čočky si nasazujte **před** naličením a vyjměte je **před** odličením.

• Pokud máte nasazené čočky, nepoužívejte v blízkosti očí žádné aerosoly, např. lak na vlasy ve spreji, protože by mohly vyvolat podráždění.

• Poradte se s očním specialistou ohledně nošení kontaktních čoček při sportovních aktivitách, včetně plavání.

• Vyjměte čočky, pokud se dostanete do prostředí se škodlivými nebo dráždivými parami.

• Zabraňte kontaktu čoček s nesterilními tekutinami (včetně vody z vodovodu nebo slin), protože by mohlo dojít k mikrobiální kontaminaci, která by mohla způsobit trvalé poškození oka.

• Informujte svého zaměstnavatele, že nosíte kontaktní čočky, obzvláště pokud Vaše zaměstnání vyžaduje použití ochranných pomůcek na oči.

• Pokud jsou jednodenní jednorázové kontaktní čočky obsahující materiál nelfilon A vystaveny působení vzduchu v prostředí mimo oka, dojde k jejich vyschnutí, které se projeví zvýšenou křehkostí. V takovém případě je nutné je vyhodit a použít nové čočky.

MOŽNÉ PROBLÉMY

Přestože měkké kontaktní čočky poskytují svým uživatelům řadu výhod, mohou se však při jejich použití také vyskytnout některé problémy. Jako první je možné zaznamenat některé z následujících příznaků:

- Pocit cizího tělíska v oku
- Pocit nepohodlí při nošení čoček
- Zarudnutí oka
- Přecitlivělost na světlo
- Pálení, řezání, svědění či slzení očí
- Zhoršení zrakové ostrosti (zhoršené vidění)
- Duha nebo kruhy (haló efekty) kolem světelných zdrojů
- Výtok sekretu z oka
- Nepohodlí/bolest
- Závažná nebo přetrvávající suchost oka

Tyto příznaky mohou vést k závažnějším komplikacím, pokud by byly ignorovány.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE SE VYSKYTNE PROBLÉM

Pokud se vyskytne kterýkoli z výše uvedených příznaků, postupujte následujícím způsobem:

• **ČOČKU(Y) IHNEDE VYJMĚTE.**

• Zkontrolujte oko v zrcadle, zda nenaleznete něco neobvyklého.

• Pokud nepříjemný pocit nebo problém po vyjmutí čočky odezní, nasadte si novou čočku.

• Pokud po zavedení nové čočky (nových čoček) příznaky přetrvávají, čočku(y) **IHNEDE** vyjměte a obraťte se na svého očního specialistu. Může se jednat o závažný problém, např. infekci, rohovkový vřed (ulcerózní keratitida) nebo zánět duhovky (iritida). Tato onemocnění se mohou rychle zhoršovat a vést k trvalé ztrátě zraku. I méně závažné stavy, jako jsou abraze epitelu, rohovkové otoky nebo bakteriální zánět spojivek (konjunktivitida), musí být řádně léčeny, aby nedošlo k rozvoji dalších komplikací.

• Pokud dojde během neopatrné manipulace k natržení/poškození kontaktní čočky, budete vnímat pocit nepohodlí. Buďte klidní, neboť kontaktní čočka ani její část se nemohou ztratit do prostoru za okem. Jednotlivé části čočky opatrně vyjměte stlačením mezi prsty jako při vyjímání standardní kontaktní čočky. Pokud nelze snadno odstranit zbytky čočky, nesnažte se je vyjmout našlím. Propláchněte oko fyziologickým roztokem. Pokud ani toto nepomůže, obraťte se na očního specialistu. Oční specialista je schopen snadno nalézt čočku pomocí fluoresceinu.

• V případě příležitostného pocitu suchosti oka lze zajistit úlevu opakovaným několikaanásobným zamrkáním nebo použitím lubrikačních a zvlhčujících kapek.

Bude-li suchost oka přetrvávat, obraťte se na svého očního specialistu.

DALŠÍ INFORMACE

Riziko možných problémů lze snížit včasným rozpoznáním jejich příznaků a dodržováním podle pokynů v části „Co dělat v případě, když se vyskytne problém.“

Používání kontaktních čoček zvyšuje riziko očních infekcí. Kouření u uživatelů kontaktních čoček dále zvyšuje riziko rohovkového vředu.

 **VÝROBCE:**
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA

 **ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE V EU:**
Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park, Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR, Velká Británie

Distributor/Dovozce:
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4

Zkratky ve specifikacích čoček:

DIA	Průměr
BC	Základní zakřivení
PWR	Dioptrická hodnota
CYL	Cylindr
AXIS	Osa
L	Levá
R	Pravá

Datum poslední revize textu:
2013-11

* obchodní značka společnosti Novartis