

Příbalový leták a návod k použití oční kapky Gelone DROPS

Charakteristika:

Oční kapky Gelone DROPS působí jako náhrada přirozených slz vytvořením zvlhčující ochranné vrstvy na povrchu oka. Obsahem solí se tyto kapky blíží lidským slzám. Jsou dodávány v objemech 10 ml a 15 ml.

Složení:

Sterilní izotonický roztok, chlorid sodný, chlorid draselný, boritan sodný, hydroxypropylmethylelulosa .

Indikace:

Oční kapky Gelone DROPS se užívají při nedostatečné tvorbě slz a v případech, kdy je třeba chránit oko vytvořením umělého slzného filmu a zvlhčit jej. Lze je také použít jako lubrikant pro větší klouzavost kontaktních čoček a jako řešení obtíží (pocitů pálení, svědění, řezání, cizího tělíska v oku a světlolachosti) způsobených tzv. syndromem suchého oka, jehož příčinou je nesprávná tvorba slzného filmu. Kapky Gelone DROPS také pomáhají proti vysychání očí při snížené frekvenci mrkání (např. při sledování televize nebo práci na počítači) a zmírňují negativní pocity způsobené vlivem vnějšího prostředí (větretem, smogem, kouřem, klimatizovaným vzduchem). Pokud si nejste jisti, co Vaše potíže způsobuje, poraďte se se svým lékařem.

Kontraindikace:

Oční kapky se nesmí užívat při přecitlivělosti na jakoukoli ze složek přípravku. Přípravek je obvykle dobře snášen. Vzácně se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou pocit slzení více, pálení víček a oka, přecitlivělost a zarudnutí oka. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí OKÁMŽITĚ přerušte používání kapek a vyhledejte svého ošetřujícího lékaře, který rozhodne o dalším postupu.


Návod k použití:

Aplikujte dle obrázků 1 - 3.

Vezměte hlavu mírně dozadu (obr. 1).

Ustříhavičky přiblížte shora k oku. **POZOR:** spodní víčko oka lehce dolů. Ustříhavičky přiblížte shora k oku. **POZOR:** spodní víčko oka lehce dolů.

Nikdy se přímo nedotýkejte oka lahvičkou kapek. Lehkým tlakem na lahvičku aplikujte 2-3 kapky přípravku do spojivkového vaku za spodní víčko (obr. 2). Jemně tiskněte ukazováčkem oční víčka v nazální části (při koutku oka blíže k nosu) asi po dobu jedné minuty (obr. 3).

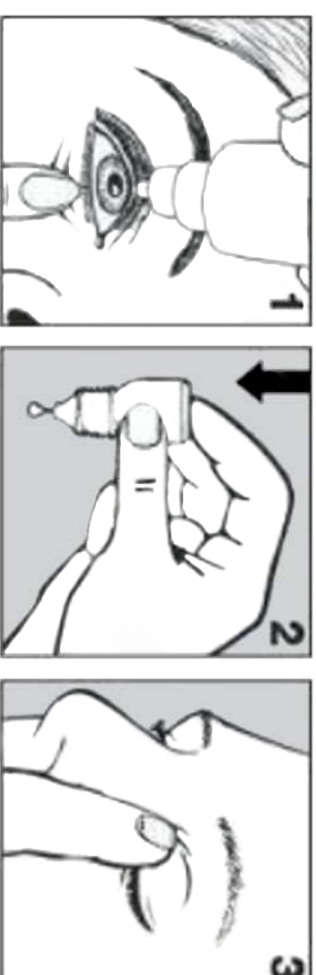

Kapací lahvičku po upotřebení zase uzavřete. Uchovávejte při teplotě do 30 st. C. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Upozornění:

- ☒ Roztok nepolykejte.
- ☒ Nepoužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku.
- ☒ Skladujte při teplotách 5-30 °C
- ☒ Aby se zabránilo kontaminaci, nedotýkejte se koncem kapacího uzávěru oka ani jiných předmětů.
- ☒ Lahvičku po použití ihned pevně uzavřete
- ☒ Přípravek nepoužívejte po uplynutí 30 dní od prvního otevření
- ☒ Nepoužívejte přípravek s prošlou expirační lhůtou
- ☒ Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
- ☒ Dodržujte 15 minutový interval mezi aplikacemi jednotlivých přípravků

SYMBOL	DEFINICE	SYMBOL	DEFINICE
	Viz informace na příbalovém letáku		Certifikát kvality EU
	Použití do: (datum expirace)		Uchovávejte při teplotě do 30 °C
	Číslo výrobní šarže		Datum výroby
	Sterilizováno		Výrobce

Dovozce: ALENESA, s.r.o., Stružky 1326/6, 198 00 Praha 9, IČ: 27179618
Výrobce: STERICON PHARMA PVT, Bangalore-99, Karnataka, India
Zpřimocenný zástupce v EU: MYM STC, S.L., Avada de los Rosales 32, 28935 Mostoles Madrid, SPAIN