


Návod k použití
ultrazvukové čističky na kontaktní čočky GM 02


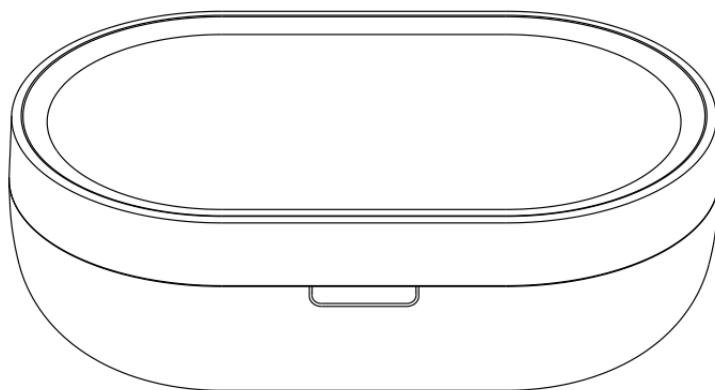


* Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt, prosím pečlivě si přečtěte a bezpečně uschovejte tento návod k použití

ULTRAZVUK, s.r.o. | Sušilova 1337 | CZ-500 02 Hradec Králové | Czech Republic

Visit our website | www.ultrazvuk.eu | www.ultrazvuk-sro.cz


Popis přístroje

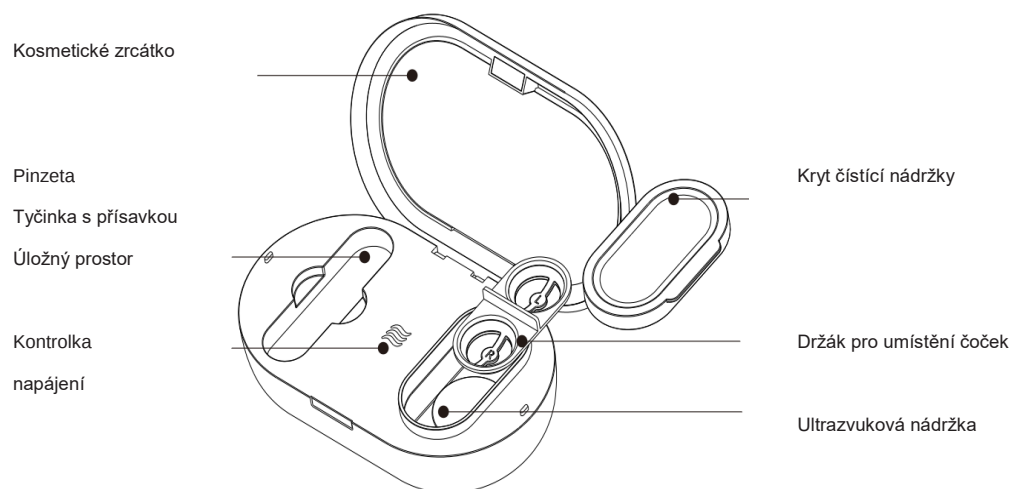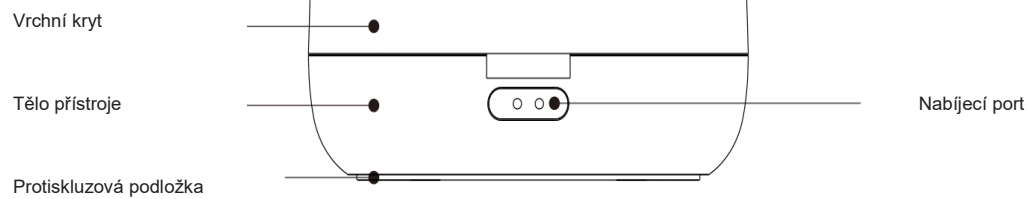

Seznam dílů




Ultrazvuková čistička
kontaktních čoček

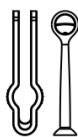

Pinzeta
Tyčinka s přísavkou



Držák pro
umístění čoček

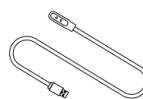

USB kabel



Ochranný
obal

Bezpečnostní opatření

Abyste předešli zranění uživatele nebo jiných osob a předešli škodám na majetku, dodržujte prosím následující:

- ✖ Přístroj nenechte používat dětmi nebo jej nedávejte na místo, kde se ho dítě může snadno dotknout.
- ✖ Lidé s implantovaným kardiostimulátorem mají zakázáno používat tento produkt.
- ✖ Před použitím nalijte do čistící nádoby kapalinu (roztok na kontaktní čočky).
- ✖ Nikdy nepoužívejte hořlavé či výbušné kapaliny nebo agresivní chemikálie (kyseliny, louhy, ani jejich roztoky), bělidla apod.
- ✖ Neponořujte hlavní část na delší dobu do vody (přes 30 minut je zakázáno).
- ✖ Udržujte čistící box mimo zdroj ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- ✖ Nedotýkejte se napájecího zdroje kovovými předměty.
- ✖ Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- ✖ Nevystavujte přístroj silným otřesům a pádům.

Specifikace produktu

Název: ultrazvuková čistička kontaktních čoček

Model: GM02

Jmenovité napětí: DC5V

Jmenovité nabíjecí napětí: 1A

Jmenovitý výkon: 2W

Baterie: 3.7V450mAh

Materiál oplachové nádržky: SUS304

Vnitřní rozměry nádržky: délka 40 x šířka 23 x výška 10mm

Objem nádržky: cca 7ml

Hmotnost produktu: 450g

Velikost produktu: délka 100 x výška 60 x šířka 35mm


Obsahuje: hlavní přístroj, pinzetu, tyčinku s přísavkou, rámeček pro čočky, USB kabel, ochranný obal.

*** Veškeré specifikace produktu, vzhled a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.**


Provozní instrukce

Čištění kontaktních čoček


1. Otevřete vrchní magnetické víko
čističky

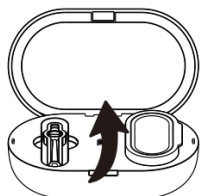

2. Sejměte kryt čistící
nádržky

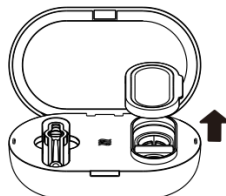


3. Vložte kontaktní čočky

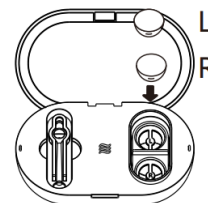


Pozn.: dejte prosím pozor na umístění levé a pravé čočky (označeno na držáku čoček).

4. Nalijte na čočky roztok
na kontaktní čočky.

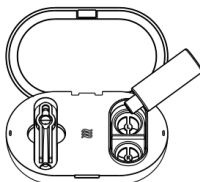

5. Zavřete kryt čistící nádržky,
na 1 vteřinu stiskněte tlačítko

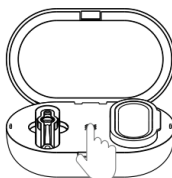

6. Vyměňte držáček čoček
vyjměte čočky a očistěte
čistící nádržku

※ Čistička se automaticky
vypne po 2 minutách.

Během čištění svítí indikátor bíle,
jakmile se přístroj vypne, indikátor
svítí červeně. Po 3 vteřinách
v nečinnosti zhasne úplně.

Pozn. nádržku naplňte roztokem
maximálně do výšky nerez nádržky.

Pozn.: řádně uzavřete
kryt nádržky

Nabíjení přístroje

Pokud je již baterie slabá, červená kontrolka 5krát zabliká, v tomto případě zapojte USB kabel pro nabíjení. Ve stavu nabíjení bliká červená kontrolka, po dokončení nabíjení červený indikátor svítí 5 sekund a poté zhasne.

Ekologická likvidace elektroodpadu je zajištěna v rámci kolektivního systému Elektrowin a.s.

(www.elektrowin.cz)



Servisní středisko: ULTRAZVUK, s.r.o., Svatopluka Čecha 3121, 440 01 Louny