

Návod na použití respirátorů

Respirátory Sunway jsou určeny k ochraně proti pevným netoxickým částicím a vodním aerosolům v koncentracích nepřevyšujících čtyřnásobek NPK (FFP 1) resp. Desetinásobek NPK (FFP 2). Slouží k jednorázovému použití. Špatné použití může snížit účinnost.



1. Vyjměte respirátor z balení, zkontrolujte, zda není poškozený a uchopte jej do ruky.
2. Přes nosní sponu přehodte dopředu upínací pásky a respirátor přiložte na nos a ústa.
3. Upevněte respirátor pomocí obou ušních popruhů.
4. Jemným stiskem sevřete sponu (nosní část) a upravte respirátor tak, aby dokonale přilnul k nosu a obličeji.
5. Ujistěte se, že přední část dobře těsní a nedochází k úniku vzduchu kolem úst a nosu.

Bezpečnostní varování při používání respirátorů

Důrazně doporučujeme dodržovat následující bezpečnostní varování. Ignorací těchto informací může dojít ke snížení účinnosti respirátoru nebo dokonce poškození zdraví.

1. Je-li respirátor, jakkoliv vizuálně poškozený nebo je-li kontaminovaný vydechovanými sekrety z úst nebo jinými tělními tekutinami, ihned ho zlikvidujte jako zdravotní odpad a vyměňte za nový.
2. Je-li respirátor extrémně zmačkaný, může být podstatně narušena jeho účinnost, proto ho nepoužívejte.
3. Respirátor vždy noste na hladkém a oholeném obličeji. Vousy nebo vlasy snižují těsnost mezi obličejem a respirátorem.
4. Respirátor nepoužívejte v prostorech, kde je nedostatek kyslíku, tzn. v atmosféře, kde je kyslíku méně než 19,5 %.
5. Respirátor nepoužívejte ve špatně větraných prostorech nebo ve výbušné atmosféře.
6. Respirátor nepoužívejte při hašení požáru nebo pískování (otryskávání).
7. Respirátor nedezinfikujte alkoholem, ani neomývejte vodou nebo saponátem.
8. Nepoužívejte respirátor při autolakování nebo jiných formách zahřívání. K tomu použijte jiný vhodný respirátor.
9. Respirátor je určen pouze pro jedno použití. Opakované použití je zakázáno.
10. Pokud si respirátor sundáte z obličeje, nedotýkejte se jeho přední části, ale pouze ušních popruhů.
11. Je-li respirátor vlhký, ihned ho vyměňte.
12. Nepoužíváte-li respirátor, skladujte ho v originálním obalu a mimo kontaminované oblasti.

13. Použitý respirátor likvidujte v souladu s platnými předpisy.
14. Při přepravě respirátoru ho vždy nechte v původním celofánovém obalu.
15. Pokud respirátor nepoužíváte, nechte ho v původním neporušeném obalu. Nepřemísťujte ho do obalu jiného.
16. Použití polomasky přes vousy či vlasy, může způsobit úniky.
17. Pacienti se srdečním nebo jiným onemocněním (převážně respiračním), u kterých je nošení polomasky nekomfortní, by ji měli zlikvidovat a dále ji nepoužívat.
18. Masky označené „NR“ se nesmí používat více než jednu směnu.
19. V případě poškození obalu je přísně zakázáno masku používat.
20. Maximální životnost respirátoru je 8 hodin.
21. Budete-li respirátor používat ve vysoce prašném prostředí, snižuje se účinnost respirátoru

Skladování



Respirátor je platný 5 let od data výroby.

Dovozce: **Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7 - Holešovice**