

Návod na použitie respirátora

Respirátory Sunway sú určené na ochranu proti pevným netoxickým časticiam a vodným aerosólom v koncentráciách neprevyšujúcich štvornásobok NPK (FFP 1) resp. desaťnásobok NPK (FFP 2). Slúžia na jednorazové použitie. Nevhodné použitie môže znížiť účinnosť.



1. Vyberte respirátor z balenia, skontrolujte, či nie je poškodený a uchopte ho do ruky.
2. Cez nosnú sponu prehodte dopredu upínacie pásky a respirátor priložte na nos a ústa.
3. Upevnite respirátor pomocou obidvoch ušných popruhov.
4. Jemným stlačením zovrite sponu (nosnú časť) a upravte respirátor tak, aby dokonale priľnul k nosu a tvári.
5. Uistite sa, že predná časť dobre tesní a nedochádza k úniku vzduchu okolo úst a nosa.

Bezpečnostné varovanie pri používaní respirátorov

Dôrazne odporúčame dodržiavať nasledujúce bezpečnostné varovania. Ignorovaním týchto informácií môže dôjsť k zníženiu účinnosti respirátora alebo dokonca poškodeniu zdravia.

1. Ak je respirátor, akokoľvek vizuálne poškodený alebo ak je kontaminovaný vydychovanými sekrétmi z úst alebo inými telesnými tekutinami, ihneď ho zlikvidujte ako zdravotný odpad a vymeňte za nový.
2. Ak je respirátor extrémne pokrčený, môže byť podstatne narušená jeho účinnosť, preto ho nepoužívajte.
3. Respirátor vždy noste na hladkej a oholenej tvári. Fúzy alebo vlasy znižujú tesnosť medzi tvárou a respirátorom.
4. Respirátor nepoužívajte v priestoroch, kde je nedostatok kyslíka, tzn. v atmosfére, kde je kyslíka menej ako 19,5 %.
5. Respirátor nepoužívajte v zle vetraných priestoroch alebo vo výbušnej atmosfére.
6. Respirátor nepoužívajte pri hasení požiaru alebo pieskovaní (otryskávaní).
7. Respirátor nedezinfikujte alkoholom, ani neumývajte vodou alebo saponátom.
8. Nepoužívajte respirátor pri autolakovaní alebo iných formách zahrievania. Na to použite iný vhodný respirátor.
9. Respirátor je určený iba na jedno použitie. Opakované použitie je zakázané.
10. Pokiaľ si respirátor zložíte z tváre, nedotýkajte sa jeho prednej časti, ale iba ušných popruhov.
11. Ak je respirátor vlhký, ihneď ho vymeňte.
12. Ak nepoužívate respirátor, skladujte ho v originálnom obale a mimo kontaminovanej oblasti.
13. Použitý respirátor likvidujte v súlade s platnými predpismi.
14. Pri preprave respirátora ho vždy nechajte v pôvodnom celofánovom obale.

15. Pokiaľ respirátor nepoužívate, nechajte ho v pôvodnom neporušenom obale.
Nepremiestňujte ho do obalu iného.
16. Použitie polomasky cez fúzy či vlasy môže spôsobiť úniky.
17. Pacienti so srdcovým alebo iným ochorením (prevažne respiračným), u ktorých je nosenie polomasky nekomfortné, by ju mali zlikvidovať a ďalej ju nepoužívať.
18. Masky označené „NR“ sa nesmú používať viac ako jednu zmenu.
19. V prípade poškodenia obalu je prísne zakázané masku používať.
20. Maximálna životnosť respirátora je 8 hodín.
21. Ak budete respirátor používať vo vysoko prašnom prostredí, znižuje sa účinnosť respirátora.

Skladovanie



Respirátor je platný 5 rokov od dátumu výroby.

Dovozce: **Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7 - Holešovice**