

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Trace Pro, Keychain, S80 Pro

BACtrack C8, C6 Keychain



ŠPECIFICKÉ ÚČINKY DÁVOK ALKOHOLU*)

BAC [%]	Špecifické účinky
0,02-0,03	Mierna eufória. Strata plachosti. Tlmiace účinky nie sú zjavné. U niektorých jedincov je možné zhoršenie.
0,04-0,06	Pocit pohody, uvoľnenia, zníženia zábran a pocitu tepla. Eufória. Niekedy menšie poruchy uvažovania a pamäti. Zníženie opatrnosti. Pri tejto úrovni intoxikácie môže byť znížená schopnosť viesť vozidlo.
0,07-0,09	Mierne zhoršenie rovnováhy, reči, zraku, reakčného času a sluchu. Eufória. Úsudok a sebakontrola sú narušené. Zhoršená pozornosť, reakcie a pamäť. Pri tejto a vyššej úrovni opitosti sú vodičské schopnosti vždy zhoršené.
0,10-0,12	Výrazné zhoršenie motorickej koordinácie a strata správneho úsudku. Reč môže byť nezrozumiteľná. Zhorší sa rovnováha, zrak, reakčný čas a sluch. Eufória.
0,13-0,15	Hrubé zhoršenie pohyblivosti a nedostatočná fyzická kontrola. Rozmazané videnie a veľká strata rovnováhy. Eufória sa znižuje a začína sa objavovať dysfória (stavy úzkosti a depresívneho prežívania).

BAC [%]	Špecifické účinky
0,16-0,20	Prevláda dysfória (stavy úzkosti a depresívneho prežívania). Môže sa objaviť nevoľnosť.
0,25	Potrebná je pomoc pri chôdzi. Úplný duševný zmätok. Dysfória (stavy úzkosti a depresívneho prežívania) s nevoľnosťou a vracaním.
0,30	Strata vedomia.
0,40 a viac	Nástup kómy. Možná smrť v dôsledku zástavy dýchania. **)

BAC = obsah alkoholu v krvi.

Prístroj zobrazuje výsledky merania v % BAC, hodnoty v promile sú desaťkrát väčšie (napr. 0,13 % BAC = 1,3 ‰).

*) Účinky intoxikácie alkoholom sú silne ovplyvnené individuálnymi rozdielmi medzi užívateľmi. Niektorí užívatelia sa intoxikujú oveľa skôr.

**) Smrť môže nastať aj pri nižšej hladine alkoholu v krvi, je to veľmi individuálne.

Vaša schopnosť viesť vozidlo môže byť znížená pri akejkoľvek hodnote nad 0,00 % BAC (t. j. 0,00 ‰). Nikdy nie je bezpečné piť akékoľvek množstvo alkoholu a šoférovať.

Dôležité!

Testované osoby by mali počkať 20 minút po jedle, pití alebo fajčení a až potom fúknuť do testera BACtrack. Ak nepočkáte 20 minút, môže to mať za následok nepresné výsledky testu a poškodenie snímača.

BACtrack Trace Pro, Keychain, S80 Pro


PRÍPRAVA

Inštalácia batérií

Do priestoru pre batérie vložte batérie vhodného typu.

POPIS PRODUKTU

Pohľad spredu

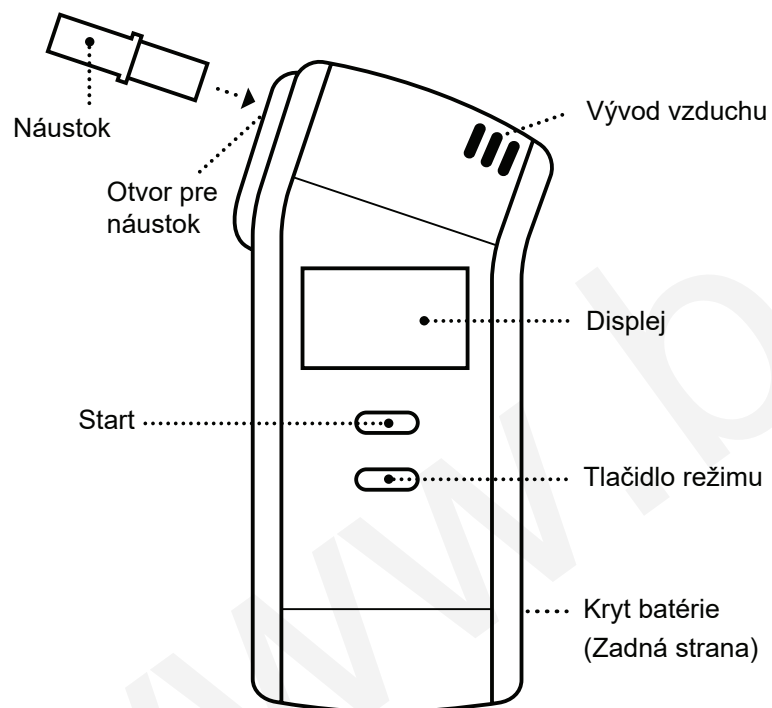

* Obrázok je len ilustračný, funkcie a tlačidlá sa môžu v jednotlivých modeloch líšiť

WAIT 20
MINUTES



NO
EATING



NO
DRINKING




NO
SMOKING




SERVIS






Krok 1: Vložte náustok do otvoru. Nepoužívajte silu, náustok zasunúte len na niekoľko milimetrov.

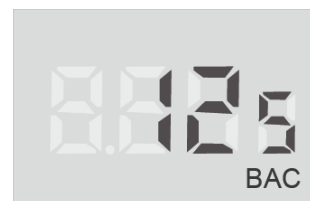

Krok 2: Stlačte tlačidlo **START**. Tester rýchlo zobrazí celkový počet vykonaných testov a spustí odpočítavanie.

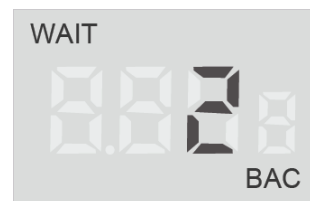

Krok č. 3: Keď sa odpočítavanie blíži k číslu 2, začnite zhlboka dýchať.

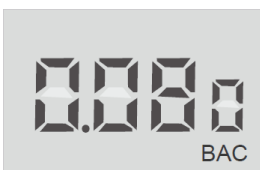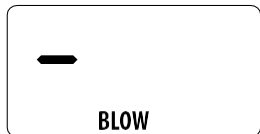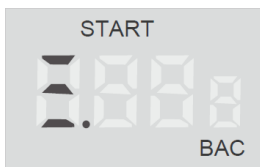


Krok 4: Keď odpočítavanie dosiahne nulu, na displeji sa zobrazí riadok(y) a bliká START. Jemne fúkajte do náustka 5 sekúnd, kým tester dlho nepípne. Prestaňte fúkať hneď, ako zaznie zvukový signál (spolu 2 zvukové signály).


Krok 5: Po analýze vzorky dychu sa na displeji zobrazí hodnota BAC.

POZNÁMKA: Ak chcete dosiahnuť čo najpresnejšie výsledky, počkajte medzi jednotlivými testami minútu. Pri testovaní vysokých hladín počkajte medzi jednotlivými testami 3-5 minút.


Upozornenie na chyby

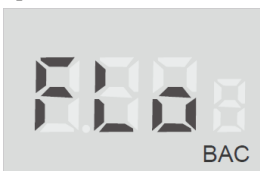


Ak testovaná osoba nenadýchla dostatočné množstvo vzorky dychu, na LCD displeji sa zobrazí "Flo". Opätovne stlačte tlačidlo **START**, spustí sa nové odpočítavanie a test sa zopakuje. Uistite sa, že tentoraz je dych správny a bude skutočne trvať 5 sekúnd.

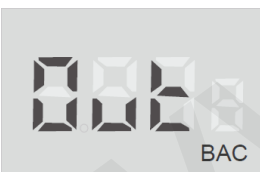

Ak sa nedostaví do 15 sekúnd na vyfúknutie vzorky dychu, na LCD displeji sa zobrazí "Out". Opätovne stlačte tlačidlo **START**, spustí sa nové odpočítavanie a test sa zopakuje.

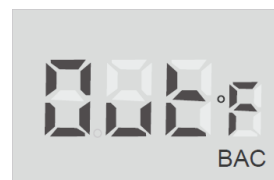

Ak tester zapnete mimo rozsahu prevádzkových teplôt (0-40 °C), na displeji sa zobrazí "Out°F" a testovanie nie je možné vykonať.

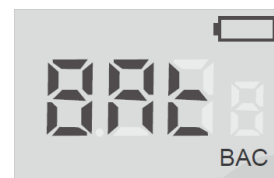


Keď sa na displeji zobrazí ikona prázdnej batérie, vložte nové batérie požadovaného typu.


* Rozšírené možnosti ponuky

* platí len pre S80 Pro


Tester ponúka niekoľko ďalších funkcií, ktoré možno nastaviť pomocou režimu **Menu**. Ak chcete vstúpiť do tohto režimu, zapnite tester a počas odpočítavania stlačte tlačidlo **MODE** na 5 sekúnd. Ak chcete prechádzať medzi jednotlivými režimami, krátko stlačte tlačidlo **MODE**.

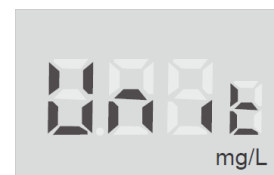


Použité jednotky: tester štandardne používa jednotky bežné v Severnej Amerike (percentá). Stlačením tlačidla **START** prepnete na iné jednotky (promile, mg/l,...).

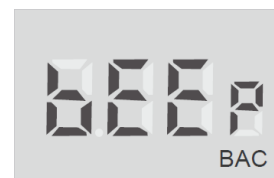


Zvukové upozornenie: V predvolenom nastavení tester nevydáva žiadny zvukový signál na získanie konkrétnej hodnoty. Ak chcete zvukový signál, po dosiahnutí zvolenej hodnoty stlačte tlačidlo **START**.

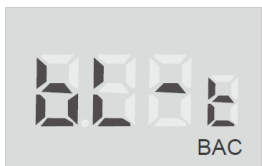


Čas fúkania: predvolený čas fúkania je 5 sekúnd. Hlbší nádych poskytuje presnejší výsledok. Ak chcete nastaviť čas fúkania, stlačte tlačidlo **START**.

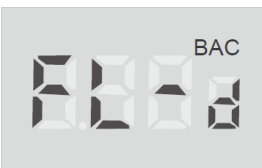


Nastavenia detekcie dychu:
Pomocou tejto ponuky môžete nastaviť, ako náročný bude požadovaný dych. Túto možnosť môžete zmeniť stlačením tlačidla **START**.

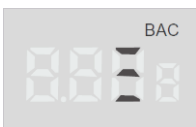


Štandardná úroveň dýchania
Toto je predvolené nastavenie testera. Toto nastavenie vyžaduje od používateľa menej intenzívne dýchanie.

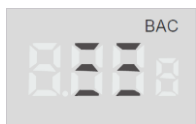

Stredná úroveň dýchania
Stlačením tlačidla **START** nastavte strednú úroveň požadovaného dychu.

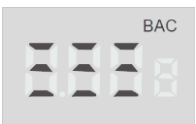

Silná úroveň dychu
Stlačením tlačidla **START** nastavte úroveň sily požadovaného dychu. Toto nastavenie vyžaduje od používateľa silnejší dych.

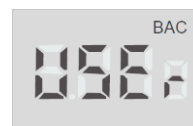

Používateľom aktivovaný testovací režim
Opätovným stlačením tlačidla **START** zmeníte používateľom aktivovaný testovací režim. Pri testovaní v tomto režime musí obsluha počas dýchania stlačiť tlačidlo **START**, aby sa aktivovalo čerpadlo a vykonal test.

Ďalšie chybové hlásenia




Ak sa po kroku 4 na displeji zobrazí "Err2", nebol dodržaný interval aspoň 20 minút. Počkajte 20 minút a skúste test zopakovať.



Na displeji sa zobrazí "FL":

- Používateľ nezačal fúkať po čase zahrievania.
- Používateľ nefúkal 5 sekúnd v kuse
- Používateľ nedodrжал 20-minútový odstup

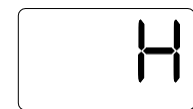

Na displeji sa zobrazí "H":

Hladina prekročila hornú hranicu 0,40 % BAC. Overte dodržiavanie 20-minútového intervalu.



Na displeji sa zobrazí "Err":

Senzor je poškodený, kontaktujte podporu.



Ikona slabej batérie: vložte nové batérie vhodného typu.


BACtrack C8, C6 Keychain

POPIS PRODUKTU

Pohľad spredu

PREDNÉ LED KONTROLKA
svieti, keď je zariadenie zapnuté

ZADNÉ LED
KONTROLKY
svieti, keď
je v režime
aplikácie
BACtrack

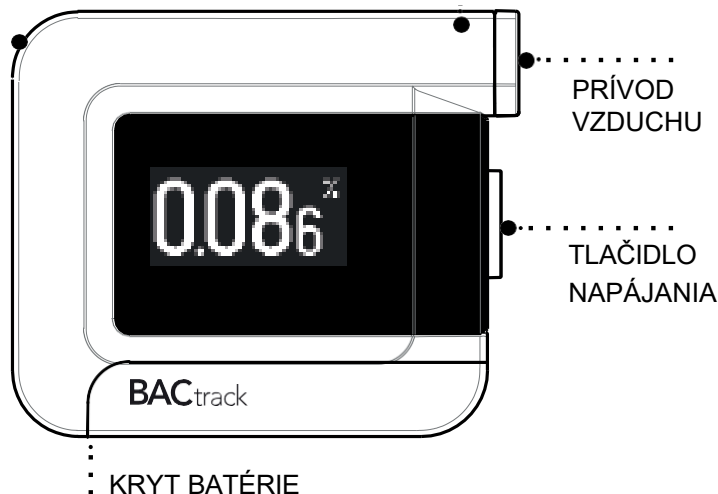

AKÉ VÝSLEDKY TESTOV SA POSKYTUJÚ:

- 1) **Samostatný režim** - priamo na displeji testera BACtrack. V tomto režime sa neukladajú ani neprenášajú žiadne výsledky.
- 2) **Režim aplikácie BACtrack** - do aplikácie BACtrack v smartfóne. V tomto režime môžete výsledky testu uložiť.

POZNÁMKA: Modrá LED dióda na zadnej strane testera indikuje, v akom režime sa nachádzate. Ak kontrolka svieti, ste v režime aplikácie BACtrack. Ak je kontrolka zhasnutá, ste v autonómnom režime.

Ak chcete prepnúť z jedného režimu do druhého, podržte tlačidlo **napájania** stlačené 7 sekúnd.

SAMOSTATNÝ REŽIM

- KROK 1:** Do priestoru pre batérie vložte batériu vhodného typu.
- KROK 2:** Ak chcete používať náustok, pripojte ho k testeru. **POZNÁMKA:** Použitie náustku nie je povinné.
- KROK 3:** Stlačte tlačidlo **napájania** na prístroji BACtrack na jednu sekundu a tester sa zapne.
- KROK 4:** Rozsvieti sa predná modrá LED dióda. BACtrack zobrazí "**Warming Up**" a potom odpočítava. Keď sa odpočítavanie blíži k číslu 2, začnite zhlboka dýchať.
- KROK 5:** Keď odpočítavanie dosiahne nulu, na obrazovke začne blikať "**BLOW**". Dlho a rovnomerne fúkajte 6 sekúnd do otvoru na nasávanie vzduchu - nesnažte sa fúkať príliš silno. Počas BACtrack vydá zvukový signál. Keď pípanie prestane, prestaňte fúkať. Na konci sa ozve cvaknutie - to vzduchové čerpadlo vháňa vzduch do snímača.
- KROK 6:** Po analýze vzorky dychu sa na displeji zobrazí odhadovaná hodnota BAC. Potom sa zobrazí funkcia **ZeroLine**, ktorá ukazuje, za aký čas sa vaša odhadovaná hladina BAC vráti na nulu (ak už nepožijete žiadne ďalšie nápoje). Odhadovaný čas sa zobrazuje v hodinách a minútach. Na obrazovke sa zobrazí krátke zhrnutie ako môže hladina alkoholu ovplyvňujú vaše telo.

Zariadenie BACtrack sa automaticky vypne do 10 sekúnd. Tester môžete vypnúť aj počas odpočítavania stlačením tlačidla **napájania** na 2 sekundy.

Predná modrá LED dióda zhasne.

REŽIM APLIKÁCIE BACTRACK

- KROK 1:** Vložte jednu alkalickú batériu AAA (mikrotužkovú) do priehradky na batérie.
- KROK 2:** Ak chcete používať náustok, pripojte ho k testeru. **POZNÁMKA:** Použitie náustku nie je povinné.
- KROK 3:** Stiahnite si aplikáciu **BACtrack** z App Store alebo Google Play.
- KROK 4:** Prejdite do ponuky **Nastavenia** v mobilnom zariadení a potvrdte, že je zapnutá funkcia Bluetooth®; tým sa zabezpečí, že vaše zariadenie je spárované s aplikáciou.
- KROK 5:** Spustíte aplikáciu **BACtrack** v mobilnom zariadení.
- KROK 6:** Stlačte a podržte tlačidlo **napájania** na testerí BACtrack na 1 sekundu a tester sa zapne. Rozsvieti sa predná modrá LED dióda. Ak je zadná modrá LED dióda zhasnutá, podržte stlačené tlačidlo **napájania** 7 sekúnd, čím sa prepnete do režimu aplikácie **BACtrack**.
V režime aplikácie BACtrack sa tester automaticky spáruje s mobilným zariadením. Keď sa aplikácia spojí s testerom BACtrack, na obrazovke aplikácie sa okamžite zobrazí obrázok vášho testera BACtrack.

KROK 7: Ak chcete spustiť proces testovania, kliknite v aplikácii na položku **"BAC Test"**. Počas zahrievania snímača BACtrack máte možnosť použiť funkciu **"Guess your BAC"**. Je to nepovinné a nemá to vplyv na vaše konečné testovanie. Zobrazí sa váš odhad a skutočná hodnota, aby ste mohli porovnať svoj pocit s skutočný výsledok testu. Ak budete túto funkciu používať často, zistíte, že sa vám lepšie odhaduje, ako alkohol pôsobí na váš organizmus.

KROK 8: Keď sa na obrazovke mobilného zariadenia zobrazí **"Blow Now"**, zhlboka sa nadýchnite a nepretržite fúkajte do prístroja BACtrack, kým všetky modré segmenty nezískajú oranžovú farbu.

KROK 9: Keď zariadenie BACtrack analyzuje vzorku dychu, odošle namerané hodnoty do mobilného zariadenia, kde sa zobrazí hodnota BAC (hodnota BAC je 10-krát menšia ako v ppm: $0,13 \%BAC = 1,3 \text{ ‰}$).

KROK 10: Kliknutím na tlačidlo **OK** zobrazíte odhadovaný čas do dosiahnutia nulovej hodnoty a ďalšie informácie o výsledku BAC.

Zariadenie BACtrack sa automaticky vypne do 10 sekúnd. Tester môžete tiež kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla **napájania** na 2 sekundy.

Priebežne aktualizujte aplikáciu **BACtrack**, pretože neustále pridávame nové funkcie a možnosti.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

SLABÁ BATÉRIA

Vložte novú alkalickú batériu AAA (mikro gombík) do priestoru pre batérie.

CHYBA: TEPLOTA

Ak je tester zapnutý mimo prijateľného teplotného rozsahu (0-40 °C), testovanie nie je možné vykonať. Vypnite tester. Po použití testera v prijateľnom prostredí test zopakujte.

CHYBA: FÚKA NEPRETRŽITE 6 SEKÚND

Stlačením tlačidla **napájania** resetujte tester a znovu spustíte odpočítavanie.

CHYBA: NEBOLO ZISTENÉ ŽIADNE FÚKANIE Stlačením tlačidla **napájania** resetujte tester a znovu spustíte odpočítavanie.

CHYBA: PREKROČENIE MAXIMÁLNEJ HODNOTY BAC

Odhadovaná hodnota BAC prekročí maximálnu merateľnú hodnotu 0,30 %BAC (3,00 ‰). Ak ste nepočkali 20 minút po poslednom poháriku, zvyšky alkoholu v ústach by mohli spôsobiť falošný výsledok.

VYHL'ADÁVANIE ZARIADENÍ

Tester je v režime aplikácie BACtrack a vyhľadá aplikáciu **BACtrack** vo vašom smartfóne. Medzi samostatným režimom a režimom aplikácie BACtrack môžete prepínať stlačením tlačidla **napájania** na 7 sekúnd.

ŽIADNE ZARIADENIE NEBOLO NÁJDENÉ

Tester je v režime aplikácie BACtrack a nemôže načítať aplikáciu BACtrack do smartfónu. Skontrolujte, či je možné v telefóne spustiť funkciu Bluetooth.

Často kladené otázky

PREČO SA ROZSVIETI ZADNÁ LED DIÓDA?

Ste v režime aplikácie **BACtrack** a výsledky testu sa odošlú do vášho smartfónu.

PREČO SA NA DISPLEJI NEZOBRAZUJÚ VÝSLEDKY TESTOV?

Nie ste v samostatnom režime. Stlačením tlačidla **napájania** na 7 sekúnd prepnete režim.

PREČO APLIKÁCIA NEMÔŽE NÁJSŤ MÔJ TESTER?

Váš tester nie je v režime aplikácie BACtrack. Stlačením tlačidla **napájania** na 7 sekúnd prepnete režim.

Ďalšie často kladené otázky nájdete na stránke:

<https://www.bactrack.cz/faq/>

MIERKY

1. Po jedle, pití alebo fajčení počkajte pred meraním aspoň 20 minút. V opačnom prípade môže dôjsť k nepresným údajom a poškodeniu snímača.
2. Cez tester nefúkajte dym, potraviny ani tekutiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu snímača.
3. Netestujte v oblastiach so silným vetrom, dymom alebo tam, kde sa konzumuje veľké množstvo alkoholu.
4. Podľa potreby pošlite tester na pravidelnú kalibráciu (pozri časť Kalibrácia).
5. Alkohol tester BACtrack je určený na použitie v teplotnom rozsahu od 10 °C do 40 °C.
6. Vyhnite sa testovaniu v prítomnosti látok, ktoré obsahujú metylalkohol, acetón alebo izopropylalkohol (známy aj ako 2-propanol, izopropanol, izopropanol, izo, izopro, IPA). Tieto látky môžu interferovať s výsledkami meraní.
7. Výsledky meraní s týmto testerom nemožno použiť na súde.
8. Nepoužívajte tester BACtrack ako nástroj na určenie, či máte viesť motorové vozidlo alebo vykonávať inú nebezpečnú činnosť.
9. Nejazdite pod vplyvom alkoholu. Pri pití alkoholu majte vždy triezveho vodiča.
10. Ak ikona indikátora batérie dosiahne iba jeden stĺpec, vymeňte batériu príslušného typu. **VAROVANIE:** Pri výmene nesprávneho typu batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov predajcu.

Výrobca, distribútor ani predajca nenesú zodpovednosť za konanie a činy osôb, ktoré požili alkohol. Použitie dychovej skúšky ich nezbavuje

OVEROVANIE A KALIBRÁCIA

Ďalšie informácie o kalibrácii nájdete na adrese:
www.bactrack.cz/kalibrace/

Distribútor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz
© Sunnysoft s.r.o., distribútor