



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SÓTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK LEVEGŐKEZELÉSHEZ

□ SALIN PLUS □ SALIN S2



A SALIN készülék teljesen új levegőkezelő-eljárást alkalmaz, amelynek során a levegőt nátrium-klorid sószemcséket tartalmazó szűrőblokkon vezetik át. A szűrőblokkon ventilátor segítségével átvezetett levegő hatására folyamatosan nátrium-klorid aeroszol jut a környezetbe, ami megváltoztatja a levegő ionizációját. A sóionokat speciális módszerrel állítják elő, amelyet az EU-ban a légzőszervek kezelésének igen hatékony módszereként szabadalmaztattak és engedélyeztek. Az otthoni sóbarlangok a sóbarlangokhoz és bányákhoz hasonló környezetet biztosítanak. A SALIN készülék használata egyszerű.

A HASZNÁLAT HATÁSAI

- Általános higiéniai hatások

Használata során a SALIN készülék javítja a levegő minőséget, leüleptíti a port, és eltávolítja a cigarettafüstöt. Megszünteti a kellemetlen szagokat (izzadság, penész, régi könyvek) és javítja a levegő minőségét, amely friss és kellemesen belélegezhető lesz.

- Általános egészségügyi hatások

A SALIN egészséges vagy különböző légzőszervi betegségekben szenvedő emberek általi használata következtében számos általánosan előnyös hatást mutattak ki, mint például a megfázással szembeni ellenálló képesség növekedése, pihentető alvás, lelki jóllét, légzési problémák csökkenése és a horkolás csökkenése.

- Terápiás hatások

A készülék használata a légzőszervi betegségekben szenvedő emberekben számos jótékony hatást gyakorol felső és alsó légúti betegségek széles köre esetén. A fül-orr-gégészeti problémák esetében a SALIN nagy segítségnek bizonyult nátha, arcüreggyulladás, gégegyulladás és általános zsibbadás vagy allergiás problémák esetén. Tüdőbetegeknél kedvező eredményeket értek el asztma, asztmás hörghurut, bronchiectasis, szilikózis, TBC gyógyulásában való alkalmazás, mucoviscidosis esetén. Jótékony hatásokat figyeltek meg légzőszervi hiányállapotokban, mint például szívbetegségek vagy a pajzsmirigy által okozott problémák.

A nátriumionokat a szakirodalom és az orvosok is a sejtmembrán fő stabilizátoraként ismerik el a légúti hámokban. A nátriumionok jelenlétében sor kerül a hörgők váladékának és a felső légutaknak a fluidizációjára, s ezáltal megnő a nyálka sófázisának mennyisége. Ugyanakkor aktiválódik a csillószőrök mozgása (még a krónikus dohányosoknál is, ahol ez a tevékenység köztudottan nagymértékben károsodott), ami a légúti váladék gyors eltávolításához vezet. A nátriumionok hatására csökken a felső aerodigestív traktus, a szájpadlás, a nyelv és a mandulák területének ödémája, amelyek gyakran előfordul a krónikus horkolásban szenvedő személyeknél. Gyulladásos ödéma a középső orrjáratokban, ami ezek áteresztőképességének helyreállításához és a melléküregek elvezetéséhez vezet. Ez a megállapítás jól ismert, és krónikus légúti betegségekben alapvető klinikai ajánlást képez a tengeri aeroszol és a szanatóriumokban és sóbányákban végzett gyógyfürdő kezeléseket illetően. A SALIN készülék használata biztosítja a gyulladásos ödéma csökkenését a légutak egészében, ami lehetővé teszi a specifikus gyógyszeradagok fokozatos csökkentését és a gyógykezelés nagyobb hatékonyságát. Javítja a légutak működését, ami elengedhetetlen a jó egészségi állapot biztosításához, számos légúti problémát megold, és általában biztosítja a szervezet ellenálló képességének javulását a különböző légúti betegségekkel szemben. Jótékony hatásai miatt a SALIN készüléket általános kiegészítésként ajánljuk a légzőszervi problémákkal

küzdő, de az egészséges emberek számára is, a légzőrendszer ellenálló képességének növelése érdekében. A légúti váladék fluidizálására és a rezgések erősítésére gyakorolt hatása miatt lehetővé teszi a légúti váladék eltávolítását, és ezáltal biztosítja a könnyű és kényelmes légzést. Tisztítja az orrüregeket és még a horkolást is csökkenti.

FIGYELEM!

Ne szakítsa meg vagy változtassa meg jelenlegi kezelését. Ne hanyagolja el a rendszeres orvosi ellenőrzéseket. Kövesse orvosa tanácsát!

A készülék használatának jótékony hatása lassan, hosszabb időn keresztül érezhető!

HASZNÁLAT

A legjobb gyógyhatás érdekében javasoljuk, hogy a készüléket legalább napi 8 órán át használja. Az első időszakban! (legalább egy hónap) intenzív használat ajánlott, különösen éjszaka. A SALIN S2 készüléket 30-40 m³ és a SALIN PLUS készüléket 150 ni térfogatú helyiségekben való használatra tervezték. A SALIN készüléket a szobába lépés előtt 1-2 órával kapcsolja be. Javasoljuk, hogy a készüléket a padlótól kb. 1 m magasságban, a használatától 0,5-1,2 m távolságra helyezze el, különösen az ajánlottnál nagyobb helyiségekben. Nem ajánlott a készüléket kültéren, illetve magasabb páratartalmú és gőzzel terhelt helyiségekben (fürdőszobák, uszodák, szaunák, pincék stb.), poros helyiségekben és olajos aeroszokat tartalmazó helyiségekben (konyhák) használni. Ez csökkenti a szűrőblokk használati idejét!

KÜLÖNLEGES ORVOSI KÖZLEMÉNY

A légzőszervi problémákkal küzdő emberek a levegőminőség jelentős javulását fogják érezni, könnyebben fognak lélegezni. Valószínűleg azt fogják tapasztalni, hogy nem kell olyan gyakran használniuk a görcsoldó spray-ke.

Fordítson különös figyelmet jelenlegi egészségi állapotára. Ritka esetekben a köhögés jelenségének felerősödése előfordulhat a használat első időszakában. A légúti váladék hígítása aktiválja a kiválasztás folyamatát. A köhögés a fő mechanizmus ennek a folyamatnak az eléréséhez. Ha a köhögési rohamok túlságosan kellemetlenek, csökkentse a készülék feszültségét, vagy korlátozza a készülék használatának idejét az elején.

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a köhögés, hacsak nem túl intenzív, ebben az összefüggésben önmagában nem riasztó tényező. A napi használat fokozatosan 1-2 órától 6-8 órára növekszik, 2-3 hét alatt az említett jelenségek megszűnnek. A SALIN használatának első napjaiban a levegőbe kerülő só mennyisége nagyobb, és lehetséges, hogy a légzőszervekre gyakorolt hatások intenzívebbek lehetnek.

A SÓTARTALOM KORLÁTOZÁSÁVAL ÉLŐK SZÁMÁRA

A SALIN által termelt levegőből származó só hozzájárulása nagyon kicsi, a használat első 10 napján kevesebb mint 0,2 g/nap, a használat első hónapjában pedig kevesebb mint 0,1 g/nap. Ez a sómennyiség eléri a légúti hám felszínét, és a nyálkával együtt távozik. Ezen okok miatt a becslések szerint nem okoz problémát, azoknál, akiknek nagymértékben korlátozniuk kell a sóbevitelt. További védekezési intézkedésként ajánlott a készüléket 3-4 napig csökkentett sebességgel bekapcsolni egy külön helyiségben, hogy a készülék szállítása során képződő finom sóport eltávolítsák. Fokozatosan haladhatunk a belső levegő szellőztetésével. A készülék nem okoz korróziót a használati területen.

A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Helyezze az adapter dugóját a készülék csatlakozójába, majd az adaptert 230 V-os (váltakozó áramú) aljzatba.

A SALIN PLUS hatékonyságának megváltoztatásához használja a készülék hátoldalán található kör alakú tárcsát.

A **SALIN S2** hatékonyságának megváltoztatásához változtassa meg a bemeneti feszültséget a kihúzott adapteren a mellékelt kurbli segítségével.

Ha nem zavarja a készülék működése, ne csökkentse a hatékonyságát, mivel a kezelt levegő mennyisége csökken.

SZŰRŐBLOKK CSERE

; a készülék hatékonysági paramétereinek optimális fenntartása érdekében a

szűrőblokkot négy-hat hónapos használat után ajánlott cserélni. A szűrőblokk cseréje egységesen történik, ne próbálja meg kinyitni, vagy bármilyen módon sőt vagy más anyagot hozzáadni a régi szűrőhöz, ez egészségkárosodást okozhat, vagy működésképtelenné teheti a készüléket. Célszerű a következő blokkcsere dátumát a készülék alján található címkén feltüntetni.

Szűrőcsere a SALIN PLUS készülékben

-Húzza ki a tápegységet (adaptert) a konnektorból és a tápkábelt a készülék hátsó csatlakozójából.

-távolítsa el a készülék elülső fedelét, vegye ki az elhasznált szűrőblokkot, és helyezzen be egy újat.

-fedje le a készülék fedelét

-állítsa vissza a készülék áramellátását

VIGYÁZAT: Ne támassza meg a készüléket a hátoldalon található hatásfokszabályozóval.

Szűrőcsere a SALIN S2 készülékben

-Húzza ki a tápegységet (adaptert) a konnektorból és a tápkábelt a készülék hátsó csatlakozójából.

-távolítsa el a SALIN feliratú oldalsó biztonsági címkéket

-távolítsa el a készülék alsó fedelét a mellékelt kulccsal (a hatékonyság ellenőrzésére is használható).

- vegye ki a használt szűrőblokkot, és óvatosan helyezze az új szűrőblokkot az oldalsó hornyokba (nyíl kifelé mutat).

- tegye vissza a készülék fedelét, és rögzítse a mellékelt SALIN feliratú új biztonsági címkékkel.

- állítsa vissza a készülék áramellátását

KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

Ne használjon az egyes készülékek műszaki adataiban megadottól eltérő feszültség-csatlakozást.

A tápkábel nem cserélhető ki. Ha meghibásodott, húzza ki az adaptert, az már nem működőképes!

Védje a készüléket a mechanikai ütésektől!

Ne tárolja vagy használja a készüléket magas páratartalmú környezetben, ne tegye ki vízpermetnek!

Ha úgy találja, hogy a sóoldat szivárog a készülékből, áramtalanítsa azt. A probléma megoldása érdekében forduljon a kereskedőhöz vagy a gyártó képviselőjéhez.

A SALIN műszerek konstrukciós hibáira vonatkozó jótállási idő a vásárlástól számított 48 hónap.

Az átlagos használati idő 4 év.

A garanciális és garancián túli javításokat csak az importőr vagy a gyártó végezheti el.

A SALIN termékek garanciális javítása ingyenes.

A SALIN PLUS MŰSZAKI ADATAI

névleges feszültség:	230 V/9 V
névleges teljesítmény:	10 W
légáramlás:	12-32 mVh
a felhasznált térfogat:	max. 150 m ³
ajánlott használati idő:	8-10 óra/nap
szűrőblokk élettartama:	4-6
hónap	
tömeg:	max. 1 650 kg
méretek (mm):	181 x 165 x 235
zajszint:	max. 50 dB

A SALIN S2 MŰSZAKI ADATAI

névleges feszültség:	230 V/6-12 V
névleges teljesítmény:	10 W
légáramlás:	3-8 mVh
a felhasznált térfogat:	max. 40 m ³
ajánlott használati idő:	8-10 óra/nap
szűrőblokk élettartama:	4-6
hónap	
tömeg:	max. 0,600 kg
méretek (mm):	105 x 135 x 145
zajszint:	max. 60 dB



Figyelmeztetve

Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket használat után nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. A terméket újrahasznosítás céljából elektromos és elektronikus hulladékkezelő központba kell vinni, vagy a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ezzel hozzájárulhat a természeti környezet védelméhez.

JÓTÁLLÁSI LEVÉL

Készülék száma.....

Az eladás időpontja:

A SALIN jótállási ideje a vásárlástól számított 48 hónap.

Az eladó köteles a vevőnek igazolni a gyártó eredeti jótállási jegyét.

A jótállási kártya mindig olyan árukra vonatkozik, amelyeknél a sorozatszámot fel kell jegyezni a reklamációhoz, és erre a reklamációs eljárás átvételekor az adóigazolvánnyal vagy a szállítólevéllel együtt szükség lesz.

Tájékoztatás a jótállási feltételekről

A gyártó jótállást nyújt a végfelhasználóknak a kivitelezési hibákra. A jótállás a megvásárolt termékben a jótállási időn belül nyilvánvalóvá váló hibákra terjed ki. A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A jótállás nem terjed ki az alábbiakra:

- Tűz, víz, áramingadozás, baleset, kopás, a szállítás vagy a termék nem megfelelő kezelése során keletkezett mechanikai sérülés, illetve természeti csapás által okozott károk

- a rendeltetésétől és a mellékelt használati útmutatóban leírtaktól eltérő célra használt termékben keletkezett károk

- a Cseh Köztársaságban hatályos használati útmutatóval, műszaki szabványokkal vagy biztonsági előírásokkal összeegyeztethetetlen módon történő nem megfelelő átalakítás vagy használat által okozott károk

- nem eredeti fogyóeszközök használata által okozott termékhibák

- a termék poros, piszkos, agresszív környezetben történő használatából eredő termékhibák

- a jótállási jegy és az adóigazolás vagy a szállítólevél elvesztése esetén az Általános jótállási feltételek:

- a Polgári Törvénykönyv 53. § (7) bekezdése és 54. §-a szerint a fogyasztónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől az áru átadásától számított 14 napon belül, amelyet legkésőbb a készülék átvételét követő 14. napon kell az eladónak átadni, ez a jog nem szolgál az árura vonatkozó reklamáció megoldásának módjaként. Az áru, amelyre vonatkozóan élni kíván ezzel a jogával, eredeti, sértetlen csomagolásban kell lennie, nem láthatók rajta használat vagy sérülés nyomai, hiánytalan (pl. tartozékok, jótállási jegy, használati útmutató stb.).

- A jótállási és a jótállás lejárt utáni javításokat kizárólag a kereskedő importőre vagy gyártója végezheti el

- A SALIN termék jótállási javítása ingyenes

- a jelen jótállási jegy szerinti jótállás csak a vásárlóra vonatkozik, és csak a termék szokásos háztartási, irodai és hasonló célú használatára

- a jótállásból eredő bármely jogot indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jótállási időszak végéig kell gyakorolni az illetékes hivatalos márkakereskedőnél, ellenkező esetben a jótállás megszűnik

- a vevő köteles megfelelően együttműködni az igényelt hibafelelősségi jog bizonyítása során, a reklamált hiba meglétének ellenőrzéséhez és a termék jótállási javításához

- a felhatalmazott központ értékeli a reklamáció megalapozottságát, és a termék hibájának megfelelően dönt a megoldásról

- a jótállási idő a hiba kijavítására vonatkozó jognak a szerződéses szervizben történő megfelelő gyakorlásától kezdődik.

- a jelen jótállási jegyből eredő garancia csak a Cseh Köztársaságban érvényes.

Az eladó és a vevő aláírásával igazolja, hogy a készülék tesztelése megtörtént, és a használati útmutatót átadták.

ELADÓ

VEVŐ

JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁSOK

Pol.	Dátum	A hiba leírása	Helyesbítés	Aláírás