



cemio
switzerland

NASAL care

Isotonická mořská voda / Izotonická morská voda

Návod k použití zdravotnického prostředku / Návod na použitie zdravotníckej pomôcky

Pečlivě si přečtěte návod k použití, protože obsahuje důležité informace pro pacienta o použití **Cemio NASAL care**, a uschovejte si jej, abyste si jej mohli v případě potřeby znovu přečíst.

Zdravotnický prostředek **Cemio NASAL care** je isotonický roztok mořské vody, který zvlhčuje suchou nosní sliznici. Používá se jako podpůrný prostředek při rýmě, senné rýmě, ke zklidnění podrážděné nosní sliznice při stavech infekce a alergie a ke každodenní hygieně a čištění nosu.

Množství účinných látek v 1 dávce (0,1 ml):

Mořská voda z hlubin Atlantického oceánu 0,028 ml.

Další složky:

Demineralizovaná voda 0,072 ml.

Složení:

Zdravotnický prostředek ve formě spreje (tekutina obsahující nosní aplikátor), umístěný v lahvičce o objemu 30 ml (300 dávek).

Použití:

Zdravotnický prostředek **Cemio NASAL care** lze podpůrně použít:

- k prevenci a podporu léčby příznaků rýmy a senné rýmy,
- ke každodenní hygieně nosu,
- ke zvlhčování suché nosní sliznice,
- ke zklidnění podrážděné nosní sliznice při stavech infekce a alergie.

Indikace:

Tento přípravek je určen pro dospělé, děti a kojence od 1 měsíce.

Kontraindikace:

Přípravek nepoužívejte, pokud jste přecitlivělí (alergičtí) na některou ze složek přípravku. Vyhnete se kontaktu s očima. Při opětovném používání, pokud se objeví jakékoli potíže.

Každá závažná událost týkající se zdravotnického prostředku musí být nahlášena výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Návod k použití:

Před prvním použitím několikrát stiskněte dávkovač, aby se naplnil tekutinou. Po každém použití přípravku je třeba špičku trysky umýt pod tekoucí vodou a jemně osušit.

Kojenci starší 1 měsíce a děti: 1–2 dávky spreje do obou nosních dírek 2–3krát denně.

Dospělí: 1–2 dávky spreje do obou nosních dírek 2–3krát denně.

Skladování:

Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Chrňte před přímým slunečním zářením.

Vysvětlení použitých symbolů / Vysvetlenie použitých symbolov



Číslo šarže / Číslo šarže



Datum použitelnosti / Dátum použiteľnosti



Značka shody s evropskými předpisy a normami
Značka zhody s európskymi predpismi a normami



Rozpětí skladovacích teplot / Rozpätie skladovacích teplot



Chraňte před přímým slunečním zářením
Chrňte pred priamym slnečným žiarením



Výrobce / Výrobca



Čtěte návod k použití, dodaný s výrobkem
Čítajte návod na použitie, dodaný s výrobkom



Výrobce / Výrobca:
GLOBAL PHARMA CM S.A.
ul. Berezów 49A
26-130 Suchedniów
Polsko / Polsko

Distributor / Distribútor:
Cemio Switzerland, s. r. o.
Tomíčková 2144/1
148 00 Praha 4, Česko



Zdravotnický prostředek
Zdravotnícká pomôcka

Datum vypracování návodu k použití: červen 2021 / Dátum vypracovania návodu na použitie: jún 2021

