

erava

MT-320

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE 0197

Infračervený digitálny teplomer

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

Tento dokument obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia pre bezpečnú a správnu prevádzku a používanie zariadenia „zdravotnícka pomôcka – prístroj na meranie telesnej teploty“. Jeho dodržiavanie pomáha užívateľovi vyhnúť sa rizikám, zvýšiť spoľahlivosť a životnosť výrobku.

1.1. Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím zariadenia Vám odporúčame pozorne si preštudovať návod na obsluhu a zariadenie obsluhovať podľa stanovených pokynov!
- Bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže pri používaní zariadenia dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je osobná zodpovednosť a opatrnosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľmi obsluhujúcimi toto zariadenie.
- Nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení výrobcu nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté škody na zdraví alebo na zariadení!
- Pred prvým použitím zariadenia sa dôkladne presvedčte, že je zariadenie kompletne a nevykazuje viditeľné známky poškodenia. Ak je výrobok chybný alebo ak má akékoľvek viditeľné poškodenie, výrobok nepoužívajte.
- Návod na obsluhu udržiavajte podľa možnosti v blízkosti zariadenia počas celej doby jeho životnosti. Návod na obsluhu vždy uchovávajte spolu so zariadením pre jeho použitie v budúcnosti a použítie novými používateľmi.
- Zariadenie používajte výhradne na účel, na ktorý je určený, a spôsobom, ktorý je stanovený výrobcou.
- Zariadenie je určené na používanie v domácnosti a v podobných vnútorných priestoroch, bez zvláštného zamerania.
- Nejde o zariadenie na profesionálne a komerčné použitie.
- Nemeňte technické parametre a charakteristiky zariadenia neautorizovanou zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, poškodením alebo zničením zariadenia vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

1.2. Charakteristiky prevádzkového prostredia

- Nepoužívajte zariadenie v priemyselnom prostredí ani vo vonkajšom prostredí.
- Prevádzkové a skladovacie prostredie zariadenia udržiavajte vždy čisté a suché.
- Zariadenie chráňte pred znečistením a prachom. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, nadmerným zdrojom tepla, silnému mechanickému namáhaniu alebo vibráciám.
- Zariadenie nevystavujte teplotám nad 60 °C.
- Charakteristiky prevádzkového prostredia
 1. Teplota okolia: +10 ÷ +40 °C
 2. Vlhkosť: 30 ÷ 85 %

1.3. Bezpečnostné pokyny k zdroju napájania - batériám

- Zariadenie je napájané z vlastného vnútorného zdroja – z batérie.
- Zariadenie pracuje s bezpečným malým napätím.
- Batérie vždy skladujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérií deťmi ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie pred vložením utrite suchou tkaninou. Zabezpečte tak lepší elektrický kontakt.
- Pri vkladaní batérií do zariadenia vždy dôkladne skontrolujte a dodržte správnu polaritu uloženia batérií.
Batérie vložte tak, aby súhlasili symboly „+“ a „-“ na batériách a na vnútornej strane krytu.
- Nemanipulujte s batériami kovovým náradím (napr. pinzetou a pod.). Vodivý kontakt obidvoch pólov batérie môže spôsobiť skrat.
- Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, odporúča sa batérie zo zariadenia vybrať. Chránite tak zariadenie pred poškodením od vytečených batérií.
- Batérie likvidujte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem.

Výstraha!

Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte a ani nevhadzujte do ohňa.

1.4. Bezpečnosť osôb

- Zariadenie je určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie (laikmi) podľa pokynov určených výrobcom.
- Obsluha zariadenia náležia iba činnosti, ako je zapínanie a vypínanie, používateľská manipulácia, vizuálna alebo sluchová kontrola a používateľské čistenie.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom alebo vedením zodpovednej osoby, boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Čistenie zariadenia môžu vykonávať deti od 8 rokov a staršie len pod dozorom zodpovednej osoby.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Počas používania a skladovania udržiavajte zariadenie vždy mimo dosahu detí.

Pozor!

Zariadenie obsahuje drobné časti – batérie, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo prehltnutia týchto častí deťmi.

1.5. Čistenie a údržba

- Bežné používateľské čistenie a údržbu vykonávajte len odporúčeným spôsobom podľa pokynov a postupov uvedených v časti „Čistenie, dezinfekcia a údržba“.
- Zariadenie nerozoberajte.
- Zariadenie nikdy svojpomocne neopravujte. V prípade poruchy prenechajte opravu na autorizovaný servis.

2. ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Zariadenie je určené výhradne na súkromné, nekomerčné používanie – meranie telesnej teploty osôb.
Overenie presnosti merania je možné porovnaním s iným overeným meracím zariadením. Interval overenia sa odporúča raz za 2 roky.
- Zariadenie nikdy nečistite pod tečúcou vodou a ani nenamáčajte do vody ani inej tekutiny. Zariadenie očistite len navlhčenou tkaninou (vo vhodnom roztoku) a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami a charakteristikami prevádzkového prostredia!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!

3. URČENÝ ÚČEL POUŽITIA ZARIADENIA

Zariadenie je určené výhradne na súkromné, nekomerčné použitie na meranie telesnej teploty osôb v uchu alebo na čele, v rozsahu, ktorý je stanovený technickými a prevádzkovými parametrami a funkciami zariadenia, bezpečnostnými a užívateľskými pokynmi a vonkajšími vplyvmi prevádzkového prostredia.

Pozor!

Použitie zariadenia nenahradzuje odborné vyšetrenie kvalifikovaným zdravotníckym personálom.

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na použitie, pretože správne odmeranie teploty je možné len pri správnom zaobchádzaní s prístrojom. Kvôli vonkajším vplyvom inak hrozí, že namerané hodnoty nebudú správne.

Tento návod popisuje jednotlivé kroky pri meraní teploty s týmto teplomerom a obsahuje dôležité a užitočné tipy na spoľahlivé zistenie telesnej teploty. Tento návod na použitie starostlivo uschovajte.

Teplomer je určený na meranie telesnej teploty, ktorú meria pomocou infračervenej technológie. Oproti bežným teplomerom má výhodu, že meria rýchlejšie. Okrem toho už nie je nutné merať telesnú teplotu v ústnej dutine, v konečníku alebo v podpazuší. Zavedením do zvukovodu na zmeranie teploty ušného bubienka alebo priložením na čelo dokáže teplomer spoľahlivo zmerať telesnú teplotu.

Pretože je však meranie rýchlejšie než s bežnými teplomermi, a keďže ušný bubienok i čelo sú na povrchu tela, je potrebné úzkostlivo dodržiavať určité podmienky pri meraní, aby bola nameraná teplota presná.

Teplomer je výrobok vysokej kvality na meranie ľudskej telesnej teploty v uchu a na čele. Je ideálny na meranie teploty u detí (odporúča sa od 6 mesiacov), môžu ho však rovnako používať aj dospelí.

Pri správnom používaní teplomer garantuje rýchle, presné a pohodlné odmeranie telesnej teploty.

Želáme Vám všetko dobré pre Vaše zdravie!

Výhody teplomeru

Dva spôsoby merania: meranie v uchu a na čele

Teplomer meria teplotu v uchu a na čele. Podľa toho, čo individuálne preferujete, si môžete vybrať medzi týmito dvoma spôsobmi. Prístroj automaticky spozná, či ide o meranie v uchu, alebo o meranie na čele.

Vysoká presnosť merania vďaka najnovšej technike využívajúcej meracie senzory

Najnovšia generácia meracích senzorov garantuje veľmi vysokú presnosť merania teploty pri meraní v uchu a na čele.

Rýchly vďaka infračervenej technológii

Merací senzor zachytáva infračervené žiarenie vychádzajúce z bubienka, resp. z povrchu čela a v okamihu oznámi výsledok merania.

Jednoduchá obsluha

Prístroj sa obsluhuje veľmi jednoducho a bezpečne pomocou dvoch tlačidiel. Tlačidlom zapnutia/vyvolania údajov pamäte  prístroj zapnete (resp. vypnete), tlačidlom SCAN spustíte meranie. Obrázky v návode navyše vysvetľujú, ako správne merať.

Robustný a spoľahlivý vďaka vysokej kvalite spracovania

Tento prístroj bol vyvinutý podľa prísnych smerníc kvality.

So zameraním na potreby zákazníkov splňa najvyššie štandardy stability.

Všeobecné informácie o telesnej teplote

Ľudské telo reguluje telesnú teplotu na požadovanú hodnotu – v priebehu dňa kolíše až o 1 °C. Teplota v tele (teplota telesného jadra) a povrchová teplota na koži vykazujú rozdielne hodnoty. Takže vlastne neexistuje „normálna“ telesná teplota – závisí vždy od miesta merania. Telesná teplota je tiež ovplyvnená vonkajšou teplotou, vekom, stresom, dobou spánku, hormónmi a telesnou aktivitou. Kým klasický sklenený teplomer a digitálny teplomer priamo merajú teplotu ľudského tela, pri meraní v uchu a na čele sa meria teplota telesného jadra prostredníctvom infračerveného žiarenia tela. Táto sa môže i pri správne vykonanom meraní mierne líšiť od teploty nameranej v konečníku, v ústnej dutine alebo v podpazuší pomocou digitálneho teplomeru.


Počas života môže priemerná telesná teplota klesnúť až o 0,5 °C.

Prehľad meraných hodnôt (°C):

Stav	Ucho/Čelo
Nízka teplota	< 35,7
Normálna teplota	35,8 – 36,9
Zvýšená teplota	37,0 – 37,5
Ľahká horúčka	37,6 – 38,0
Mierna horúčka	38,1 – 38,5
Vysoká horúčka	38,6 – 39,4
Veľmi vysoká horúčka	39,5 – 42,0

- Teplota nameraná v uchu sa môže líšiť od teploty nameranej na čele, pretože teplotu čela ovplyvňujú vonkajšie vplyvy viac než teplotu ušného bubienka.
- To isté platí i v porovnaní s meraním telesnej teploty v konečníku, ústnej dutine alebo v podpazuší.
- Pri opakovaných meraniach idúcich po sebe sa spravidla zistia mierne odlišné výsledky, ktoré sa však pohybujú v tolerancii merania.

Popis častí

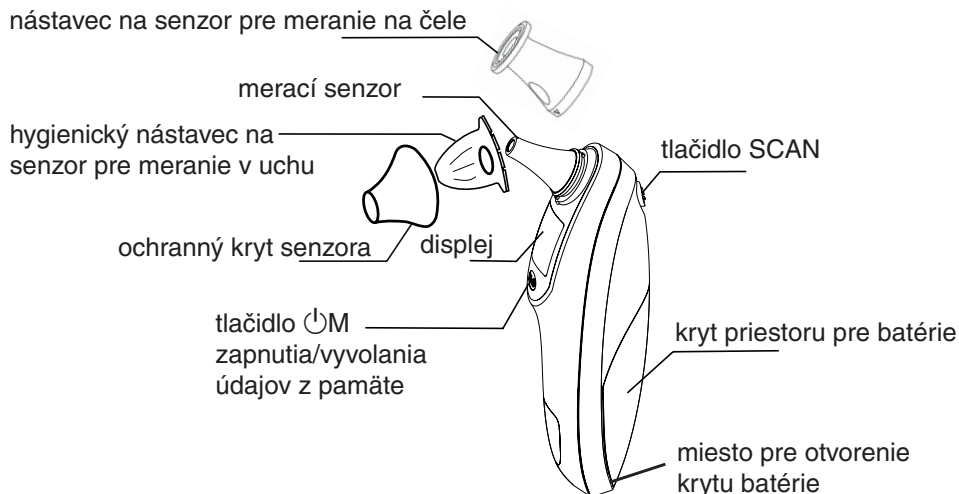


Používanie zariadenia - meranie telesnej teploty

Príprava

Teplomer meria teplotu na čele i v uchu. Obidva spôsoby merania môžete použiť na meranie vlastnej telesnej teploty (vlastné meranie), ako aj na meranie telesnej teploty druhej osoby (cudzíe meranie).

- 1 Ak v zariadení nie sú batérie, otvorte kryt priestoru pre batérie a vložte do zariadenia dve 1,5 V batérie AAA. Dodržte správnu polaritu podľa označenia + a - na batériách a v priestore pre batérie. Potom zatvorte kryt priestoru pre batérie.
- 2 Pred meraním musíte teplomer zapnúť. Stlačte tlačidlo **zapnutia/vyvolania údajov z pamäte**. Teplomer zapípa a na sekundu sa na displeji ukážu všetky symboly. Potom sa krátko zobrazí naposledy nameraná teplota. Súčasne podľa symbolu na displeji uvidíte, či išlo o meranie v uchu, alebo o meranie na čele. Následne sa teplomer pripraví na meranie.

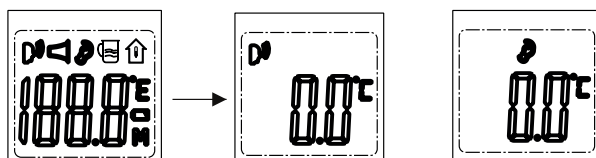

Aby ste meraním dosiahli presné výsledky, je dôležité dodržať tieto pokyny:

Dbajte, prosím, na to, aby sa teplomer a osoba, ktorej teplota sa má merať, minimálne 30 minút pred meraním nachádzali v miestnosti s izbovou teplotou.

Aby ste pri po sebe nasledujúcich meraniach dosiahli maximálnu presnosť, počkajte medzi jednotlivými meraniami 30 sekúnd.

Po spánku sa odporúča s meraním teploty niekoľko minút počkať.

Nemerajte bezprostredne po sprchovaní, plávaní atď., keď je ucho alebo čelo mokré.

Pred meraním nejedzte, nepite ani nešportujte.

Nemerajte teplotu počas dojčenia dieťaťa ani bezprostredne po ňom.

Odstráňte teplomer z miesta merania, až keď zaznie konečný zvukový signál.

V nasledujúcich situáciách odporúčame vykonať tri merania teploty a z nich najvyššiu hodnotu považovať za výsledok merania:

- pri deťoch mladších než tri roky s oslabeným imunitným systémom (hlavne keď je rozhodujúce, či dieťa má, ale nemá horúčku);
- pri používateľoch, ktorí s prístrojom ešte nie sú oboznámení, kým nebudú dosahovať konštantné namerané hodnoty;
- pri podozrivu nízkej nameranej hodnote.

Ak máte o nameranej teplote pochybnosti a teplota nezodpovedá tomu, ako sa pacient cíti, odporúčame meranie po niekoľkých minútach zopakovať. Dodržujte tiež pokyny pre čistenie. Tiež odporúčame zmerať teplotu inou nezávislou metódou, prípadne vyhľadať lekára.

Meranie v uchu

Merať môžete v pravom alebo ľavom uchu. Teplomer meria infračervené žiarenie vyžarované z bubienka a zo zvukovodu. Senzor toto žiarenie zachytáva a mení ho na teplotné hodnoty. Najvyššie hodnoty získate, ak senzor zachytí infračervené žiarenie zo stredného ucha (bubienok).

Žiarenie z okolitého tkaniva dáva nižšie namerané hodnoty.

- 1 Ak je nasadený nástavec pre meranie na čele, zložte ju jednoduchým potiahnutím.

Potom na senzor nasadíte hygienickú násadu pre meranie v uchu.

Ak nie je teplomer nastavený na meranie teploty v uchu a na displeji je zobrazený znak čela, stlačte tlačidlo zapnutia  a držte kým sa na displeji nezobrazia 3 vodorovné čiary. Po uvoľnení tlačidla dôjde k zmene znaku a na displeji sa nebude zobrazovať znak čela, ale znak ucha.



- 2 Natiahnite zvukovod (ucho) tak, že ucho v strede súčasne potiahnete dozadu a dohora.
Pri deťoch do jedného roka ťahajte ucho len dozadu.
Pri deťoch od 1 roka a dospelých potiahnite ucho dozadu nahor.



mladší než 1 rok



1 rok a starší

- 3 Opatrne vsuňte merací senzor do zvukovodu, až kým nepocítite ľahký odpor. Senzor sa musí zaviesť dostatočne hlboko, aby sa zobrazil symbol ucha.
- 4 Pre spustenie merania stlačte tlačidlo **SCAN** a uvoľnite ho.
Meranie v uchu trvá cca jednu sekundu. Keď meranie skončí, zaznie zvukový signál a zobrazí sa výsledok merania.
Niekoľko sekúnd po meraní bude teplomer pripravený na ďalšie meranie.
- 4 Po použití zložte hygienickú násadu a senzor vyčistite čistiacimi obrúskami, prípadne môžete tiež použiť vatové tyčinky.

Dôležité informácie pre meranie teploty v uchu:

- Dávajte pozor, aby bol senzor nasmerovaný priamo na ušný bubienok, nie do zvukovodu.
- Ak sa na meracom senzore nazbiera ušný maz, môže spôsobiť nepresnosť pri meraní teploty, alebo dokonca infekciu medzi rôznymi používateľmi. Preto je nevyhnutné, aby bol merací senzor pri každom meraní čistý (pozri pokyny pre čistenie). Po vyčistení meracieho senzora liehovými roztokmi počkajte cca 15 minút, aby mohol teplomer dosiahnuť potrebnú prevádzkovú teplotu.
- Hodnoty teploty môžu byť v každom uchu odlišné. Preto, prosím, merajte teplotu vždy v tom istom uchu.
- Hygienické násady môžu mierne skresľovať výsledok merania.
- Ak ste ležali na jednom uchu, môže byť teplota nameraná krátko potom v tomto uchu zvýšená.
- Merať teplotu nesmiete v uchu, v ktorom prebieha zápalové ochorenie, ani po zranení ucha (napr. poškodenie bubienka) alebo keď je vo hrození po operatívnom zákroku. Ak sa do ucha podávajú lieky, takisto sa nesmie v tomto uchu merať. V týchto prípadoch sa predtým poraďte s Vaším ošetrojúcim lekárom.

Meranie na čele

Teplomer meria infračervené žiarenie vyžarované z kože v oblasti čela a spánkov a okolitého tkaniva. Vyžarovanie zachytávajú senzory a premieňajú ho na teplotné hodnoty. Najpresnejšie hodnoty získate, ak budete snímať celú oblasť od stredu čela až po spánky.

- 1 Ak nie je nasadený nástavec pre meranie na čele, jednoduchým nasunutím na senzor ju opäť nasadíte.

Ak nie je teplomer nastavený na meranie teploty na čele a na displeji je zobrazený znak ucha, stlačte tlačidlo zapnutia  a držte kým sa na displeji nezobrazia 3 vodorovné čiary. Po uvoľnení tlačidla dôjde k zmene znaku a na displeji sa nebude zobrazovať znak ucha, ale znak čela.

- 2 Zľahka pritlačte plochu násady pre meranie na čele cca 1 cm nad stred obočia. Pri meraní sa musí nástavec priamo dotýkať kože.



- 3 Pre spustenie merania stlačte tlačidlo **SCAN** a uvoľnite ho. Na konci merania zaznie zvukový signál a zobrazí sa výsledok merania. Meranie na čele trvá niekoľko sekúnd.

Po zobrazení nameranej hodnoty a uplynutí pár sekúnd bude teplomer pripravený na ďalšie meranie.

Dôležité informácie pre meranie teploty na čele

- Odporúčame merať teplotu vždy na rovnakom mieste, inak sa zobrazované hodnoty môžu líšiť.
- Odstráňte z čela vlasy, pot, kozmetické prípravky či špinu, aby bola presnosť merania optimálna.
- Dlhší pobyt vonku (napr. na chladnom vzduchu v zime alebo na slnku v lete) a nosenie pokrývky hlavy môže mať vplyv na teplotu čela. Preto sa odporúča merať teplotu na čele najskôr po 30 minútach pobytu v miestnosti s izbovou teplotou.
- Ak chcete dosiahnuť presnejšie meranie, aby bola pri meraní teploty zachytená aj arteria temporalis (spánková tepna), je vhodné skenovať celú oblasť čela, vrátane spánkov.

Opakované meranie

Meranie zopakujete zopakovaním vyššie uvedených krokov.

Ak sa na displeji zobrazí Err (chyba) (pozri obr. E)

Okolité teplota je mimo interval 10 až 40 °C. Pred meraním musí byť teplomer v miestnosti s okolitou teplotou od 10 do 40 °C minimálne na 30 minút.

Zobrazenie pamäte nameraných výsledkov

Po dvojnásobnom stlačení tlačidla  zapnutia/vyvolania údajov bez vykonania merania sa na displeji po každom stlačení bude prepínať zobrazenie posledných 10 nameraných hodnôt, najskôr poradové číslo merania (od 10 do 01) spolu so symbolom M (pozri obr. F) a následne nameraná teplota spolu so symbolom spôsobu merania a symbolom M (pozri obr. G a H).

Zmena režimu merania

Zatlačte a pridržte tlačidlo zapnutia/vyvolania údajov, kým sa nezobrazí zobrazenie ako na obr. I.


Potom tlačidlo uvoľnite. Režim merania sa prepne z pôvodného na iný.

Vypnutie teplomera

Teplomer sa vypne automaticky po cca 1 minúte nepoužívania.


Ak ho však chcete vypnúť skôr, zatlačte a pridržte tlačidlo  zapnutia/vyvolania údajov tak dlho, kým sa nezobrazí zobrazenie ako na obr. L.

Teplomer sa následne vypne.

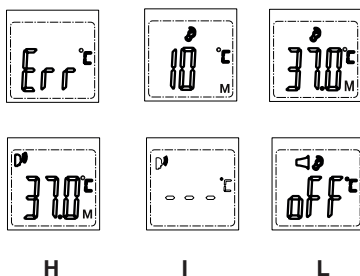

Prepínanie medzi °C a °F (ak je zariadenie touto funkciou vybavené)

Zapnite teplomer a zatlačte a pridržte tlačidlo zapnutia/vyvolania údajov, kým sa nezobrazí zobrazenie ako na obrázku. Potom tlačidlo uvoľnite a teplomer je pripravený na meranie.

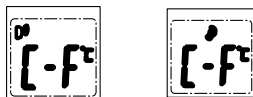

Výmena batérií

Ak začne blikať v pravom hornom rohu displeja symbol vybitej batérie , znamená to, že sú vybité batérie a treba ich vymeniť.

- 1 Zložte kryt priestoru pre batérie z teplomera tak, že zatlačíte spodnú časť krytu za výstupok dozadu.
- 2 Vyberte staré batérie a vložte dve nové 1,5 V batérie AAA.
Batérie vložte tak, aby sa kladný (+) a záporný (–) pól batérie zhodoval s príslušným označením „+“ a „–“ v priestore pre batérie.
Pri nesprávnom pólovaní teplomer nefunguje a môže dôjsť ku skratu a vytečeniu batérií!
Vždy vymeňte obidve batérie.
Vysokokvalitné batérie Vám garantujú cca 4 000 meraní. Používajte výhradne kvalitné batérie.
Pri batériách so slabším výkonom už nie je možné zaručiť počet meraní.
Nikdy nemiešajte staré a nové batérie ani batérie od rôznych výrobcov.
Vybité batérie zlikvidujte podľa platných miestnych predpisov a noriem.
Ak teplomer neplánujete dlhší čas používať, batérie by ste mali vybrať, aby ste zabránili ich vytečeniu.
- 3 Nasadzte kryt priestoru pre batérie naspäť na teplomer tak, aby spodná časť zacvakla.

Čistenie a údržba

Merací senzor je najdôležitejšou a najcitlivejšou časťou teplomera. Aby boli zaručené čo najpresnejšie výsledky merania, musí byť vždy čistý a nepoškodený. Merací senzor čistíte vhodnými čistiacimi utierkami, vlhkou handričkou a pomocou vhodného roztoku liehu (70 % izopropyl). Zvyšky ušného mazu môžete opatrne odstrániť vatovou tyčinkou. Nepoužívajte, prosím, žiadne agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, pretože tým môžete poškodiť teplomer aj displej. Zabezpečte, aby do vnútra teplomeru nevnikla žiadna kvapalina. Na ochranu pred vonkajšími vplyvmi uchovávajte teplomer v obale na to určenom.

Teplomer aj dodávané hygienické násady a násadu pre meranie na čelo skladujte v suchom, tmavom a neprašnom prostredí.

Teplomer má vodoodolný merací senzor. Po použití umyte merací senzor roztokom saponátu a vydezinfikujte. Na dezinfekciu použite roztok liehu, ajatinu, Medi Hexadecyl spray a pod.

Teplomer sa nesmie vyvárať!

Technické údaje

Typ:	MT-320
Merací rozsah:	na čele 32,0 °C až 42,9 °C v uchu 34,0 °C až 44,0 °C pod uvedený rozsah sa na displeji zobrazí indikácia "Lo" nad uvedený rozsah sa na displeji zobrazí indikácia "Hi"
Presnosť merania:	na čele $\pm 0,3$ °C (32,0 °C až 42,9 °C, pri štandardnej okolitej teplote 22 °C) v uchu $\pm 0,2$ °C (35,0 °C až 42,0 °C, pri štandardnej okolitej teplote 22 °C) $\pm 0,3$ °C (pod 35 °C a nad 42 °C, pri štandardnej okolitej teplote 22 °C)
Displej:	LCD (tekuté kryštály) displej, 3-ciferný
Batérie:	2x 1,5 V batérie, typ AAA
Príkon:	menej než 30 mW v režime merania teploty
Výdrž batérie:	cca 4 000 meraní v závislosti od kvality používaných batérií
Rozmery:	34 x 70 x 134 mm (š x h x v)
Hmotnosť:	cca 74 g bez batérií
Zvukový signál:	pri zapnutí/vypnutí teplomera, po ukončení merania a vybití batérií
Prevádzkové podmienky:	okolitá teplota: 10 °C – 40 °C relatívna vlhkosť vzduchu 30 % – 85 %
Obsah balenia :	teplomera 1 ks nástavec na senzor pre meranie v uchu 20 ks nástavec na senzor pre meranie na čele 1 ks ochranný kryt senzora 1 ks

Právo na zmeny vyhradené!

Tento výrobok najvyššej kvality spĺňa medzinárodné štandardy európskej smernice pre lekárske výrobky 93/42/EWG a bol schválený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, schvaľovací výmer č. 0124/99, kód ŠÚKLP52611.

Poznámky

Producent:

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distribútori:

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.