

B400400 - Digitální teploměr s flexibilní špičkou.

Pro měření tělesné teploty v ústech, podpaží či v konečníku.

Použití: Po celou dobu měření mějte teploměr ve stejné poloze. Před měřením si otřete pot z podpaží. Během měření se nedotýkejte spodního prádla, mohlo by to vést k nepřesným měřením. Proč jsou měření někdy nesprávná: Mobilní telefony nebo silná elektromagnetická pole mohou způsobit nepřesné údaje. Ujistěte se, že je teploměr umístěn přímo pod jazykem a držen se zavřenými ústy nebo vložen do hloubky 1,05 cm v anální dutině.

Důležité: Teploměr je určen k měření teploty lidského těla. Mohou jen obsluhovat osoby starší 11 let. Měření končí po zaznění signálního tónu. Teploměr obsahuje malé části, které by děti mohly spolknout. Nenechávejte teploměr bez dozoru, pokud s ním přijde dítě do styku. Chraňte teploměr před silnými nárazy. Vyvarujte se ohýbání měřicí hlavy o více než 45°. Vyhněte se okolní teplotě nad 60°C. K čištění používejte pouze vodu nebo dezinfekční prostředek (70% isopropylalkohol). Teploměr obsahuje chemické baterie.

Při jejich likvidaci postupujte podle pokynů pro manipulaci s chemikáliemi. Bezdrátová komunikační zařízení mohou ovlivnit naměřené hodnoty teploměru a měla by být používána alespoň 3,3 metru od takových zařízení. Tento produkt je určen jako nástroj pro měření teploty a výsledky jsou pouze pro osobní potřebu. Nejsou náhradou za výsledky odborných lékařů a lékařskou diagnózu.