

Alocclair na dětské dásně 10 ml

Úvod

Alocclair na dětské dásně, bio-adhezivní orální gel, rychle vytvoří neviditelný film, který **chrání dásně před bolestí a diskomfortem spojeným s prořezáváním prvních zubů.**

Alocclair na dětské dásně obsahuje přírodní složky, které na postižených místech napomáhají úlevě od bolesti a zarudnutí. Aplikátor je opatřen silikonovými štětinkami, které jemně masírují dásně. Přináší příjemnou úlevu od diskomfortu a symptomů spojených s prořezáváním prvních zubů. **Alocclair na dětské dásně neobsahuje lokální anestetika, léčiva, alkohol a cukr.** Alocclair na dětské dásně po aplikaci nepálí a má příjemnou banánovou chuť.

Návod k použití: Naneste na postižené místo dostatečné množství přípravku a aplikátorem jemně masírujte dásně. Aplikace přípravku po jídle nebo před spaním podpoří vytvoření filmu a prodlouží dobu úlevy od bolesti. Aplikaci opakujte dle potřeby. Po každém použití uzavřete šroubovací víčko aplikátoru. Před každým použitím odstraňte z aplikátoru zbytky přípravku, které by mohly bránit vytlačení gelu.

Kontraindikace: Použití Alocclair gelu na dětské dásně je kontraindikováno u pacientů se známou přecitlivělostí na kteroukoliv složku přípravku.

Složení

Voda, PVP, maltodextrín, propylén glykol, PEG-40 hydrogenovaný ricinový olej, Aloe barbadensis, xanthanová guma, aroma, sorban draselný, benzoát sodný, sodná sůl EDTA, hyaluronát sodný, xylitol, cetylpyridini-umchlorid, kyselina glycyrrhetinová, Šafrán setý.

Upozornění

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK, ČTĚTE PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ.

Pozor!: Přípravek by měla vždy podávat dospělá osoba. Nikdy nezanechávejte přípravek v ruce dítěte, abyste předešli riziku udušení. Před použitím zkontrolujte, zda přípravek není poškozen a v průběhu aplikace věnujte pozornost jednotlivým částem aplikátoru, zda nedošlo k jejich náhodnému uvolnění. V těchto případech přestaňte přípravek používat. Nesnažte se znovu sestavit oddělenou část. Ukončete používání přípravku, jakmile je obsah gelu vypotřebován. Nepoužívejte, pokud je tuba otevřená, poškozená nebo netěsná. Uchovávejte při pokojové teplotě, mimo přímý zdroj tepla. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.