

**HARTMANN**



**CZ**

# Přístroj pro ošetření bodnutí hmyzem



## NÁVOD K POUŽITÍ

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Úvod.....                                                              | 3  |
| Důležitá upozornění a varování .....                                   | 5  |
| Poznejte svůj přístroj.....                                            | 10 |
| Vložení baterií .....                                                  | 12 |
| Snadné kroky, jak začít .....                                          | 13 |
| Další důležité funkce .....                                            | 15 |
| Specifikace .....                                                      | 16 |
| Čištění .....                                                          | 17 |
| Likvidace.....                                                         | 18 |
| Řešení problémů .....                                                  | 19 |
| Slovník symbolů.....                                                   | 20 |
| Důležité informace ohledně elektromagnetické kompatibility (EMC) ..... | 22 |
| Záruka .....                                                           | 23 |

Děkujeme, že jste si vybrali přístroj pro ošetření bodnutí HARTMANN, který zmírňuje svědění a otoky působené bodnutím hmyzem.

Abyste mohli přístroj používat bezpečně, přečtěte si před prvním použitím pečlivě celý návod k použití.

Tento návod si pečlivě uschovejte pro budoucí potřebu.

Přístroj je zdravotnický prostředek určený k použití v prostředí domácí zdravotní péče.

Je vhodný pro všechny osoby, které jsou schopné přístroj ovládat a porozumět návodu k použití.

Skupiny pacientů: od 3 let věku a starší

Cíloví uživatelé: Laičtí uživatelé. Při používání dětmi mladšími 12 let je nutný dohled dospělé osoby.

## Princip provozu

Bodnutí či kousnutí hmyzem / svědění kůže lze zmírnit soustředěním tepla na postižené místo. Mechanismus působení při aplikaci koncentrovaného tepla (lokální hypertermie) je založen na krátkodobém, koncentrovaném působení tepla na velmi malou oblast kůže.

I lokálně omezená aplikace tepla může stačit k vyvolání zmírnění bolestivé a/nebo svědivé reakce těla.

To znamená, že jakmile je přístroj zahřátý na správnou teplotu a přiložíte jej na oblast kůže postiženou bodnutím nebo kousnutím, zmírní přenos tepla rychle svědění, bolest a otok kůže.

### Účel použití

Přístroj je určen k symptomatické léčbě svědění, bolesti a otoků způsobených bodnutími a/nebo kousnutími hmyzem.

### Standardní součásti

Balení obsahuje následující komponenty:

- 1x přístroj pro ošetření bodnutí hmyzem
- 1x Návod k použití
- 2x baterie, typ AAA (LR03 1,5 V)

Je důležité, abyste si přečetli všechny kontraindikace, varování a upozornění obsažené v tomto návodu k použití, protože jejich účelem je zajistit vaši bezpečnost, zabránit zranění osob a předejít situaci, která by mohla vést k poškození přístroje.

#### BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY POUŽÍVANÉ V TOMTO NÁVODU



##### **VAROVÁNÍ**

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému zranění a poškození přístroje, pokud by se jí nezabránilo.



##### **POZOR**

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění uživatele nebo k poškození přístroje či jiného majetku, pokud by se jí nezabránilo.

### Kontraindikace

- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte cukrovkou. Citlivost na bolest by mohla být slabší a diabetici by se mohli popálit.
- Přístroj není určen pro použití u dětí mladších 3 let.
- Přístroj nepoužívejte na zanícenou pokožku, zarudlou pokožku, podrážděnou pokožku, vyrážky, popáleniny, omrzliny, modřiny, otoky, otevřené nebo hojící se rány, nezhojené nebo čerstvé pooperační jizvy.
- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte horečkou.
- Přístroj nepoužívejte na citlivých místech pokožky.
- Přístroj nepoužívejte, pokud máte na pokožce v době bodnutí hmyzem pleťové vody, krémy a gely.
- Přístroj nepoužívejte, pokud máte sníženou citlivost vnímání bolesti (např. v případě poruch metabolismu).
- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte přetrvávajícím zánětem kůže v důsledku dlouhodobé zdravotní aplikace na stejnou oblast kůže (tj. na místo, kde došlo ke kousnutí hmyzem).

### Vedlejší účinky

V závislosti na citlivosti může teplota přístroje při ošetření způsobit určité nepříjemné pocity. Po použití může dojít k přechodnému zarudnutí pokožky.

Ve vzácných případech mohou uživatelé s citlivou pokožkou pocítit podráždění kůže.

**OBECNÁ VAROVÁNÍ**

- Pacient může být řádným uživatelem tohoto přístroje.
- Přístroj není určen k používání dětmi mladšími 12 let bez dozoru dospělé osoby.
- Přístroj není určen pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou citlivostí na teplo, např. osoby s chorobnými změnami kůže a jizvami v oblasti aplikace.
- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte tromboembolií nebo opakovaným zhoubným bujením či nevysvětlitelnou chronickou bolestí v jakékoli oblasti těla.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti očí, očních víček, úst nebo sliznic.
- Při používání přístroje dbejte na dodržování obecných hygienických pravidel.
- Pokud se i po použití přístroje příznaky kousnutí / bodnutí hmyzem zhorší nebo přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Lékařskou pomoc vyhledejte také v případě, že se jedná o kousnutí klíštětem, protože může dojít k přenosu choroboplodných zárodků (např. klíšťové encefalitidy (KE) nebo boreliózy).
- Pokud kousnutí hmyzem vyvolá příznaky, jako je zvýšené svědění a zarudnutí kůže, otok, závratě, nevolnost, dušnost, tvorba vyrážek nebo pokles či zvýšení krevního tlaku, vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě pochybností o vhodnosti použití přístroje pro ošetření bodnutí hmyzem se poraďte s praktickým zdravotnickým personálem (tj. např. se zdravotní sestrou nebo lékařem).
- Zajistěte, aby děti nepoužívaly přístroj jako hračku.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli riziku jejich udušení.

- Tento přístroj není náhradou konzultace s lékařem ani léčby u lékaře. Proto se v případě, že máte jakékoli bolesti nebo onemocnění, poraďte vždy s lékařem.
- Pokud přístroj nefunguje správně, máte nepříjemné nebo bolestivé pocity, přestaňte jej okamžitě používat.
- Neprovádějte servis a údržbu přístroje, pokud je tento přístroj v provozu.
- Neprovádějte žádné modifikace přístroje bez předchozího schválení výrobcem. To by mohlo způsobit nesprávnou funkci přístroje. Můžete pouze vyměňovat baterie a přístroj čistit, jiná údržba není povolena.
- Pokud se u vás vyskytne alergická reakce na materiály přístroje, okamžitě přerušte ošetření a poraďte se se svým praktickým lékařem.



### **ZÁLEŽITOSTI VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠENOU OPATRNOST**

- Nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama. Dbejte na to, aby do přístroje nevnikla voda. Přístroj se smí používat pouze tehdy, když je zcela suchý.
- Přístroj by vždy měla používat pouze jedna osoba. Více uživatelů není doporučeno.
- Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením a skladujte jej v suchu.
- Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silným kolísáním vlhkosti a neskladujte jej v blízkosti zdrojů tepla (kamna, trouby, radiátory).
- Zajistěte, aby se do přístroje nedostala voda. Pokud by k tomu došlo, vyjměte baterie a přístroj poté dále používejte teprve tehdy, až bude zcela suchý.

- Při skladování přístroje dbejte na to, aby na jeho vrchní část nebyly pokládány žádné těžké předměty.
- Před použitím se přesvědčte, zda není přístroj viditelně poškozený. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce nebo na příslušnou adresu zákaznického servisu.
- Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru. Pokud se něco pokazí, okamžitě přestaňte přístroj používat.

**Upozornění týkající se baterií****VAROVÁNÍ**

- Pokud se únik kapaliny z baterie dostane do kontaktu s kůží nebo očima, opláchněte důkladně zasažené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Při spolknutí hrozí nebezpečí udušení.
- Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdroje ohně, což by mohlo způsobit výbuch.
- Pokud se baterie vybijí a vytekla by, nasadte si ochranné rukavice a vyčistěte prostor pro baterii suchým hadříkem.
- Baterie neotvírejte ani nerozbíjejte.



### POZOR

- Dbejte na polaritu baterií podle znamének plus (+) a minus (-).
- Chraňte baterie před horkem.
- Baterie se nesmí nabíjet ani zkratovat.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
- Používejte pouze baterie stejného typu.
- Baterie vždy vyměňujte všechny současně.


### Zbytková rizika

Vyhřívání keramický povrch přístroje může dosáhnout maximální teploty 53 °C. Při opakovaném použití na stejnou oblast kůže v krátkém časovém úseku by mohlo dojít k popálení kůže.

**Vlastnosti**


- Pokud v létě trávíte hodně času venku, jen těžko se vyhnete kousnutí či bodnutí hmyzem a komáry.
- Přístroj pro ošetření bodnutí hmyzem od firmy HARTMANN pomáhá rychle a cíleně zmírnit svědění po bodnutí či kousnutí hmyzem a komáry, a navíc urychluje proces hojení.
- Díky praktickému a kompaktnímu designu lze přístroj vzít kamkoli s sebou – ať už na turistiku, kempování nebo cestování.
- Ošetření kousnutí od komárů a bodnutí hmyzem pomocí tohoto přístroje se provádí pouze působením tepla a bez použití jakýchkoli chemických látek. Aplikace je proto vhodná i pro celou rodinu, včetně těhotných žen.
- Jeden klíčový úkon.
- 3 různé programy.
- Rychle zmírňuje a zklidňuje svědění a otok po kousnutí či bodnutí hmyzem a komáry.
- Rychle se zahřívající, keramická topná deska.
- Urychlení procesu hojení.
- Praktický design , vhodný i na cesty.
- Uživatelsky přívětivé, jednoduché a snadné ovládání.
- Držák na šňůrku pro snadnější přenášení.

- ① Indikátor provozu a programů
- ② Funkční tlačítko (tlačítko ZAP/VYP)
- ③ Světlo pro vyhledávání
- ④ Topná deska
- ⑤ Přihrádka na baterie
- ⑥ Držák na šňůrku

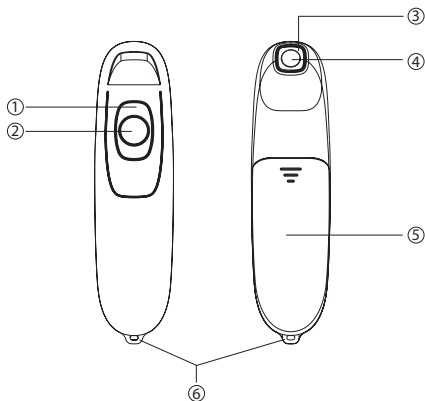

1. Sejměte kryt přihrádky na baterie na zadní straně přístroje, jak je znázorněno na obrázku vpravo.

2. Vložte 2x AAA baterie. Při vkládání baterií vždy zkontrolujte, zda kladné (+) i záporné (-) znaménko příslušné baterie odpovídá označení v přístroji. Nasadte kryt přihrádky na baterie zpět na přístroj, jak je znázorněno na obrázku vpravo.

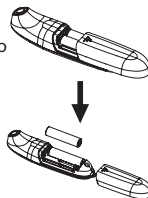**Poznámky:**

- Vyjměte vybité baterie z přístroje.

**Snadné kroky, jak začít**

- Před použitím přístroje se přesvědčte, že je místo po bodnutí hmyzem čisté, a že byly pečlivě odstraněny všechny pozůstatky po bodnutí. Zajistěte, aby byl přístroj před každým použitím a po něm vyčištěn. Nejlepších výsledků dosáhnete, když přístroj použijete bezprostředně po bodnutí nebo kousnutí hmyzem. Nicméně i v pozdější fázi po bodnutí či kousnutí hmyzem může být přístroj prospěšný pro úlevu od příznaků a lepší pocit pohody.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy do přihrádky na baterie a zda je kryt přihrádky zavřený.
- Dlouhým stisknutím tlačítka ② zapnete napájení – indikátor ① se rozsvítí zeleně, a světlo pro vyhledávání ③ se také rozsvítí.



### POZOR

Doba potřebná k zahřátí přístroje z minimální skladovací teploty (-10 °C) mezi použitím až do doby, kdy je přístroj připraven k použití, tj. vytemperován na okolní teplotu 20 °C: přibližně 2 hodiny.

Doba potřebná k ochlazení přístroje z maximální skladovací teploty (55 °C) mezi použitím do doby, kdy je přístroj připraven k použití, tj. vytemperován na okolní teplotu (20 °C): přibližně 2 hodiny.

### Vyberte příslušný program

- V případě citlivé pokožky nebo při prvním použití – zvolte program 1 (3 sekundy/48 °C) stisknutím tlačítka ② jedenkrát (1x). Indikátor ① se rozsvítí modře.
- V případě normální pokožky nebo mírných příznaků – zvolte program 2 (3 sekundy/51 °C) stisknutím tlačítka ② dvakrát (2x). Indikátor ① se rozsvítí bíle.
- V případě normální pokožky a závažnějších příznaků – zvolte program 3 (6 sekund/51 °C) stisknutím tlačítka ② třikrát (3x). Indikátor ① se rozsvítí fialově.



### POZOR

Při prvním použití přístroje byste jej měli použít s programem 1, abyste si mohli vyzkoušet svou toleranci vůči tepelnému ošetření.

- Na konci aplikace vydá přístroj akustický signál, indikátor ① se rozsvítí zeleně, a světlo pro vyhledávání ③ se také rozsvítí. Ohřev keramické desky se automaticky zastaví. Odstraňte přístroj z pokožky ihned, jakmile se ozve akustický signál.
- Pokud přístroj již nehodláte používat, stiskněte dlouze tlačítko ② a přístroj takto vypněte.

**POZOR**

Jinak můžete přístroj znovu použít na dalším místě bodnutí hmyzem. Upozorňujeme však, že nesmí být překročen maximální počet 5 aplikací za hodinu na stejném ošetřovaném místě pokožky.

- Po použití zajistěte řádné očištění přístroje.

**POZOR**

- Dodržujte vždy pokyny pro čištění uvedené v tomto návodu k použití.
- Přístroj pro ošetření bodnutí hmyzem je zařízení pro vícenásobné použití.
- V zájmu hygieny a prevence případné křížové kontaminace je nutné přístroj před každým použitím a po každém použití očistit. Podrobné informace a užitečné rady naleznete v tomto návodu k použití.
- Před uskladněním přístroje zkontrolujte, že je vypnutý, vychladlý a vyčištěný.
- Pokud jej hodláte delší dobu skladovat nepoužívaný, je lepší na dobu skladování vyjmout baterie z přihrádky na baterie.

### **Automatické vypnutí**

Pokud není po dobu delší než jedna minuta proveden žádný úkon, přístroj se automaticky vypne.

### **Hlášení při nízké úrovni nabití baterie**

Pokud je napětí baterie příliš nízké, zazní tři varovné tóny a indikátor ① se rozsvítí zeleně a bude blikat s frekvencí 1 Hz, po 3 sekundách pak dojde k automatickému vypnutí.

### **Ochrana před výkyvy teplot**

Přístroj nelze používat, pokud je teplota přístroje nižší než 5 °C nebo vyšší než 53 °C (nebo je poškozen teplotní senzor).

Když tyto situace nastanou, začne blikat kontrolka indikátoru, a to za účelem upozornění.

**Technické specifikace:**

|                                                              |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název produktu:                                              | Bite Gone                                                                                                                  |
| Model:                                                       | CH3000                                                                                                                     |
| Typ:                                                         | Pro                                                                                                                        |
| Zdroj napájení:                                              | 2x baterie, typ AAA (LR03 1,5 V)                                                                                           |
| Maximální provozní teplota:                                  | 51 °C ±2 °C                                                                                                                |
| Funkce:                                                      | 3x možnosti nastavení (program 1: 3 sekundy/48 °C, program 2: 3 sekundy/51 °C, program 3: 6 sekund/51 °C)                  |
| Provozní podmínky:                                           | Okolní teplota: +10 °C až +40 °C<br>Relativní vlhkost vzduchu: 30–75 %, nekondenzující<br>Tlak vzduchu: 700–1060 hPa       |
| Podmínky pro přepravu/skladování                             | Okolní teplota: -10 °C až +55 °C<br>Relativní vlhkost vzduchu: 10–90 %, nekondenzující<br>Tlak vzduchu: 700–1060 hPa       |
| Rozměry:                                                     | 116,2 x 30 x 26,1 mm +/-0,5 mm                                                                                             |
| Hmotnost:                                                    | přibližně 50 g (s bateriemi)                                                                                               |
| IP klasifikace. Ochrana proti vniknutí vody či pevných těles | IP 22 (ochrana proti pevným předmětům o průměru Ø 12,5 mm a proti svisle padajícím kapkám vody při náklonu pouzdra do 15°) |
| Aplikační část:                                              | Topná deska                                                                                                                |
| Ochrana proti zásahu elektrickým proudem:                    | Interně napájené zdravotnické elektrické přístroje (ME). Aplikační část: typ BF                                            |
| Doba použitelnosti (životnost):                              | 3 let                                                                                                                      |
| Kapacita baterií:                                            | Nové baterie vydrží přibližně 300 aplikací (program 3 sekundy)                                                             |
| Odkaz na normy:                                              | EN 60601-1/ EN 60601-1-2                                                                                                   |

## Čištění přístroje

- Dodržujte vždy hygienické předpisy.
- Doporučujeme, aby byl přístroj před každým použitím a po každém použití vyčištěn.
- Před čištěním přístroj vždy vypněte a vyjměte z něj baterie.
- Během čištění musí být teplota přístroje vytemperována na teplotu místnosti.
- K otření topné desky a pouzdra přístroje použijte měkkou utěrku (doporučujeme použít malé množství alkoholu nebo jiného vhodného zdravotnického čisticího prostředku).
- Dbejte na to, aby se dovnitř přístroje nedostal čisticí prostředek, mohlo by dojít k nevratnému poškození přístroje.
- Přístroj neponořujte do čisticího prostředku, mohlo by dojít k nevratnému poškození přístroje.
- Nepoužívejte žádné chemikálie (jako je např. benzen, ředidla).
- Nečistěte přístroj v pračce, myčce ani v jiných čisticích zařízeních.
- K čištění přístroje nepoužívejte tvrdé kartáče, které by mohly způsobit poškrábání povrchu přístroje.
- Pokud se přístroj používá na různých částech pokožky, očistěte jej alkoholem nebo jiným zdravotnickým čisticím prostředkem, abyste zabránili šíření bakterií z jedné části pokožky na druhou.

**Likvidace**

Produkt odpovídá evropské směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a je odpovídajícím způsobem označen. Elektronická zařízení nikdy nelikvidujte s domácím odpadem. Ohledně správné likvidace se informujte o místních předpisech. Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí a lidské zdraví.



Baterie splňují podmínky Evropské směrnice 2013/56/EU. Z důvodu ochrany našeho životního prostředí se prázdné baterie nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Dodržujte příslušné předpisy týkající se likvidace odpadu nebo použijte veřejná sběrná místa, recyklační střediska nebo elektronické maloobchodní služby.



Pb, Hg, Cd

| PROBLÉM                                                                  | MOŽNÉ PŘÍČINY                                           | NÁVRH ŘEŠENÍ                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Přístroj nelze zapnout.                                                  | Baterie chybí, jsou nesprávně vloženy nebo jsou vybité. | Zkontrolujte baterie. V případě potřeby je vyměňte za dvě identické baterie. |
| Přístroj se dostatečně nezahřívá.                                        | Napětí baterií je příliš nízké.                         | Vyměňte baterie.                                                             |
| Indikátor ① se rozsvítí zeleně a třikrát blikne, poté se přístroj vypne. | Napětí baterií je příliš nízké.                         | Vyměňte baterie.                                                             |
| Přestože byly baterie vyměněny, nelze přístroj stále zapnout.            | Interní technická závada.                               | Obraťte se prosím na zákaznický servis.                                      |



Postupujte podle návodu k použití



Symbol pro označení elektrického a elektronického zařízení



Pozor



Ochrana proti zásahu elektrickým proudem (typ BF)

**IP22**

Třída ochrany



Výrobní číslo



Výrobce



Datum výroby



Dovozce



Distributor



Omezení teploty



Omezení vlhkosti



Omezení tlaku vzduchu



Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství (ES)



Zdravotnický prostředek



Jedinečný identifikátor prostředku



Kód dávky



Katalogové číslo



Baterie jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2023/1542



Evropské označení shody



Obal zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí

### **Důležité informace ohledně elektromagnetické kompatibility**

- Tento přístroj nesmí být používán v blízkosti jiných zařízení nebo stohován s jinými zařízeními, a pokud je použití v blízkosti nebo stohování nezbytné, měl by být tento přístroj sledován, aby se ověřil jeho normální provoz v té konfiguraci, ve které bude používán.
- Použití jiného příslušenství, odnímatelných částí a materiálů, než které jsou specifikovány nebo poskytnuty výrobcem tohoto přístroje, může mít za následek zvýšené elektromagnetické emise nebo sníženou elektromagnetickou odolnost tohoto zařízení a nesprávnou funkci přístroje.
- Přenosná RF komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako jsou anténní kabely a externí antény) se nesmí používat ve vzdálenosti menší než 30 cm od jakékoli části tohoto přístroje, a to včetně kabelů specifikovaných výrobcem. Jinak by mohlo dojít ke zhoršení výkonu tohoto přístroje.
- Pokud má provozní prostředí nízkou relativní vlhkost, dochází obvykle k silnému elektromagnetickému rušení. V tomto okamžiku může být přístroj dotčen následujícím způsobem:
  - přístroj zastaví jakýkoli výstup;
  - přístroj se vypne;
  - přístroj se restartuje.

Výše uvedený jev nemá vliv na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístroje a uživatel může přístroj používat v souladu s návodem k použití. Pokud se chcete výše uvedenému jevu vyhnout, používejte přístroj v souladu s vhodným prostředím uvedeným v tomto návodu k použití.

Přístroj je klasifikován jako zařízení skupiny 1, třídy B podle CISPR 11.

- Přístroj je vhodný pro použití při domácí zdravotní péči. Přístroj splňuje požadavky na odolnost pro domácí zdravotní péči. Přístroj byl testován v souladu s normou EN 60601-1-2 akreditovanou laboratoří a byl shledán vyhovujícím z hlediska jednotlivých norem nebo zkoušek emisí a odolnosti.

## Záruka

**V případě reklamace v rámci záruky nás prosím kontaktujte. Pokud musíte přístroj odeslat, přiložte kopii účtenky a jasně uveďte, o jakou závadu se jedná.**

**Platí následující záruční podmínky:**

1. Záruční lhůta tohoto přístroje je tři roky od data zakoupení (přístroj neobsahuje příslušenství). V případě reklamace v rámci záruky je nutné doložit datum nákupu prodejním dokladem/účtenkou nebo fakturou.
2. Opravy v rámci záruky neprodłużují záruční lhůtu tohoto přístroje ani náhradních dílů.
3. Ze záruky je vyloučeno následující:
  - Veškerá poškození způsobená nesprávným zacházením, např. nedodržením návodu k použití.
  - Veškeré škody způsobené opravami nebo zásahy ze strany zákazníka nebo neoprávněných třetích stran.
  - Poškození během přepravy od výrobce ke spotřebiteli nebo během přepravy do servisního střediska.
  - Příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení.
4. Odpovědnost za přímé nebo nepřímé následné vady a škody způsobené přístrojem je vyloučena, i když je poškození přístroje uznáno jako reklamace v rámci záruky.

V případě potřeby nás kontaktujte na příslušné adrese uvedené na konci tohoto návodu k použití, a sice v případě jakýchkoli dotazů týkajících se prvního uvedení do provozu, používání a údržby přístroje nebo v případě, že chcete nahlásit neočekávanou provozní poruchu nebo závadu.

Pro pacienty/uživatelé/třetí strany v Evropské unii a v zemích se stejným zákonným regulačním rámcem (nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích) platí, že pokud dojde při používání tohoto prostředku nebo v důsledku jeho používání k závažné události, je nutno ji nahlásit výrobci a/nebo jeho zplnomocněnému zástupci a příslušným vnitrostátním orgánům.

Datum poslední revize textu: 2024-01-26, verze 1

---

**CZ – Zákaznický servis**

HARTMANN-RICO a.s.

Masarykovo nám. 77

664 71 Veverská Bítýška

bezplatná telefonní linka: 800 100 150

---



Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.  
Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng  
Industrial Estate Xilixiaobaimang 518108  
Nanshan District, Shenzhen, P. R. China



**Importer Germany**

Medineo GmbH

Neumühle 2

97727 Fuchsstadt, Germany



Shanghai International  
Holding Corp. GmbH (Europa)  
Eiffestraße 80  
20537 Hamburg, Germany



All Rights Reserved.Rev.V.1.1 © 2023