

Přibalový leták a návod k použití pro barevné kontaktní čočky Maxvue Vision

S cílem pomoci udržet vaše oči a čočky v dobré kondici doporučujeme přečíst si následující užitečné rady.



Název výrobku:

ColourVUE Crazy, ColourVUE Glow, ColourVUE 3 Tones, ColourVUE Fusion, ColourVUE Big Eyes, ColourVUE Glamour, ColourVUE Stars & Jewel, ColourVUE Eyclush, ColourVUE Elegance

Material a balení:

ColourVUE Crazy, ColourVUE Glow - složení: 55% Terpolymer a 45% vody. Čočky jsou baleny v jednotlivých lahvičkách ve sterilním pufrovacím fyziologickém roztoku a jsou tepelně sterilizovány. Balení obsahuje 1 nebo 2 lahvičky.

ColourVUE 3 Tones, ColourVUE Fusion, ColourVUE Big Eyes, ColourVUE Glamour, ColourVUE Stars & Jewel, ColourVUE Eyclush, ColourVUE Elegance - složení: 55% Terpolymer a 45% vody. Čočky jsou baleny v jednotlivých blístrech ve sterilním pufrovacím fyziologickém roztoku a jsou tepelně sterilizovány. Prodejní balení obsahuje 2 čočky.

Indikace

ColourVUE Crazy, ColourVUE Glow, ColourVUE 3 Tones, ColourVUE Fusion, ColourVUE Big Eyes, ColourVUE Glamour, ColourVUE Stars & Jewel, ColourVUE Eyclush, ColourVUE Elegance jsou určeny pro kosmetické použití, ColourVUE Crazy, ColourVUE 3 Tones a ColourVUE Eyclush se vyrábějí i s optickou korekcí.

Kontraindikace

Čočky se nesmí používat v případě alergie či precitlivělosti na čočky či prostředky péče, očních chorob, úrazů, zánětů, lokálně používaných léků, akutně probíhajících onemocnění oka, precitlivělosti oka na dopyk, alergických onemocnění, předních uveitid, všech infekcí předního segmentu, syndromu suchého oka. V případě glaukomu, změn slzičného filmu, kožních onemocnění v okolí oka, diabetes mellitus, nevhodného pracovního prostředí, jiné nebo konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Nošení kontaktních čoček je kontraindikováno i tam, kde je zkušenost z minulosti, že pacient nedodrží systém péče o kontaktní čočky, doporučenou dobu a způsob nošení a omezení týkající se nošení čoček nebo jestliže se nedostavuje na pravidelné kontroly. Omezením je i pacientova neschopnost či neochota způsobená věkem, slabostí nebo jiným mentálním či tělesným postižením nebo nepřiznivými pracovními a životními podmínkami, které brání v pochopení a dodržování veškerých varování, upozornění, omezení nebo instrukcí.

Doporučený režim nošení a výměny

V zájmu zachování zdraví a bezpečí očí by režim nošení měl určit lékař či optometrista.

- ColourVUE Crazy (nedioptrické) a ColourVUE Glow jsou určeny pro denní nošení. Čočky je nutné vyjmout z očí před usnutím (nejsou určeny k ponechání na oku po dobu spánku). Před opětovným nasazením je nutné čočky očistit a dezinfikovat. Tyto kontaktní čočky je nutné po 360 dnech od otevření blístru vyhodit.
- ColourVUE Crazy (dioptrické), ColourVUE 3 Tones, ColourVUE Fusion, ColourVUE Big Eyes, ColourVUE Glamour, ColourVUE Stars & Jewel, ColourVUE Eyclush, ColourVUE Elegance jsou určeny pro denní nošení. Čočky je nutné vyjmout z očí před usnutím (nejsou určeny k ponechání na oku po dobu spánku). Před opětovným nasazením je nutné čočky očistit a dezinfikovat. Tyto kontaktní čočky je nutné po 90 dnech od otevření blístru vyhodit.

Správné postupy při nošení kontaktních čoček

Prvním a nejdůležitějším předpokladem správné péče o kontaktní čočky je čistota. Vyroste si správný rutinní hygienický postup pro manipulaci s kontaktními čočkami.

Před manipulací s čočkami si důkladně umyjte ruce mýdlem – antibakteriální dávkovače na tekutá neparfémovaná mýdla jsou vhodnější než mýdla, která mohou být snadněji kontaminována.

Důkladně opláchněte veškeré mýdlo, aby se zabránilo kontaminaci a pak osušte ruce měkkou utěrkou, která nepouští vlákna

Používejte oční make-up, který neobsahuje oleje nebo vůně.

Používejte vodoodolnou řasenku a oční linky, aby se zabránilo odlupování a rozmazávání.

Ujistěte se, že je čočka vždy ponořena celá do roztoku. Nikdy nepoužívejte čočky, které nebyly zcela ponořeny v roztoku.

Vždy provádějte čištění a dezinfekci čoček před novým vložením do oka.

Vždy provádějte čištění, oplachování a dezinfekci čoček po vyjmutí z oka.

Nahradte vždy čočky, pokud jsou poškozené, poškrábané nebo v případě, že jsou na nich usazeniny, které nemohou být odstraněny.

Kontaktní svého očního specialistu, pokud máte nějaké potíže - zarudnutí, bolesti, otok nebo podráždění, pálení, nadměrné slzení, opakované rozmazané vidění, barevné kruhy kolem světlých zdrojů anebo citlivost na světlo.

Dodržujte pravidelné prohlídky u svého očního lékaře, minimálně jednou za 6 měsíců.

Nepoužívejte vodu z vodovodu nebo sliny na zvlhčení čoček nebo pouzder na čočky.

Nepoužívejte oční make-up nebo nenoste čočky, pokud jsou vaše oči oteklé, červené nebo infikované. Neprodleně vyhledejte pomoc při bolestivém zčervnutí očí.

Vyvarujte se kontaktu čoček s přípravky na holení, mýdly, krémy, deodoranty, se spreji na vlasy nebo jinými kosmetickými spreji. Můžete způsobit oční infekci nebo podráždění.

Nevysťavujte kontaktní čočky nadměrným teplem.

Nepoužívejte opakované dezinfekční roztok – vždy použijte roztok zlikvidujte a nahradte čerstvým roztokem.

Poradte se svým očním specialistou o nošení čoček při sportovních aktivitách včetně plavání a dalších vodních sportů. Vždy dodržujte doporučený režim nošení.

Péče o pouzdro

Pouzdro na kontaktní čočky musí být stejně čisté jako čočky, které jsou v něm uloženy. Přečtěte si prosím základy, ale důležité rady ohledně péče o pouzdra.

Pro nasazení čočky do oka vylijte použijte roztok z pouzdra.

Pravidelně vyplachujte pouzdro čerstvým dezinfekčním roztokem a nechejte vyschnout na vzduchu (mikroby se nemohou množit v suchých podmínkách).

Dodržujte pravidelnou obměnu pouzdra – ideální je měsíční výměna.

Ujistěte se, že je před nasazením do oka čočka správně připravena



Před vložením čočky do oka se ujistěte, že není čočka obráceně. Z profilu se podívejte na kontaktní čočku, není-li „naruby“. Některé čočky mají svůj povrch opatřený indikátorem, který musí být ve správné pozici při pohledu z profilu na čočku čitelný zleva doprava. Pokud Vaše čočky nemají indikátor, při pohledu z boku nesmějí mít na svých okrajích ostré „zobáčky“. Okraje čočky musí směřovat vzhůru. Pokud si nejste jisti, podívejte se na čočku z profilu a pak ji obraťte naruby a posuďte, kdy byl sklon jejího okraje strmější – tak byla čočka v pořádku.

Nebojte se, pokud se vám podaří vložit kontaktní čočku do oka „naruby“, nemůže způsobit žádné komplikace. Jednoduše vyjměte čočku z oka a vložte ji správným způsobem.

Manipulace s čočkou

Před nasazením vždy zkontrolujte, jestli je čočka čistá a neporušená. Pokud je poškozená, použijte novou. Při nasazování čoček si vždyknehtë začínat vždy stejnou čočkou, například čočkou určenou pro pravé oko, abyste přešli záměně.

1. Zadržte blízkost, aby se čočka uvolnila do rozstupu (odlepila od stěny).
2. Odtrhněte křeví řolí. Manipulujte s čočkou opatně, dotýkejte se jí pouze konečky prstů. Nedotýkejte se kontaktní čočky nehy, tak může snadno dojít k jejímu poškození. Je vhodné udržovat nehy krátké a hladké.
3. Opatně vyjměte čočku jejím posunutím ke krají vaničky. K vyjmutí čočky nepoužívejte pinzetu ani žádnou jinou pomůcku, vyjma pinzety či pomůček, které vám k tomu účtu doporučí vaše oční specialista.

Nasazování čočky na oko

1. Pannaňte na to, že při nasazování byste měli vždy stejným okem (například pravým). Poté, co čočku zkontrolujete a zjistíte, že je ve správné poloze, položte ji na špičku ukazováku.
 2. Prostředník těžce ruky položte těsně pod spodní řasy a odtráhněte spodní víčko.
 3. Ukazovákem nebo prostředníkem druhé ruky zvedněte horní víčko. Přiložte čočku na oko.
 4. Jeně uvolněte víčka a zamkněte.
 5. Stejným postupem nasadte čočku na druhé oko.
- Existují ještě další postupy nasazování čoček. Pokud vám uvedená metoda nevyhovuje, poraďte se se svým očním lékařem nebo optometristou.

Pokyny k vyjmutí čočky

Pokazně snižte jako první čočku ze stejného oka (např. pravého), abyste přešli záměně. Před vyjmutím čoček si důkladně umyjte, opláchněte a osušte ruce. Postupujte podle výše popsaných hygienických pravidel.

Vyjmutí čočky smáčkutím

1. Při pohledu nahoru posuňte ukazovákem čočku na bělmo ve spodní části oka.
 2. Jeně smáčkutím čočku palcem a ukazovákem a vyjměte ji.
- Existují ještě další postupy vyjmutí čoček. Pokud vám uvedená metoda nevyhovuje, poraďte se se svým očním lékařem, optometristou.

Možné potíže a problémy

Při používání čoček by vaše oči měly vypadat dobře, vy byste se měli cítit příjemně a zraková ostrost by měla být neporušená. Nošení však může být provázáno i problémy. Kontrolujte každý den, zdaí nastala některá z následujících situací:

- Pociť cizího předmětu v oku.
- Nepříjemné pociťy při nošení.
- Zarudnutí oka.
- Světlolachost.
- Pálení, píchání, svědění nebo slzení očí.
- Zhoršená zraková ostrost.
- Duha nebo rozmazaný okraj kolem světla.
- Zvýšení tvorby očního sekrecí.
- Zvýšená nebo přerývající suchost v očích.

Pokud budete tyto příznaky přehlížet, může to vést k mnohem závažnějším komplikacím.

Co dělat v případě, když se objeví problémy

Pokud se jakýkoliv z výše uvedených příznaků objeví, měli byste okamžitě čočky vyjmout z očí. Pokud poté po sejmání čoček odezení, pečlivě čočky zkontrolujte. Jestliže jsou čočky poškozené nebo znečištěné použijte nové. Pakliže problémy přetrvávají, vyhledejte svého očního lékaře. Občasny pociť sucha lze zmírnit použitím lubrikačních a zvlhčujících očních kapek.

Upozornění:

- Před manipulací s čočkami si vždy umyjte, opláchněte a osušte ruce.
- Vždy používejte čerstvé roztoky před datem expirace.
- Tepelná dezinfekce může vaše čočky poškodit.
- NIKDY neuchovávejte čočky pouze ve fyziologickém roztoku.
- Fyziologický roztok neochrání čočky před kontaminací a může způsobit zanesení infekce do oka.
- NIKDY nepoužívejte roztoky určené pouze pro tvrdé čočky.

SYMBOL	DEFINICE	SYMBOL	DEFINICE
	Viz informace na příslušném letku		Certifikát kvality EU
	Použít do: (je uvedeno datum expirace)		UV ltr
	Číslo výrobní šarže		Zaplateny poplatky za zpracování odpadu
	Sterilizováno parou nebo suchým teplem		Zde odtráhněte fólii
DIA	Příměr		
BC	Radius (zakřivení zakřiví plochy)		
D	Optická mohutnost v dioptriích		
CT	Středová tloušťka	Omezení prodeje a objednávání na speciality (značka platná pro USA)	

Poslední revize textu: 9.9.2014

Výrobce: MaxVUE Vision Sdn Bhd, 614-1 Jalan Hartan 4/8, Oakland Commercial Centre, 70300 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia

Prodejce: ALENESA, s.r.o., Štružky 1326/6, 198 00 Praha 9, IČ: 27179618

Zpřístupněn zastupce v EU: MYM STC, S.L., Avda de los Rosales 32, 28935 Mostoles Madrid, SPAIN