

**SCHOLL WART & VERRUCA COMPLETE FREEZE REMOVER KIT**  
**SCHOLL SPREJ NA ODSTRANĚNÍ BRADAVIC 80ML**  
**PRŮVODNÍ LETÁK K PRODUKTU**



**ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ INFORMACE**



*Před použitím si musíte pečlivě přečíst návod k použití uvnitř balení.*

O nás: V Schollu pečujeme o chodidla již více než 100 let, takže rozumíme jim a vašim starostem s nimi. Proto jsme rozhodnutí vytvářet jedinečná řešení v péči o chodidla, abychom vám umožnili užívat si zdravá chodidla plná vitality. K čemu slouží tento produkt? Tento produkt je určen k ošetření „vulgárních a plantárních“ bradavic. (běžných bradavic a bradavic na chodidlech)

**KLINICKY TESTOVÁNO A SCHVÁLENO. ZAČÍNÁ PŮSOBIT ZA 40 VTEŘIN.**

**PŘESNÉ, CÍLENÉ PŮSOBENÍ.**

**Snadné použití – 5 jednoduchých kroků.**

**Varování:** Před použitím si musíte pečlivě přečíst návod k použití. Mějte k dispozici časovač k přesnému určení doby působení, jelikož doba aplikace je klíčová k zajištění bezpečného a efektivního ošetření.

1. Zvolte si nejvhodnější aplikátor (na základě velikosti bradavice) a umístěte ho do bílého plastového uzávěru tak, aby zobrazeným způsobem zapadl do většího otvoru, nacházejícím se na jeho konci.

2. Postavte nádobku ve svislé poloze na stůl nebo jiný pevný povrch. Nedržte nádobku v blízkosti obličeje, těla nebo oblečení. Umístěte uzávěr na nádobku způsobem znázorněným na obrázku tak, aby byla vatová tyčinka v průhledném plastovém ochranném krytu, nacházejícím se na boční straně nádobky. Produkt používejte v dobře větraném prostoru, držte se dále od tepla a jiných zdrojů vznícení

3. Držte nádobku ve svislé poloze dle uvedeného zobrazení, pevně zmáčkněte uzávěr po dobu 5 vteřin. Plastový ochranný obal nedržte.

4. Odstraňte uzávěr z nádobky takovým způsobem, aby v něm aplikátor nadále zůstal připojený. Dbejte na to, aby se tekutina nedostala do kontaktu s pokožkou a nedržte nádobku blízko očí. **MUSÍTE** vyčkat, 15 vteřin, přitom držte konec aplikátoru směrem dolů, než ho přiložíte na (plantární) bradavici. Tímto způsobem se tekutina nahromadí na konci aplikátoru a dosáhne mrazící teploty nutné k účinnému ošetření.

5. Dbejte na to, aby ošetřovaná (plantární) bradavice směřovala nahoru. Uchopte aplikátor ve svislé poloze a přiložte jeho konec jemně na střed (plantární) bradavice na 40 vteřin, avšak nepřevyšujte dobu aplikace 40 vteřin.

### **Upozornění:**

- Po prvním použití aplikátor vyhodte.
- Používejte v souladu s návodem k použití.
- Při aplikaci produktu používejte vždy aplikátor.
- Nesprávné použití může vést k popáleninám, zjizvení zdravé tkáně nebo ke slepotě.
- Zamezte styku s očima.

Pouze pro vnější použití.

V případě podráždění přestaňte používat.

### **Typy bradavic:**

**OBYČEJNÁ BRADAVICE:** Obyčejné bradavice se vyznačují vystouplým “květákovitým” vzhledem a zpravidla se vyskytují na prstech, hřbetech rukou a kolenech. Mají barvu kůže, jsou tvrdé a hrubé.

**PLANTÁRNÍ BRADAVICE:** Plantární bradavice (jiným názvem verruca plantaris) jsou plošší, s tvrdým vnějším okrajem. Uprostřed často bývají drobné černé tečky. Vyskytují se na klenbě nohy, bříškách prstů či na patě.

## **Jak funguje Scholl sprej na odstranění bradavic technikou zmrazení?**

Účinné, snadno aplikovatelné ošetření na bázi rychlého zmrazení bradavic.

Po aplikaci se vytvoří puchýř. 10 až 14 dní po aplikaci bradavice odpadne a na jejím místě doroste zdravá pokožka.

- Neošetřujte stejnou bradavici více než čtyřikrát.
- Efektivně odstraňuje bradavice již po jedné aplikaci

**Scholl a diabetes: Pokud trpíte diabetem nebo problémy s krevním oběhem, můžete být vystaveni riziku komplikací. Tento výrobek NENÍ VHODNÉ používat, pokud trpíte diabetem nebo slabým krevním oběhem.**

Pokud si nejste jistí, že se jedná o (plantární) bradavici, poraďte se před použitím se svým lékařem nebo podiatrem.

**Nebezpečí.** Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F.

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Používejte pouze v dobře větraných prostorech. Nevdechujte sprej.

**Varování:** Úmyslné zneužití výrobku koncentrováním a vdechováním obsahu může být škodlivé nebo fatální.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte u dětí do 4 let. Nepoužívejte během těhotenství nebo kojení.

Složení: Dimethyl Ether, Propane, Isobutane. Hnací plyn: Hydrocarbon.

**Nepoužívejte po datu spotřeby uvedeném na spodní straně nádoby a obalu.**

**Scholl a logo Scholl jsou ochranné známky skupiny Scholl Wellness Company.**

# SCHOLL WART & VERRUCA COMPLETE FREEZE REMOVER KIT SCHOLL SPREJ NA ODSTRÁNENIE BRADAVÍC 80 ML BROŽÚRA O PRODUKTE



## ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRODUKTE



**O nás:** V Scholle sa staráme o chodidlá už viac ako 100 rokov, takže rozumieme im a vašim starostiam s nimi. Preto sme odhodlaní vytvárať jedinečné riešenia v starostlivosti o chodidlá, aby sme vám umožnili užívať si zdravé chodidlá plné vitality. Na čo slúži tento produkt? Tento produkt je určený na ošetrovanie „vulgárnych a plantárnych“ bradavíc. (bežných bradavíc a bradavíc na chodidlách)

### KLINICKY TESTOVANÉ A SCHVÁLENÉ. ZAČÍNA PÔSOBIŤ ZA 40 SEKÚND.

#### **PRESNÉ, CIELENÉ PÔSOBNIE.**

Jednoduché použitie - 5 jednoduchých krokov.

**Varovanie:** Pred použitím si musíte starostlivo prečítať návod na použitie. Majte k dispozícii časovač na presné určenie doby pôsobenia, pretože doba aplikácie je kľúčová na zaistenie bezpečného a efektívneho ošetrovania.

1. Zvoľte si najvhodnejší aplikátor (na základe veľkosti bradavice) a umiestnite ho do bieleho plastového uzáveru tak, aby zobrazeným spôsobom zapadol do väčšieho otvoru, nachádzajúceho sa na jeho konci.

2. Postavte nádobku vo zvislej polohe na stôl alebo iný pevný povrch. Nedržte nádobku v blízkosti tváre, tela alebo oblečenia. Umiestnite uzáver na nádobku spôsobom znázorneným na obrázku tak, aby bola vatová tyčinka v priehľadnom plastovom ochrannom kryte, nachádzajúcom sa na bočnej strane nádoby. Produkt používajte v dobre vetranom priestore, držte sa ďalej od tepla a iných zdrojov vznietenia

3. Držte nádobku vo zvislej polohe podľa uvedeného zobrazenia, pevne stlačte uzáver po dobu 5 sekúnd. Plastový ochranný obal nedržte.

4. Odstráňte uzáver z nádoby takým spôsobom, aby v ňom aplikátor naďalej zostal pripojený. Dbajte na to, aby sa tekutina nedostala do kontaktu s pokožkou a nedržte nádobku blízko očí. **MUSÍTE** počkať, 15 sekúnd, pritom držte koniec aplikátora smerom dole, než ho priložíte na (plantárnu) bradavicu. Týmto spôsobom sa tekutina nahromadí na konci aplikátora a dosiahne mraziacu teplotu nutnú na účinné ošetrovanie.

5. Dbajte na to, aby ošetrovaná (plantárna) bradavica smerovala nahor. Uchopte aplikátor vo zvislej polohe a priložte jeho koniec jemne na stred (plantárne) bradavice na 40 sekúnd, avšak neprevyšujte dobu aplikácie 40 sekúnd.

### **Upozornenie:**

- Po prvom použití aplikátor vyhodíte.
- Používajte v súlade s návodom na použitie.
- Pri aplikácii produktu používajte vždy aplikátor.
- Nesprávne použitie môže viesť k popáleninám, zjazveniu zdravého tkaniva alebo k slepote.
- Zabráňte kontaktu s očami.

Len na vonkajšie použitie.

V prípade podráždenia prestaňte používať.

Typy bradavíc:

**OBYČAJNÁ BRADAVICA:** Obyčajné bradavice sa vyznačujú vystúpeným „karfiólovým“ vzhľadom a spravidla sa vyskytujú na prstoch, chrbtoch rúk a kolenách. Majú farbu kože, sú tvrdé a hrubé.

**PLANTÁRNA BRADAVICA:** Plantárne bradavice (iným názvom verruca plantaris) sú plochejšie, s tvrdým vonkajším okrajom. Uprostred často bývajú drobné čierne bodky. Vyskytujú sa na klenbe nohy, bruškách prstov alebo na päte.

Ako funguje Scholl sprej na odstránenie bradavíc technikou zmrazenia?

Účinné, ľahko aplikovateľné ošetrovanie na báze rýchleho zmrazenia bradavíc.

Po aplikácii sa vytvorí pľuzgier. 10 až 14 dní po aplikácii bradavice odpadne a na jej mieste dorastie zdravá pokožka.

- Neošetrujte rovnakú bradavicu viac ako štyrikrát.
- Efektívne odstraňuje bradavice už po jednej aplikácii

Scholl a diabetes: Ak trpíte diabetom alebo problémy s krvným obehom, môžete byť vystavení riziku komplikácií. Tento výrobok NIE JE VHODNÉ používať, ak trpíte diabetom alebo slabým krvným obehom.

Ak si nie ste istí, že sa jedná o (plantárnu) bradavicu, poraďte sa pred použitím so svojím lekárom alebo podiatrom.

Nebezpečenstvo. Extrémne horľavý aerosól. Nádobu je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teploty presahujúcej 50 °C / 122 °F.

Neprepichujte alebo nespáľujte ani po použití. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Nevdychujte sprej.

Varovanie: Úmyselné zneužitie výrobku koncentrovaním a vdychovaním obsahu môže byť škodlivé alebo fatálne.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte u detí do 4 rokov. Nepoužívajte počas tehotenstva alebo dojčenia.

Zloženie: Dimetyl Ether, Propane, Isobutane. Hnací plyn: Hydrocarbon.

Nepoužívajte po dátume spotreby uvedenom na spodnej strane nádoby a obalu.

Scholl a logo Scholl sú ochranné známky skupiny Scholl Wellness Company.