



HU **Mellszívó**
Használati útmutató



 Olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használat céljával, tegye hozzáférhetővé a többi felhasználó részére, és tartsa be a benne levő utasításokat.

Tartalom

1. Jelmagyarázat	3
2. Megismerkedés	4
3. Rendeltetésszerű használat	4
4. Utasítások	4
5. A készülék leírása	7
6. Üzembe helyezés	8
6.1 A mellszívó összeállítása	8
6.2 A mellszívó tisztítása és sterilizálása	9
7. Kezelés	9
7.1 Tippek az anyatej jobb áramoltatására	9
7.2 A mellszívó kezelése	10
7.3 Az anyatej tárolása	11
7.4 Eztetés anyatejjel	11
8. Mi a teendő problémák esetén?	12
8.1 Cserealkatrészek és elhasználódó alkatrészek	12
9. Felszámolás	13
10. Műszaki adatok	13
11. Hálózati adapter	14

A csomagolás tartalma

- Mellszívó (motor egység)
- Szilikon csővecske
- Mellszívó toldalék szilikon membránnal és szilikon szeleppel
- Szilikon párna (szokásos méret)
- Palack
- Csavaros kupak
- 2 x adapter az Avent + NUK palackhoz
- Hálózati csatlakozó
- 4x elem AA 1,5 V
- Használati útmutató



Tisztelt felhasználó!

Köszönjük, hogy a termékeink közül választott egyet. A márkánk a kiváló minőségű, az energia fogyasztásának meghatározása, a finom manuális terápia, vérnyomás/diagnosztika, súly, masszázs, levegő terápia, szépségápolás és gyermek ápolás terén alaposan tesztelt termékek szinonimája. Olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használat céljával, tegye hozzáférhetővé a többi felhasználó részére is, és tartsa be az utasításokat.

Üdvözlettel az Ön Beurer csapata

1. Jelmagyarázat

A használati útmutatóban az alábbi szimbólumokat használjuk:

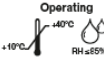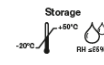	ÓVÁS Figyelmeztetés a sérülés veszélyére vagy egészségügyi veszélyre
	Figyelmeztetés Biztonsági figyelmeztetés a készülék/tartozékok sérülési veszélyére
	Vigyázat Figyelmeztetés a fontos információkra
	Tarsa be a használati útmutatót
	Alkalmazási rész BF típusú
	Egyenáram
	A terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról (EEBH) szóló irányelv alapján kell felszámolni
	Gyártó
	A megengedett üzemi hőmérséklet és páratartalom
	A megengedett üzemi hőmérséklet és páratartalom tárolásnál
IP 21	Védelem idegen testek behatolása ellen $\geq 12,5$ mm és függőlegesen csepegő vízzel szemben.
	Megállapítja, hogy a csomagolás az 1935/2004 rendelet alapján olyan termékeket tartalmaz, amelyek ételkészítéssel jöhetnek kapcsolatba.
	Sorszám
	A CE jelölés igazolja, hogy megfelel a 93/42 / EGK tanácsi irányelv orvostechnikai eszközökről szóló alapvető követelményeinek.
	Gyártói katalógusszám
	A készülék dupla védő szigeteléssel van ellátva és a 2. védelmi osztálynak felel meg.

2. Megismerkedés

A BY 40 mellszívó segítségével a kismamák az otthonuk kényelmében és egyszerűen elszívathatják az anyatejet. Amennyiben a szoptató kismamák melle nincs eléggé kiürítve, ez a tejcsatornák fájdalmas eltömődéséhez vezethet, amit a legrosszabb esetben mellgyulladás (mastitis) követhet. A mellszívó segítségével a tejcsatornák eltömődése megakadályozható a tej célzott elszívásával.

Ezen kívül a mellszívó megkönnyebbülést jelent a repedezett vagy sérült mellbimbóknak. A beépített stimuláló funkció segítségével a lapos vagy elsüllyedt mellbimbók kihúzhatók, megkönnyítve ezzel az anyatej elszívását. A mellszívó ezen kívül lehetővé teszi az anyatej tárolását a palackban pl. utazás során, vagy ha hosszabb időre el kell hagyni a babát. A mellszívó biztosítja az anyatejet az olyan csecsemők számára, amelyek egészségi okokból (koraszülés, szájjadhasadék) nem tudnak közvetlenül az édesanya melléből inni.

3. Rendeltetészerű használat

A mellszívót kizárólag az anyatej elszívására használja a kismama melléből. A mellszívót ne használja állatokon! A mellszívó kizárólag otthoni/magánkörnyezetben, nem kereskedelmi területen való használatra szolgál.

A készülék csakis ezen használati útmutatóban leírt céllal és módon használható. Bármely más helytelen használat veszélyes lehet. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy felelőtlen használat miatt keletkező károkért.

4. Utasítások



ÓVÁS

Biztonsági utasítások

- A csomagoló anyagot tartsa gyermekektől távol. A csomagolóanyag fulladási veszélyt jelent.
- Az apró alkatrészeket ne hagyja gyermekek közelében.
- Ügyeljen arra, hogy a vezeték a gyermek által ne legyen elérhető.
- Csak a készülékkel szállított adaptert használja.
- A gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.
- A tisztítást és karbantartást a gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A hálózati kábelt ne húzza, nem csavarja és ne törje meg.
- A mellszívó üzembe helyezése előtt ellenőrizze a hálózati adapteren lévő műszaki adatokat, hogy megfelelnek-e a motor egységen feltüntetett műszaki adatoknak.
- A hálózati adaptert húzza ki az aljzatból üzemzavar esetén, tisztításkor, és ha a készüléket nem használja.
- A mellszívó nem érintkezhet forró felületű vagy éles szélű tárgyakkal.
- Ne használjon semmi olyan kiegészítőt, amelyet a gyártó nem ajánlott vagy nem kínál kiegészítőként.
- Higiéniai okokból a mellszívót csupán egy személy által ajánlatos használni. Ne ossza meg a mellszívó használatát a többi szoptató kismamával.
- A mellszívó csak szoptató kismamák mellére alkalmazható.
- Ne használja a mellszívót olyan esetben ha álmos, vagy alvás közben.
- A mellszívót soha ne használja kádban, sem tusolóban.
- Helytelen működés vagy üzemzavar esetén a mellszívót semmiképp se nyissa fel, és ne rázza. Olvassa el a „Mi a teendő problémák esetén?” fejezetet, amennyiben a probléma leírását nem találja, forduljon szakszervizhez vagy az értékesítőhöz.
- A javítást kizárólag ügyfélszerviz vagy illetékes értékesítők végezhetik. A mellszívót semmiképp nem nyithatja fel és nem javíthatja, másképp nem garantálhatjuk a megfelelő működését. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása a garanciát megszünteti.
- A mellszívót soha ne helyezze vízbe.
- A mellszívót ne érintse nedves vagy vizes kézzel.

- Amennyiben a mellszívó vízbe esik, ne nyúljon hozzá. Azonnal húzza ki a mellszívó hálózati adapterét az aljzattól, ha vízbe esett.
- Amikor a mellszívót használja, helyezze stabil és egyenes felületre.
- A hálózati kábelt teljesen bontsa szét, hogy megelőzze a túlhevülést.
- A mellszívót és hálózati adaptert soha ne tegye mikrohullámú sütőbe.
- Amennyiben a mellszívót nem használja, a hálózati adaptert húzza ki az aljzattól. A mellszívót ne hagyja az aljzathoz csatlakoztatva.
- Amennyiben a mellszívó hálózati kábele megsérült, el kell távolítani.
- Az anyatejet soha ne melegítse mikrohullámú sütőben, mert egyenetlenül melegszik és a gyermek leforrázhatja magát.
- A hálózati kábelt tartsa megfelelő távolságban a forró felületektől.
- Ezt a készüléket csökkentett fizikai, érzéki vagy mentális képességű személyek, illetve nem megfelelő tapasztalattal és ismerettel rendelkező személyek nem használhatják.
- A mellszívót nem kell kalibrálni.
- A mellszívót és kiegészítőit tilos módosítani.



FIGYELMEZTETÉS

- A mellszívót soha ne nedvesítse vízzel. Nincs védve szöktető víz és folyadékok ellen.
- A mellszívót tartsa megfelelő távolságban az elektromágneses mezőtől, mert elektromágneses interferencia léphet fel és ez negatívan hat a működésére.
- A mellszívót és tartozékait védje az ütéstől, nedvességtől, szennyeződéstől, nagy hőkilengésektől és közvetlen napsugárzástól.
- Ne húzza a mellszívó csövét.
- A hálózati adaptert ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzattól.



FIGYELMEZTETÉS

Utasítások a palack szállításához

- Amennyiben az anyatejet palackban szállítja (pl. utazás során), ügyeljen arra, hogy a palack kupakja legyen szorosan becsavarva.
- Ajánljuk, hogy a megtöltött palackokat NE HELYEZZE szállítás közben a csomagtartóba, még táskában sem.



ÓVÁS

A gyermeke biztonsága érdekében!


- A gyermekek ezt a készüléket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- A folyamatos és hosszan tartó elszívás a szívóval (nem része a BY 40 csomagolásának) hibásodáshoz vezet.
- A szívókat (nem része a BY 40 csomagolásának) ne használja etetésnél cumi helyett.
- Etetés előtt mindig ellenőrizze a hőmérsékletet.
- Minden használat előtt a készüléket ellenőrizze és a szívókat (nem része a BY 40 csomagolásának) húzza szét minden irányban.
- A sérülés vagy kopás első jeleinél cserélje le.
- A szívót (nem része a BY 40 csomagolásának) ne tegye ki közvetlen napsütés és hőnek, és ne rakja fertőtlenítőszerbe („sterilizáló oldatba”) hosszabb időre, mint az szükséges, mert a szívót károsíthatja.
- A szívót (nem része a BY 40 csomagolásának) tartsa megfelelő távolságban az édes anyagoktól, amelyek károsodást okozhatnak.
- Ne használjon semmilyen súroló vagy antibakteriális tisztítóanyagokat.
- Minden alkatrészt, amely az anyatejjel érintkezésbe kerül, sterilizáljon forrásban lévő vízben öt percig.
- A készüléket minden használat előtt tisztítsa meg.
- Ügyeljen arra, hogy a palackban lévő folyadék ne legyen 50oC feletti hőmérsékletű.

ÓVÁS

Utasítás az elemek kezeléséhez


- Amennyiben az elemből származó folyadék a bőrre vagy szembe kerülne, az érintett testrészt öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.
-  Lenyelés veszélye! A kisgyermek az elemet lenyelheti, fulladás veszélye fenyeget. Az elemeket ezért tárolja gyermekektől távol!
- Ügyeljen a helyes polarításra plusz (+) és mínusz (-).
- Amennyiben az elem kifolyt, használjon védőkesztyűt és tisztítsa ki az elem-rekeszt száraz ruhával.
- Az elemeket védje a túlságos hő ellen.
-  Robbanásveszély! Az elemeket ne dobja tűzbe.
- Az elemeket nem szabad feltölteni sem rövidre zární.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a rekeszből.
- Használjon azonos, vagy egyenértékű elemeket.
- Mindig egyszerre az összes elemet cserélje.
- Ne használjon újratöltő akkumulátort!
- Az elemeket tilos szétszedni vagy zúzni.

5. A készülék leírása

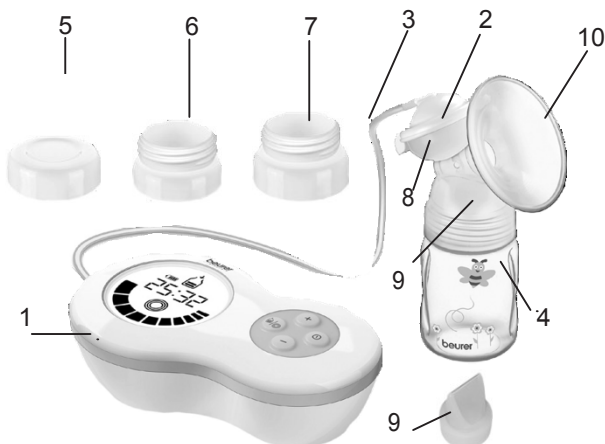

1 Mellszívó kijelzővel	6 NUK adapter
2 Mellszívó toldalék szilikon membránnal és szilikon szeleppel	7 Avent adapter
3 Szilikon csövecske	8 Szilikon membrán
4 Palack (180 ml)	9 Szilikon szelep
5 Csavaros kupak a palackhoz	10 Szilikon párna

A kijelző és gombok leírása

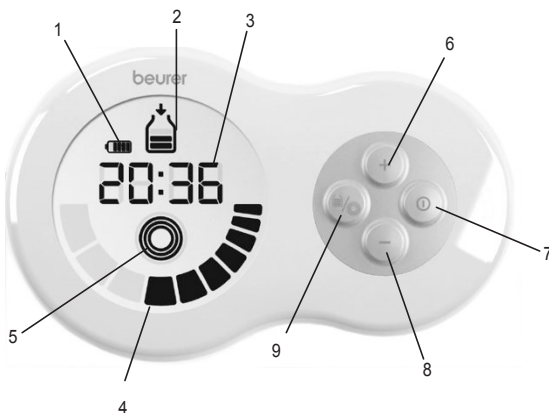

1 Elem állapot-jelző (hálózati csatlakozó nélküli üzemeltetésnél)	6 „+” gomb (a stimuláció vagy elszívás fokozatának növelése)
2 Elszívás mód (az anyatej elszívása)	7 BE/KI gomb
3 Idő kijelzés (stimulációs idő- /elszívás-mód használat időszámlálás)	8 „-” gomb (stimuláció vagy elszívás fokozatának csökkentése)
4 Stimuláció vagy elszívás fokozat	9 MÓD gomb (stimuláció és elszívás mód közötti átkapcsolás)
5 Stimuláció-mód (a mellbimbó serkentve van, a tej nincs elszívva)	

6. Üzembe helyezés

Vigyázat

Ellenőrizze, hogy a mellszívó sértetlen csomagolásban és hiánytalan állapotban van. Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken és tartozékain nem láthatók sérülés nyomai és minden csomagoló anyag el volt távolítva. Készségek esetén a készüléket ne használja és forduljon az értékesítőhöz vagy a szerviz ügyfélszolgálatához.

6.1 A mellszívó összeállítása

Miután a mellszívót kivette a csomagolás első sorban ellenőrizze a műanyag borítón a repedéseket, hogy az elektromos komponensek ne legyenek kitéve a folyadékok hatásának.

1. Csavarozza fel a palackra a mellszívó toldalékát. Ügyeljen arra, hogy a palack toldaléka üljön rá szorosan, hogy a folyadék ne folyhasson ki.




2. Tolja a szilikon csövet a mellszívó toldalékba és a mellszívóba



3. Csatlakoztassa a mellszívóhoz a hálózati kábelt és a hálózati csatlakozót nyomja az aljzatba.



4. A mellszívó alternatív módon működtethető elemmel. Nyissa ki az elemtartó fedelét a motor egység hátlapján. Tegyen bele négy AA elemet (nem tartozék). Mindig győződjön meg arról, hogy az elemek megfelelő pólussal illeszkednek. Figyelje a pólus jelzést az elemtartó rekeszében. Ezután zárja le a reteszt úgy, lássa a megfelelő illeszkedést és hogy hallja a kattantást. A négy új AA elem energiája kb. 60 perces üzem-ideig tart ki (a legnagyobb fokozaton).

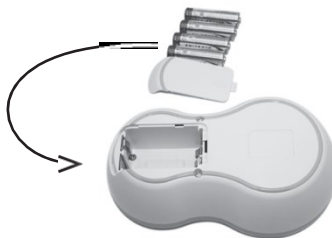

6.2 A mellszívó tisztítása és sterilizálása



ÓVÁS

A mellszívó minden egyes darabját és komponensét, amely az anyatejjel közvetlen kapcsolatba kerül (kivéve a motor egységet és a szilikon csövet) egyenként tisztítsa és sterilizálja az első és az összes következő használat előtt! A motor egységet soha ne sterilizálja!

A mellszívó helyes sterilizálása érdekében járjon el a következő lépések szerint:

1. Csavarja le a palackról a mellszívó toldalékot.
2. A mellszívó toldalékból és motor egységből húzza ki a szilikon csövet.
3. A mellszívó toldalékról távolítsa el a szilikon membránt és szilikon szelepet.
4. Sterilizálja a palackot és a mellszívó toldalékot (a szilikon membránnal és szilikon szeleppel) öt percig forrásban lévő vízben vagy gőzsterilizálóban. A mellszívót csak akkor használja újból, amikor minden része száraz. Ne használjon antibakteriális tisztítószeret, mert károsíthatják a mellszívó műanyagát.
5. A motor egységet óvatosan tisztítsa meg száraz ruhával. Ne használjon semmilyen tisztítószert vagy oldószert. Semmi esetre sem szabad a motor egységet vízzel mosni, mert a folyadék belekerülhet és károsíthatja. Amennyiben a mellszívót hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki belőle az elemeket.

7. Kezelés

7.1 Tippek az anyatej jobb áramoltatására

- Az elszívatáshoz válasszon olyan helyet, ahol a legjobban el tud lazulni.
- Az elszívatáshoz válasszon olyan időpontot, amikor a legjobban el tud lazulni.
- Amennyiben a kismama közelében van a gyermek, vagy rátekinthet a fotójára, ez pozitív hatással van a tej áramlására.
- Amennyiben az egyik mellből szoptat, a mellszívót alkalmazza a másik mellén.
- A meleg és nyugodt légkör segítik a tej áramlását. A mellszívót használja tusolás vagy fürdő után.
- Amennyiben a melle duzzadt vagy fájdalmas, néhány percre helyezzen rá meleg törölközőt. Ez kedvezően hat a tej áramlására.
- Amennyiben a mellből nem folyik azonnal a tej, próbáljon ellazulni és próbálkozzon újra pár perc múlva.
- Amennyiben az elszívóval öt perc elteltével sem áramlik a mellből tej, fejezze be az alkalmazást és próbálkozzon később.
- Amennyiben a mellszívó alkalmazása erős fájdalmat okoz, forduljon az orvosához.

7.2 A mellszívó kezelése

1. Használat előtt alaposan mosson kezet és mossa meg a mellét.	
2. Üljön olyan pozícióba, hogy a felső test legyen enyhén előre hajolva. A hátát megtámaszthatja párnával.	
3. A szilikon párnás mellkalapot helyezze óvatosan a mellére. Ügyeljen arra, hogy az egész mellbimbó legyen befedve, és ne keletkezzenek légbuborékok. A hibátlan működés érdekében a mellkalapnak szorosan rá kell szívódnia a mellre.	
4. A mellszívót kapcsolja be a  gombbal. A mellszívó automatikusan a stimuláció módban működik () és a kijelzőn megjelenik a 2-perces visszaszámlálás. Ez alatt a 2 perc alatt a mellbimbó serkentve lesz, és így felkészül az anyatej elszíváshoz. A  /  gombok segítségével állítsa be a kívánt serkentési fokozatot.	 1. Stimuláló mód bekapcsolás 2. Intenzitás
5. A 2 perc elteltével a kijelzőn villogni kezd a  gomb. Az anyatej elszíváshoz nyomja meg a  gombot. A  /  gombok segítségével állítsa be az elszívás erősségét úgy, hogy az kellemes legyen. Amint a palackban 180 ml anyatej van, állítsa meg az alkalmazást.	 3. Elszívás indítás 4. Intenzitás
6. Amennyiben ismét a stimulálás módba szeretné kapcsolni, nyomja meg a  gombot. A serkentés és a 2-perces visszaszámlálás újból indul.  A mellszívó „Memory” funkcióval rendelkezik, ez azt jelenti, hogy amint bekapcsolja a mellszívót, a stimulálás, elszívás legutóbb beállított fokozata lesz aktív.	 5. Vissza stimulálás módba
7. A mellszívót kapcsolja ki a  gomb megnyomásával.	

7.3 Az anyatej tárolása

Az elszívott anyatej egy bizonyos ideig tárolható hűtőben vagy fagyasztóban.

- Amennyiben tárolni szeretné az anyatejet, ügyeljen arra, hogy a mellszívó és palackok legyenek használat előtt fertőtlenítve. Az anyatejet kizárólag fertőtlenített edényben tárolja.
- Amennyiben tárolni szeretné az anyatejet, az elszívást követően azonnal tegye hűtőbe vagy fagyasztóba. Az anyatejet ne hagyja szobahőmérsékleten állni.
- Amennyiben az anyatejet fagyasztóban szeretné tárolni, ajánlott a palackra felírni az elszívás dátumát.



ÓVÁS

Feltétlenül tartsa be az alábbi táblázatban feltüntetett eltarthatósági időt:

	SZOBAHŐMÉRSÉKLET	HŰTŐSZEKRÉNY(kb. 3-5 °C)	FAGYASZTÓ(kb. -16 °C)
Frissen elszívott anyatej	eltartható 6 órán át	eltartható 24 órán át (Ne tárolja a hűtő ajtajában, mivel itt nincs eléggé hideg)	eltartható 3 hónapig
Felengedett anyatej (korábban mélyhűtött anyatej)	azonnal elfogyasztani	10 óra	Újrafagyasztani tilos!

7.4 Etetés anyatejjel

- Mielőtt az etetést megelőzően a tárolt anyatejet átöntené a palackba, ügyeljen arra, hogy a palack legyen fertőtlenítve.
- A fagyasztott anyatej kiolvasztásánál a tejet hagyja éjszakára a hűtőben. Ily módon a tápanyagok megőrizhetők. Amint az anyatej ki volt olvasztva, 24 órán belül el kell fogyasztani. Az anyatej meleg vízben való kiolvasztását csak kivételesen sürgős esetekben ajánlott végezni.
- Amennyiben az anyatej kellemetlenül bűzlik, azonnal likvidálja.
- Az anyatejet soha ne melegítse mikrohullámú sütőben, mert egyenetlenül melegszik és a gyermek leforrázhatja magát.
- Ha az anyatejet melegíti, mielőtt a gyermekét megkínálná vele, ellenőrizze a hőmérsékletét.

8.Mi a teendő problémák esetén?

Probléma	Lehetséges megoldás
A mellszívó nem szív.	- Ellenőrizze, hogy a mellszívó egyes részei megfelelően voltak-e összerakva. - Ellenőrizze, hogy a mellszívó szívófeje helyesen illeszkedik a mellhez.
Az anyatej elszívása sikertelen.	- Ellenőrizze, hogy a szilikon cső helyesen volt-e felszerelve, az elszívás intenzitása nincs-e minimumra állítva és a mellszívó be van-e kapcsolva. - Ellenőrizze, hogy a szilikon szelepleben nincsenek-e tej-maradékok, amelyek a tejáramlást akadályozhatják.
Az anyatej elszívása fájdalmat okoz.	- Próbáljon ellazulni és ismét próbálkozzon. Minél nagyobb gyakorlatra tesz szert, annál sikeresebb lesz a tej elszívásban. - Csökkentse az elszívó erőt a mínusz gombbal. - Kérjen tanácsot az orvosától.
Az anyatej kifolyik a szilikon párna alatt.	- Vegye le a szilikon párnát és ismét rakja fel. Ügyeljen arra, hogy a szilikon párna legyen megfelelően elhelyezve és a mellszívó toldaléka illeszkedjen szorosan. - A felsőtestét enyhén döntse előre.
A mellszívó komponens megváltozott vagy sérült.	- Ne használjon semmilyen maró hatású vagy gáz tisztítószerrel vagy oldószert. - Némely esetben az erős hőmérséklet-ingadozások a mellszívó műanyag részét károsíthatják. - Amennyiben a mellszívó valamelyik alkatrésze megsérült, a mellszívót ne használja.
A mellszívót nem lehet bekapcsolni	- Ellenőrizze, hogy a mellszívó rendesen össze van rakva és be van kapcsolva. - Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter a mellszívóhoz megfelelően csatlakozik.


8.1 Cserealkatrészek és elhasználódó alkatrészek

Termék	A tétel száma
Mellszívó toldalék, szilikon párnával (szokásos méret), szilikon membránnal, szilikon szeleppel, szilikon csővel, palackkal, és palack-kupakkal együtt	953.15
Palack szívóval és palack-kupakkal	163.719
Adapter Avent és NUK palackhoz	163.720
2 szilikon párna (kicsi és normálméret)	163.721
A kézi elszívó toldaléka beleértve a szilikon párnát (szokásos méret)	163.722
Állvány a palackhoz	163.723

9. Felszámolás

Az elhasznált, teljesen lemerült elemeket a speciálisan megjelölt gyűjtőedények segítségével a különleges-hulladékgyűjtőben vagy az elektrotechnika értékesítőjénél vannak felszámolva. A törvény rendelkezései alapján Ön köteles az elemeket felszámolni.

A káros anyagokat tartalmazó elemeken az alábbi jelölések találhatók: Pb = az elem ólmot tartalmaz. Cd = az elem kadmiumot tartalmaz, Hg = az elem higanyt tartalmaz.

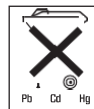

Környezetvédelmi szempontból a készülék az élettartama végén nem dobható ki a háztartási hulladékkal. A felszámolást az Ön országában levő megfelelő gyűjtőhelyen kell végrehajtani. A terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról (EEBH) szóló irányelv alapján kell felszámolni. Amennyiben kérdése van, forduljon a megfelelő önkormányzathoz, amelynek hatáskörébe tartozik a felszámolás.



10. Műszaki adatok

Modell	BY 40
Táplálás	4 x 1,5 V AA típusú elem (alkáli elemek)
Feszültség (bemenet)	100-240 V (AC~) 50/60 Hz
Feszültség (kimenet)	6V (DC ) 1,0A
Méretek	168 x 100 x 53 mm
Súly	310 g (elem nélkül)
Maximális szívó teljesítmény	0.32 bar
Megengedett üzemi körülmények	+5 °C-tól +40 °C-ig, relatív páratartalom (nem lecsapódó) 30% až 85%, külső nyomás 700-1060 hPa
Megengedett tárolási körülmények	-20 °C-tól +60 °C-ig, relatív páratartalom (nem lecsapódó) 10 až 95%, külső nyomás 700-1060 hPa
Várható élettartam	500 óra
Intervallum használat	30 perc ON / 30 perc OFF
Védelmi osztály	A készülék dupla védő szigeteléssel van ellátva és megfelel a 2. védelmi osztálynak 

Elektromágneses kompatibilitás az EN 60601-1-2 alapján

Biztonsági követelmények az EN 60601-1 alapján

Gyermekepolást szolgáló termékek – folyékony babaételek EN 14350

Mellszívó

Enyhe vákuumos készülék kis áramlási lehetőséggel

Alkalmazási rész BF típusú

A készülék használata gyúlékony vagy mérgező gázok keveréke vagy dinitrogén-oxid (kéjgáz) jelenléte nélkül)

A műszaki adatok módosításának joga előzetes bejelentés nélkül frissítés okán fenn van tartva



Ez a készülék megfelel az EN60601-1-2 európai szabvány követelményeinek és az elektromágneses kompatibilitás szempontjából speciális biztonsági intézkedések vonatkoznak rá. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések hatással lehetnek a készülékre. Pontosabb adatok beszerezhetők az ügyfélszolgálat címén vagy elolvashatók a mellékelt használati útmutató 107 – 109 oldalán.

11. Hálózati adapter

Modell sz.	LXCP12 - 06
Bemenet	100 - 240 V, 50 -60 Hz 0.3 A max
Kimenet	6V DC, 1 A
Gyártó	Shenzhen longxc power supply co., ltd
	Az egyenáramú csatlakozások polaritása
	Védő szigetelés/védelmi osztály 2
Tok és védőburkolatok	Az adapter borítója azokat a részeket védi érintés ellen, amelyek feszültség alatt vannak vagy lehetnek (ujjak, tű, ellenőrző akasztók). A felhasználó ne érintse egyszerre a beteget és a hálózati adapter kimeneti dugóját (AC/DC).



Beurer GmbH
Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com



0483