

NOVINKA



NEOBYČEJNÝ, POCIT  
**GELOVÉHO  
KOMFORTU**  
PO CELÝ DEN



[www.scholl.cz](http://www.scholl.cz)



## Naše chodidla odvádějí velký kus práce, protože...



... **60 % našeho života** strávíme na nohou.




... při **běhu jsou naše chodidla zatěžována** až čtyřnásobkem naší váhy.



... v průběhu celého života ujdeme až **120 000 km** – téměř 3x kolem světa.

## Naše chodidla jsou při chůzi obzvláště namáhána, když nemají dostatečnou oporu ve fázích 1 – 3:

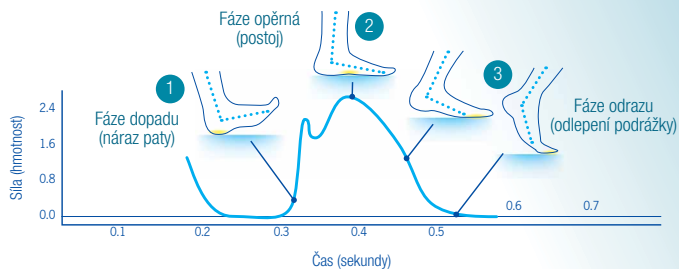

## Inovativní technologie Scholl GelActiv™ Chůze jako po gelovém polštářku!

Společnost Scholl nyní poskytuje novátorské řešení, které přemění botu na skutečně pohodlné prostředí a uleví našim nohám během každodenních činností. Nová technologie **Scholl GelActiv™** důmyslně kombinuje **dva typy gelu**, které prokazatelně utlumí i ty nejmenší nárazy a otřesy, a účinně sníží výsledný tlak při chůzi a běhu.

## Ergonomicky tvarované s optimální rovnováhou mezi odpružením a oporou

### Absorbují otřesy



Měkký modrý gel poskytuje pohodlí namáhaným polštářkům

### Poskytují odpružení



Pevnější žlutý gel pro odpružení a oporu

### Potřebná opora



Pevný oblouk podpirá klenbu a patu při námaze

Gelová vložka pro absorpci nárazů a otřesů

## Vložky do bot Scholl GelActiv™ vhodné pro vaše individuální potřeby



### Scholl gelové vložky do bot pro všední den

Absorbují menší otřesy a snižují nadměrný tlak při každodenních činnostech.



### Scholl gelové vložky do bot do práce

Účinně absorbují otřesy, snižují nadměrný tlak na nohu.



### Scholl gelové vložky do bot na sport

Snižují tlakové namáhání při aktivním sportu a podpirají nožní klenbu.



## Udělejte svým nohám pohodlné prostředí z každého páru bot!

1

Vyměňte stávající vložku  
(zejména na práci  
a sport)

2

Sestříhnete vložku  
na vhodnou velikost

3

Vložte gelovou vložku  
na běžnou vnitřní  
stélku boty

4

V případě nutnosti  
očistěte vložky vlhkým  
hadříkem

5

Vyměňujte vložky  
každých 6 měsíců nebo  
při prvních známkách  
opotřebení

**Je to tak  
snadné!**

## Odpovědi na nejčastější otázky

### Kdy bych měl/a používat vložky do bot Scholl GelActiv™?

Nové vložky do bot Scholl GelActiv™ poskytují unaveným nohám vynikající pohodlí a byly vyvinuty pro tři konkrétní oblasti:

#### Scholl GelActiv™ pro všední den – vložky pro každodenní aktivity:

vhodné do neformální i společenské obuvi, balerínek a sportovních bot

#### Scholl GelActiv™ do práce – vložky určené speciálně pro pracovní činnosti:

vhodné do pracovní, neformální a vycházkové obuvi

#### Scholl GelActiv™ na sport – vložky pro sportovní činnosti:

vhodné do tenisek, sportovních bot a vycházkové obuvi

### Kdo může vložky používat?

K dostání ve variantě pro ženy i muže, rozlišují se pouze podle velikosti. Vložky pro ženy jsou vhodné do bot ve velikostech 38 až 42. Vložky pro muže jsou vhodné do bot ve velikostech 42 až 48. Vložky je třeba přizpůsobit velikosti. Zastříhujte podél naznačené linie a přizpůsobte vložky různým velikostem.

#### Které velikosti bot jsou pro vložky vhodné?

Najděte si vhodnou velikost vložky jednoduše podle tabulky.

| Ženy     | A  | B  | C  | délka celkem |
|----------|----|----|----|--------------|
| Velikost | 38 | 39 | 40 | 42           |

| Muži     | A  | B  | C  | D  | E  | délka celkem |
|----------|----|----|----|----|----|--------------|
| Velikost | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48           |

#### Mohu vložku při stříhání poškodit?

K zastřížení vložky na požadovanou velikost použijte ostré nůžky, abyste neroztřepili okraje. Držte se při stříhání naznačené linie, abyste vložku příliš nezkrátili.

#### Jak vložím vložku do bot?

Nejprve nejlépe vyjměte z boty stávající vložku a vložte vhodně zastříženou vložku Scholl GelActiv™ do bot gelovou stranou dolů.

### Proč existují různé typy gelu?

Dva různé typy gelu prokazatelně pomáhají zmírnit nadměrný tlak, kterému jsou vaše nohy vystavovány drobnými nárazy a otřesy při chůzi a každodenních činnostech. Pevnější gel podpírá nožní klenbu a patu, kdežto měkčí gel poskytuje výborně tlumivý efekt a absorbuje nárazy.

### Mohu vložky do bot omývat?

Ano, vložky jsou omyvatelné. Jednoduše je otřete hadříkem navlhčeným teplou mýdlovou vodou, ale nenamáčejte je.

### Jak dlouho mohu vložky nosit?

Vložku vyměňte, když se na ní projeví opotřebení. Doporučujeme vložky měnit každých šest měsíců.

### Jak mohu využít záruku vrácení peněz?

Nejste-li spokojeni s vložkami Scholl GelActiv™, nahradíme vám kupní cenu. Podmínky a postup jsou podrobně uvedeny na vnitřní straně balení.

Máte další dotazy k vložkám Scholl GelActiv™ ?

Pokud ano, jděte na:

[www.scholl.cz](http://www.scholl.cz)



## Který typ vložek Scholl GelActiv™ je vhodný pro vás?

„Vedu aktivní život a jsem na nohou několik hodin denně.“



**GelActiv™ pro všední den**

„V práci jsem na nohou celý den a hodně je zatěžuji.“



**GelActiv™ do práce**

„Rád/a sportuji a při běhu nebo jiném cvičení nohy hodně namáhám.“



**GelActiv™ na sport**