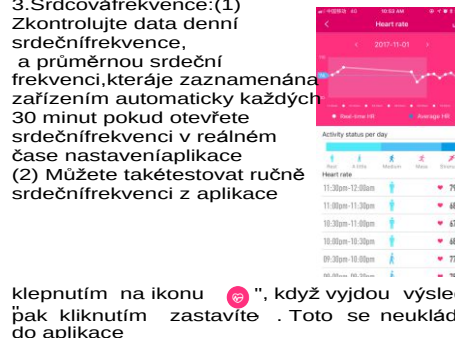
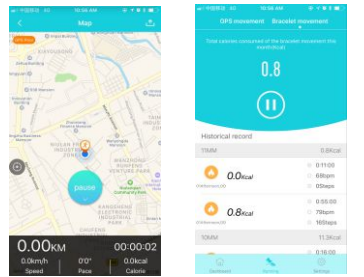
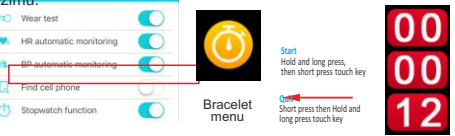


CARNEO U7+ - Inteligentní náramek s barevným displejem , tlakoměrem a sledováním tepové frekvence  uživatelský manuál CZ	Popis  01	Nabíjení zařízení Nabíjejte náramek před použitím. Napětí nabíječky: 5V Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny  02	Menu a funkce náramku : 1. Tlačítko ON / OFF Podržte a dlouho stiskněte tlačítko zapnutí 2. Čas, datum. po připojení zařízení přes Bluetooth s telefonem, hodiny, datum a týden se budou automaticky synchronizovat dle vašeho telefonu 3. Sportovní mód ③④  Krokometr ⑤ Vzdálenost ⑥ Kalorie ⑦ 03	8. Monitor krevního tlaku Stisknutím dotykového tlačítka se dostanete na stránku s krevním tlakem. Ikona se objeví (zůstaňte klidný během testu krevního tlaku) Pokud potřebujete údaje uložit, použijte aplikaci na testování uložených údajů krevním tlakem. Manuální aktivace této funkce v zařízení neuloží výsledek do aplikace. Můžete otevřít krevní tlak v reálném čase z aplikace, pak přístroj bude automaticky testovat a zaznamenávat tlak každých 10 minut, můžete vidět záznamy z panelu aplikace. 9. Snímač tepla Přejděte na stránku srdeční frekvence a ikona srdeční frekvence se objeví. Doporučuje se nosit inteligentní náramek kolem středu zápěstí ujistěte se, že snímač tepla srdeční frekvence je blízko k vašipokožce. Manuální aktivace této funkce v zařízení neuloží výsledek do aplikace. Aplikace zobrazuje údaje o tepové frekvenci shromážděné automaticky každých 30 minut, pokud otevřete srdeční frekvenci v reálném čase z aplikace. 10. Monitor spánku Zařízení automaticky monitoruje údaje o spánku, zkontrolujte údaje o podrobnostech spánku v aplikaci.  04	Bluetooth párování 1. Zapněte smart náramek 2. Zapněte Bluetooth na Vašem smartphonu 3. Stáhněte H band aplikaci ve Vašem smartphonu naskenováním QR kódu, vid níže nebo hledejte H band aplikaci z google play nebo apple store  05	Funkce a pokyny aplikace Po instalaci aplikace H Band se může vyžadovat uvedení vašich osobních údajů, jako například pohlaví, váha atd. Poté připojte inteligentní náramek přes Bluetooth (odkaz na párování Bluetooth je v párovacích krocích) Panel aplikace: Můžete zkontrolovat všechny údaje zde od dnes , včera a shrnutí údajů. 1.krok: Klepnutím zkontrolujte údaje o krocích, vzdálenostech a kaloriích. 2.Sleep: Klepnutím zkontrolujte údaje o spánku (Trvání spánku, hluboký spánek, lehký spánek atd.) 3. Srdecová frekvence (1) Zkontrolujte data denní srdeční frekvence, a průměrnou srdeční frekvenci, která je zaznamenána zařízením automaticky každých 30 minut pokud otevřete srdeční frekvenci v reálném čase nastavení aplikace (2) Můžete také testovat ručně srdeční frekvenci z aplikace  06	Krevní tlak: (1) Zkontrolujte Vaše denní údaje o krevním tlaku, které automaticky zaznamenává zařízení každých 10 minut, pokud otevřete krevní tlak v reálném čase z nastavení aplikace. Klikněte na ikonu "tlak" a na manuální spuštění funkce krevního tlaku  07	Běh 1. Pohyb GPS - GPS údaje s telefonem Klepnutím spusťte pohyb a dovolíte přístroji získat Vaši pozici, klepnutím na tlačítko Stop můžete dokončit záznam. Každý start a stop je kompletní záznam o pohybu, záznamy zahrnují čas aktivity, rychlost, tempo, spálené kalorie a trasy atd. 2. Pohyb náramku: Klepnutím spusťte sportovní režim náramku, na displeji náramku najdete záznamy.  Nastavení Moje zařízení: Kliknutím na položku názvu zařízení se spáruje Klikněte na "Název spárovaného zařízení" a potom najdete (a) Oznamovací zprávy: vyberte upozornění telefonem i ovou a zprávy (žádost na spárování se objeví v aplikaci, když Bluetooth na telefonu zapnutý, vyberte prosím náramek CARNEO. (b) Budík: Nastavte budík. 08	((c)) Nastavení režimu sedavé práce: nastavte připomenutí aktivity (D) Alarm srdeční frekvence: Nastavte mezní úroveň alarmu srdce. (E) Otáčejte zápis: Otočením zápěstí rosvítíte displej. ((f)) Spárujte zařízení - Zapnutím této funkce je možné synchronizovat data s aplikací. (G) Soukromý režim krevního tlaku: Nastavení osobního režimu krevního tlaku pro soukromé testování a referenci. (H) Nastavení tepné: Zapnutím této funkce umožníte zařízení zjistit, zda je noseno na zápěstí. (2) Automatická monitorovaná srdeční frekvence: Zapněte pro otevření reálného času srdeční frekvence. (3) Automatické monitorování krevního tlaku: Zapněte pro otevření kontroly krevního tlaku v reálném čase. (4) Najít mobilní telefon (5) Funkce stopky: Zapněte a objeví se menu stopky na náramku, podržte a dlouhým stiskem dotykového tlačítka vstupte a krátkým stisknutím spusťte stopky, pak krátkým stisknutím zastavte a dlouhým stisknutím pro ukončení tohoto režimu.  Fotografování: Vzdáleným mobilním telefonem fotografovej klepnutím na tlačítko náramku (3) Odpočítávání: Nastavte čas odpočítávání a zvolte zobrazení na náramku nebo nezobrazovat (K) Vymazání hesla: Můžete nastavit heslo pro zařízení (jiný mobilní telefon se nemůže připojit k vašemu zařízení) Předvolené heslo je 0000. Pokud zapomenete heslo, stiskněte a podržte na neaktivní obrazovce zařízení, až dokud zařízení nezavibruje heslo se obnoví na předvolené 0000. 09	((l)) Styly obrazovky: Vyberte si styly hlavních panelů  (Aktualizace firmwaru: Aktualizujte firmware zařízení (n) Vymazání údajů: Fabrické vymazání údajů zařízení. Sportovní cíl: Nastavte kroky cíl každého dne. Cíl spánku: Návrh spánku založený na osobních údajích. Nastavení jednotky: Vyberte metrickou nebo imperiální jednotku Poznámka: Senzor zeleného světla zařízení se automaticky zapíná každých 10 minut (pro detekci a shromažďování údajů o spánku a srdeční frekvenci) Chip: Nordic 52832 Displej: Barva OLED 0.96 Baterie: 150mAh Vodotěsnost: IP67 Pohotovostní doba: 4 dny Systém: IOS 8.0 nebo vyšší, Android 4.3 nebo vyšší Monitor pulzu: Ano Test krevního tlaku: Ano G senzor: Ano Bluetooth: 4.0 10
--	---	--	--	---	---	--	---	---	--	--