

Koogeek



BT1

GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Digitális baba lázmérő



Alkalmazhatóság

Alkalmas mobil orvosi elektronikus hőmérsékleti terminálhoz, amely folyamatosan képes mérni a testhőmérsékletet. Családi használatra, hónaljban történő lázméréshez.

Biztonsági Óvintézkedések

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

- A csecsemő testhőmérsékletének mérését felnőtteknek kell végeznie.
- A használat során tapassza a lázmérő tapadókorongját szorosan a bőrre. Ha túl laza, előfordulhat, hogy a mért hőmérséklet pontatlan lesz.
- Kérjük, hogy a stabil testhőmérséklet biztosítása érdekében a mérést beltérben végezze.
- A használat során a hőmérőnek meg kell felelnie a hőmérsékletre és páratartalomra vonatkozó követelményeknek. Amennyiben nem felel meg ezen követelményeknek, a mérés pontatlan lehet.
- Győződjön meg róla, hogy a stabil testhőmérséklet érdekében a felhasználó legalább 20 perccel a mérés előtt beltérben tartózkodik.
- Intenzív sportolás után kérjük, a mérés előtt pihenjen legalább 30 percet.
- Az energiatakarékosság érdekében a mérés végeztével kapcsolja ki a készüléket.
- Rendellenesség észlelése esetén kérjük, további vizsgálatok elvégzése érdekében forduljon orvoshoz. Ne öndiagnosztizálja magát.

Figyelmeztetések

Ne helyezze az elemet olyan helyre, ahol csecsemők is elérhetik.

Amennyiben a csecsemő lenyelte az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.

Használata




(Koogeek alkalmazás)

1. Olvassa be a dobozon található QR kódot a Koogeek alkalmazás letöltéséhez.
2. Az alkalmazás letöltéséhez látogasson el a <http://app.koogeek.com/download> weboldalra.
3. Keressen rá a „Koogeek” kifejezésre és töltsse le az alkalmazást egy harmadik féltől származó alkalmazási felületen.
2. Telepítse a Koogeek alkalmazást. Amennyiben most használja először, létre kell hoznia egy fiókot. (Megjegyzés: Egy regisztrált fiók több felhasználó számára is alkalmas.)
3. A Koogeek alkalmazás használata közben kapcsolja be a Bluetooth funkciót. (A Koogeek alkalmazást még a Koogeek eszközökhöz történő csatlakozás előtt el kell indítania.)
4. Adja hozzá az új felhasználót: 'Main Menu' > „Setting” > „Add new user”
5. Kapcsolja be az egységet: „Main Menu” > „Setting” > „Unit”
6. Ismeretlen mérés: A Koogeek eszközök néha nem képesek felismerni a mért adathoz tartozó felhasználót. Az adatok Bluetooth-on keresztül kerülnek feltöltésre, és az „Unkown measurements” mappában jelennek meg. Az „Unkown measurements” megtekintése után az adatokat hozzárendelheti a megfelelő felhasználóhoz.

Lázmérés

1. Indítsa el a Bluetooth funkciót és a Koogeek alkalmazást.
2. Üzembe helyezés: rázza meg gyorsan, legalább 3-szor egymás után a lázmérőt, majd a kék jelzőfény 2 másodpercig történő felvillanással jelzi, hogy az eszköz bekapcsolt.
 - 2.1 Bluetooth kapcsolat: amikor a lázmérő tapadókorongja csatlakozik a Koogeek alkalmazáshoz, a kék jelzőfény 10 másodpercig világítani fog. Amennyiben a lázmérő tapadókorongja nem csatlakozik a Koogeek alkalmazáshoz, a zöld jelzőfény 10 másodpercig világítani fog.
 - 2.2 Nincs Bluetooth kapcsolat: amikor a lázmérő nem csatlakozik a Koogeek alkalmazáshoz, a jelzőfény egy percen belül 0,3 másodpercenként, majd egy perc múlva 10 másodpercenként 3-szor villan fel.

3. Kikapcsolás: Gyorsan rázza meg a lázmérőt bekapcsolt állapotban több mint 3 alkalommal, hogy kikapcsolja azt és a Bluetooth-t. Mielőtt a lázmérő automatikusan kikapcsolna, a zöld LED jelzőfény 2 másodpercre felvillan.
4. Automatikus csatlakozás Bluetooth-hoz: Indítsa el a Bluetooth funkciót és a Koogee alkalmazást. A lázmérő automatikusan csatlakozik a Bluetooth-hoz, ha az be van kapcsolva. (A Bluetooth csatlakozási jelszót nem szükséges begépelni.)
5. Helyezze a mellékelt orvosi tapadókorongot a lázmérő hátoldalára. Győződjön meg róla, hogy a szonda felfele áll, majd emelje fel a csecsemő karját és tapassza a korongot a hónaljára.
6. Várjon türelemmel 5 percet. Ellenőrizze az alkalmazást, amint a hőmérséklet megállapodik.
7. Testhőmérséklet kijelzése: ALKALMAZÁS kijelző.
8. Hőmérséklet feltöltési sebessége: 5 másodpercenként egyszer.
9. Mérési pozíció: Hónalj.
10. Mérési elv: A testhőmérséklet megmérését követően az adatokat Bluetooth 4.0-n keresztül másolja át az alkalmazásba.
11. Offline tárolás: A mért adatokat 7 napig (168 óra) tárolja.

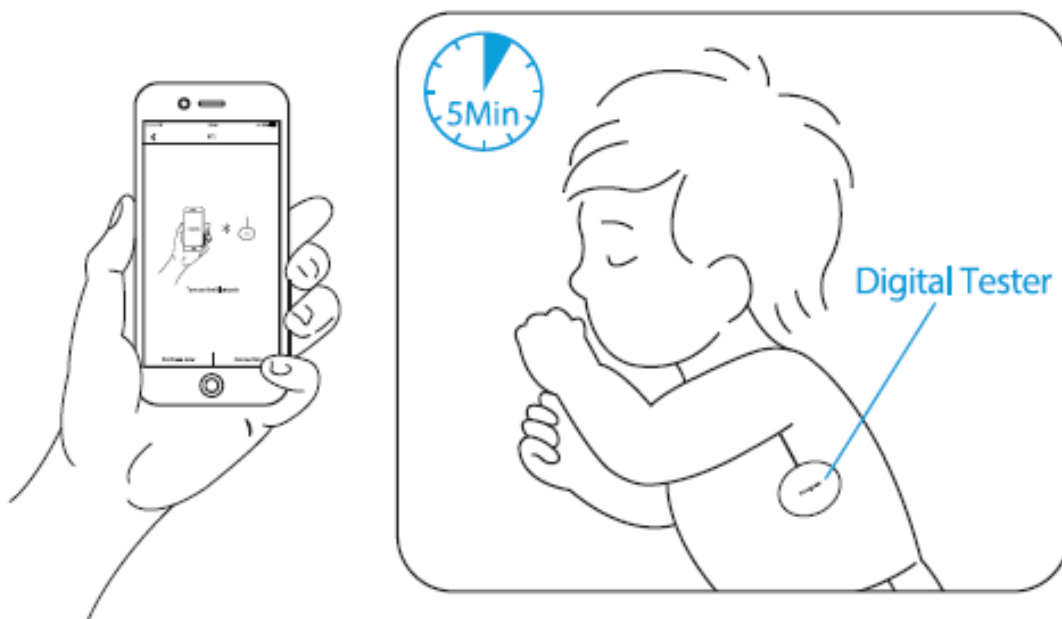

Rögzített adatok megtekintése

A rögzített eredményeket az alkalmazás hőmérsékleti felületén vagy a fő felület ismeretlen mérések oldalán tanulmányozhatja.

Megoldások rendellenes jelenségekre

K: Nem csatlakozik a Bluetooth-hoz

V: Oka

1. A Bluetooth nincs engedélyezve.
2. Az Android rendszer verziója 4.3-nál alacsonyabb.
3. A lázmérő túl messze van a mobileszközöktől.

V: Megoldás

1. Engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot.
2. Használjon olyan telefont, amelyen Android 4.3 vagy annál magasabb szintű rendszer fut.
3. Helyezze közelebb a lázmérőt a mobileszközökhöz.
4. Győződjön meg róla, hogy a készülék akadályoktól mentes területen van.

K: Nem kapcsolódik be

V: Oka

1. Az elem lemerült.
2. Az elem megsérült.

V: Megoldás

1. Cserélje ki az elemet.
2. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

K: A testhőmérsékletet nem megfelelően jeleníti meg / A mérés pontatlan.

V: Oka

1. A lázmérő meghibásodott.
2. A mérési pozíció nem megfelelő.
3. A mérési mód nem megfelelő.

V: Megoldás

1. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
2. Helyezze a lázmérőt a hónalj alá és tartsa a kart szorosan a test mellett.
3. Ha az elem merülőben van, cserélje ki. Amennyiben a mérés módja nem megfelelő, kérjük, helyezze a lázmérőt a hónalj alá, és a megbízható kapcsolat érdekében tartsa a kart szorosan a test mellett

Tisztítás, Karbantartás és Tárolás

- A tisztításhoz és a fertőtlenítéshez használjon 75%-os orvosi alkoholt a termék használata előtt.
- Kérjük, cseréljen elemet, amint az érzékelő alacsony töltöttségi szintet jelez. Ellenkező esetben befolyásolhatja a készülék normál működését.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni (több mint 3 hónapig), kérjük, vegye ki az elemet és tárolja a dobozában.
- A készülék nem sterilizálható vagy csíramentesíthető.
- Amennyiben a lázmérő szondája meghibásodott, kérjük, hagyja abba a készülék használatát.
- Alkoholtól eltérő fertőtlenítőszer használata károsíthatja a készüléket, rövidítheti annak élettartamát vagy biztonsági kockázatot okozhat.

Figyelmeztetések

1. Kérjük, óvatosan kezelje a készüléket. Kerülje a termék meghibásodását okozó leejtést vagy ütődést.
2. Ne merítse vízbe a készüléket.
3. Helyezze a készüléket olyan helyre, ahol gyermekek nem érhetik el.
4. Amennyiben a készüléket valamilyen hiba miatt nem lehet használni, függessze fel annak használatát és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
5. Kérjük, az elemcserén kívül ne szerelje szét a készüléket.
6. Ne dobja ki az elemeket vagy az egyéb használt alkatrészeket. Kérjük, a környezetszennyezés elkerülése érdekében a hulladékot a helyi környezetvédelmi hivatal által előírt körülményeknek megfelelően kezelje.
7. Jelen útmutatóban szereplő illusztrációk csupán tájékoztatójellegűek. A termékek eltérhetnek.

FCC Figyelmeztetés

A terméken a megfelelőségért felelős fél hozzájárulása nélkül végrehajtott bármilyen változtatás vagy módosítás a termék működtetési jogának elvesztését vonhatja maga után.

A termék megfelel az FCC előírásai 15. szakaszának. A termék üzemeltetése az alábbi két feltétel függvénye: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, illetve (2) a terméknek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

FCC-sugárterhelési nyilatkozat

A termék megfelel az FCC nem ellenőrzött környezetben történő sugárterhelésre vonatkozó határértéknek.

A transzmittert úgy kell elhelyezni és működtetni, hogy ne kerüljön kapcsolatba más antennával vagy transzmitterrel.



support@koogeek.com

www.koogeek.com