

HALLÓKÉSZÜLÉK

BR-160



MŰKÖDÉSI ELV

A BeautyRelax BR-160 hallókészülék cserélhető hegyekkel és jó hallókészülék-kialakítással illeszkedik mindkét fülhöz. Azoknak készült, akik úgy érzik, hogy a hallásminősége rosszabb, mint régebben. A nagy előnye a beltéri és kültéri felhasználás lehetősége. Van benne egy hangerő-beállító funkció is a felhasználó igényei szerint.

A BeautyRelax BR-160 hallókészülék érzékeli a környező hangot és növeli annak hangerejét, ahogy beállította. Pontosan az Ön igényei szerint. A cserélhető hegyek biztosítják a kényelmes használatot bármilyen fülméretnél. Használhatja a hallókészüléket a bal vagy jobb fülében, ahogy tetszik. A csomag tartalmazza az összes komponenst, így azonnal felhasználhatja a hallókészüléket. Elemeket a csomagolásban találja. A hallókészüléket és tartozékait kényelmesen dobozban lehet tárolni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS


- ne próbálja meg az eszközt szétszedni vagy javítani
- a készüléket száraz, zárt környezetben tárolja és használja (a fürdőszobában a készüléket használni tilos)
- kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja
- vegye ki az elemet, ha hosszabb ideig nem használja az eszközt
- ne hordja a készüléket megnövekedett mágneses terekbe
- ha kétségei vannak, kérdezze meg orvosát
- ne használjon agresszív tisztítószeret; károsíthatja a felületet
- óvatosan kezelje a terméket; ne tegye ki ütésnek vagy sokknak; megengedett környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól +40 °C-ig
- a biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett bármilyen kár érvényteleníti a garancia igényét; nem vállalunk felelősséget semmilyen következményes károkért, amelyeket ezek a feltételek megsértése okozott
- nem vállalunk felelősséget a termék nem megfelelő kezelése által okozott személyi sérülésekért; ilyen esetekben a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti

**TERMÉK JELLEMZŐI**

- egyedi vékony kialakítás
- elegendő érzékenység a finom hang észleléséhez
- lehetőség a hangerő egyéni beállítására
- alkalmazkodik az egyes fülméretekhez
- bent és kint is használható
- könnyű súly a kényelmes hordás érdekében

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- frekvenciatartomány: 200-3500 Hz
- hangerő: 47 dB
- érzékenység: 8 dB
- tápegység: 1x AG13/LR44 típusú elem (1 db a csomagolásban)
- méretek: 3x3x1,5cm
- súly: 90 g

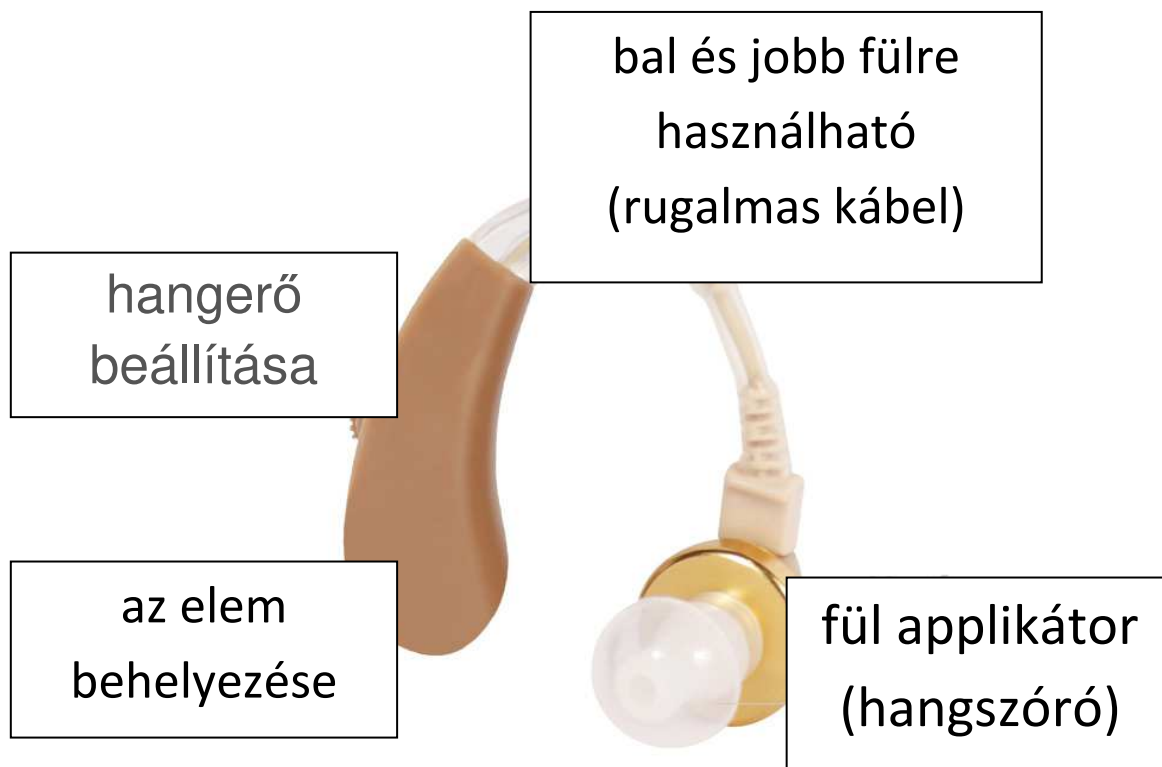TERMÉKLEÍRÁS**A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA**

1. Csúsztassa el az elemtartó fedelét. Helyezze be az elemet (ügyeljen a helyes polaritásra) és csukja vissza a fedelet – lásd 1. ábra. *Megjegyzés: Ha a hallókészülék sípol, az elem talán lemerült.*



[1. ábra - az elem behelyezése/cseréje]

2. Csatlakoztassa a hallókészülék testét a hangszóróhoz. A kábelt nem lehet megfelelően csatlakoztatni. Az egyik lyuk nagyobb, a másik kisebb.




3. A csúsztató gombbal állítsa be a hangerőt. Először állítsa be a legalacsonyabb értékre (mozgassa a gombot lefelé), majd fokozatosan növelje érzései szerint - lásd 2. ábra.




[2. ábra – Hangerő beállítása]

4. Először csatlakoztassa az univerzális adaptert a hangszóróhoz. Ezután válassza ki a három fül-aplikátor egyikét - lásd 3. ábra. A hallókészüléknek szilárdan a fülében kell lennie. Kényelmes kell hogy legyen a viselet.

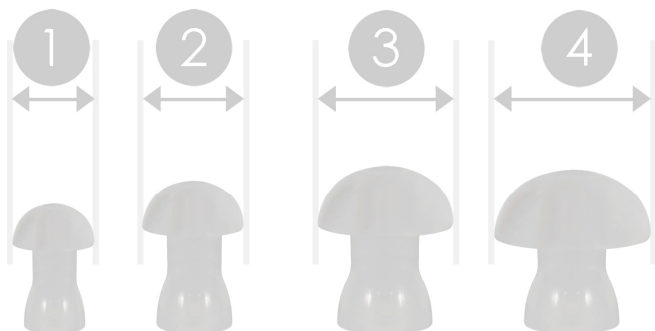

[3. ábra – négy méretű fül-aplikátor]

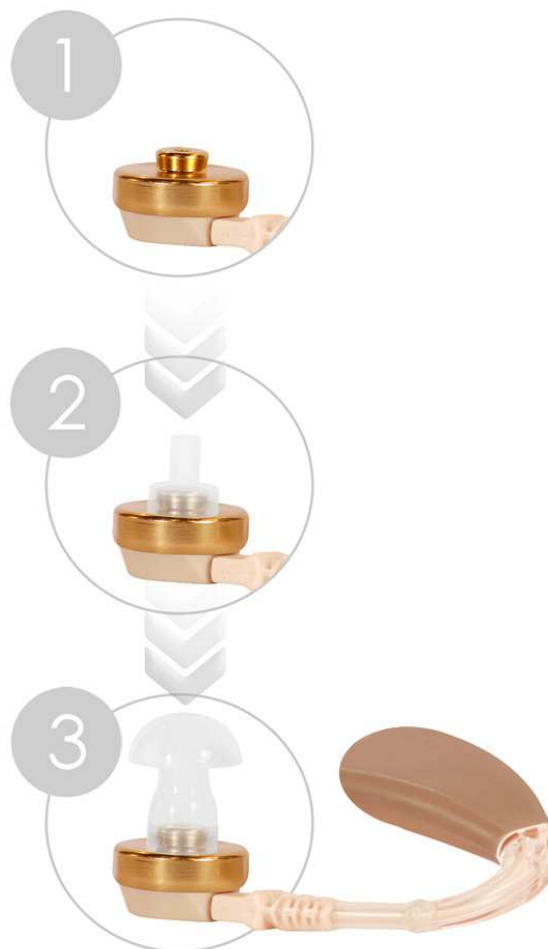

5. A hallókészülék bekapcsolásához csúsztassa a gombot a O helyzetbe. N esetén a funkció ki van kapcsolva.



IMPORTŐR

SANTADRIA s.r.o. Mojmírovo nám. 75/2 Brno 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 | E-mail:
mh@santadria.cz

*Fenntartjuk a jogot a műszaki hibák előzetes értesítés
nélküli cseréjére.*