

Používateľský manuál

Jednorazové rúško

Model KN95-A/KN95-B

Predstavenie produktu

Toto jednorazové rúško pomáha zabrániť šíreniu kvapôčkových infekcií. Malo by zakrývať nositeľove ústa, nos a čeľusť, aby jeho nosenie bolo dostatočne efektívne. Táto maska bola navrhnutá tak, aby ochránila vás a vašu rodinu pred širokou škálou nebezpečných častíc vrátane prachu, vzduchového znečistenia a ďalších. Laboratórne testy preukázali poznateľný úbytok vzduchom prenášaných infekcií vďaka noseniu tejto masky.

Popis produktu

- **Efektívna filtrácia:** Filtruje minimálne 95 % prachu, oparu, kvapiek a iných častíc.
- **Viacvrstvové filtre:** Používa netkaný roztavený materiál so strednou hrúbkou na optimálnu absorpciu častíc. Elektrostatické filtre sú vysoko efektívne pri filtrácii.
- **Ľahké dýchanie:** Netkaná látka poskytuje pohodlné dýchanie.
- **Ergonomický dizajn:** Jednoducho sa nosí, nízko impedančný filter nevypúšťa žiadny nepríjemný pach.
- **Bezpečne zabalené:** Kovový prúžok zaisťuje dobré priľnutie rúška k nosu.

Inštrukcie



1. Rozbaľte rúško a roztiahnite gumičky od seba.
2. Umiestnite masku tak, aby vám to bolo pohodlné, s kovovým prúžkom hore.
3. Natiahnite gumičky za vaše uši.
4. Ľahko zatlačte na kovový prúžok, aby ste zaistili dobré priľnutie rúška k nosu.

Varovanie

- Nepoužívajte toto rúško v zdravotníckych a operačných priestoroch.
- Nepožívajte toto rúško v akomkoľvek prostredí, v ktorom je koncentrácia kyslíka pod 19,5 %.
- Nepoužívajte toto rúško, ak máte fúzy alebo iné pľeťové ochlpenie, ktoré by mohlo byť v priamom kontakte s vašou tvárou na okrajoch rúška.
- Nepoužívajte toto rúško v prostrediach s jedovatými plynmi.

Poznámka

Toto rúško kompletne neeliminuje nebezpečenstvo nákazy a infekcií. Musí byť dobre zabalené, aby bolo efektívne. Nesprávne použitie môže vyústiť vo vyššieho rizika prenesenia choroby. Len pre dospelých používateľov.

Skladovanie

Skladujte v suchej oblasti s izbovou teplotou a neumývajte rúško vodou.

Všetky práva vyhradené. © 2020 Alza.cz

Dongguan HuaGang Communication Technology Co., Ltd.
No.78 Jinhe Road, Jinmei Village, Changping Town,
Dongguan City, Guangdong, China