

Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist®

Prosím přečtěte si pozorně příbalovou informaci a uložte pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist® čistí, obnovuje, oplachuje, dezinfikuje, uchovává všechny silikon-hydrogelové a měkké kontaktní čočky. Při každém použití odstraňuje usazeniny lipidů a bílkovin a zároveň před nimi chrání. 16 hodinové zvlhčení čoček poskytuje pohodlí od nasazení až po vyjmutí.

POPIS:

Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist® je sterilní pufrovaný vodný roztok, obsahující citronan sodný, chlorid sodný, boritan sodný, aminomethylpropanol, sorbit, disodium EDTA, dvě zvlhčující látky (TETRONIC® 1304*, a HydraGlyde® zvlhčující matice [EOBO - 41™ - polyxyethylen-polyoxybutylen]) s konzervačními látkami POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0,001% a ALDOX® (myristamidopropyl- dimethylamin) 0,0006%. HydraGlyde® zvlhčující základ je patentovaný multifunkční blokovací kopolymer, který byl primárně navržen pro zvlhčení a lubrikaci silikon-hydrogelových čoček.

*TETRONIC® je registrovaná ochranná známka BASF.

ÚČINKY:

Při používání dle návodu víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist®

- Čistí Vaše čočky tím, že z nich denně při dezinfekci a uchovávání odstraní nashromážděné lipidy a bílkoviny.
- Bio-kompatibilní zdvojené dezinfekční prostředky POLYQUAD® a ALDOX® působí proti škodlivým mikroorganismům (bakterie, plísňe a Acanthamoeba)
- Používá se pro opláchnutí a uchovávání Vašich silikon-hydrogelových a měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček.
- Složení slouží k dezinfekci a uchovávání čoček v pouzdře po dobu až 30 dnů po dezinfekci.

Je-li **víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist®** používán denně, není potřeba žádný další enzymatický čistící přípravek. Neuchovávejte Vaše čočky ve fyziologickém roztoku namísto ve víceúčelovém dezinfekčním roztoku. OPTI-FREE® PureMoist® Fyziologický roztok čočky nevydezinfikuje.

INDIKACE (použití)

Pro použití při denním čištění, regeneraci, oplachování, odstraňování usazenin lipidů a bílkovin, prevence usazování lipidů, chemické (nikoliv tepelné) dezinfekci a uchovávání silikon-hydrogelových a měkkých (hydrofilních) kontaktních čoček dle doporučení Vašeho očního specialisty.

PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY NÁSLEDUJTE TYTO POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ. OBNOVENÍ. DEZINFEKCI A ODSTRANĚNÍ BÍLKOVIN:


- **Důkladně navlhčete** každou stranu čočky **víceúčelovým dezinfekčním roztokem OPTI-FREE® PureMoist®**. Čočky mněte po dobu 20 sekund.
- Každou stranu čočky důkladně opláchněte po dobu 10 sekund rovnoměrným proudem **víceúčelového dezinfekčního roztoku OPTI-FREE® PureMoist®**.
- Naplňte pouzdro na čočky ALCON® čerstvým **víceúčelovým dezinfekčním roztokem OPTI-FREE® PureMoist®**. Nechte čočky v uzavřeném pouzdře přes noc, nejméně však 6 hodin. Po namočení jsou čočky připraveny k použití.

Zůstanou-li na kontaktních čočkách nějaké usazeniny, opláchněte je před nasazením **víceúčelovým dezinfekčním roztokem OPTI-FREE® PureMoist®**. Čočky můžete ponechat v uzavřeném pouzdře na čočky s **víceúčelovým dezinfekčním roztokem OPTI-FREE® PureMoist®** až 30 dnů. Po této době se musí Vaše čočky každých 30 dnů a před nošením očistit a vydezinfikovat pomocí **víceúčelového dezinfekčního roztoku OPTI-FREE® PureMoist®**. Pokyny očního specialisty vždy dodržujte. Pokyny pro péči o čočky neměňte bez porady s očním specialistou.

VAROVÁNÍ:

Je velmi důležité, abyste dodržovali pokyny očního specialisty a veškeré pokyny v příbalové informaci, jež se týkají správného používání a řádné péče o Vaše čočky a přípravků pro péči o čočky, včetně pouzdra na čočky. Pokud máte při nošení přetrvávající nepříjemné pocity, dochází-li k nadměrnému slzení, změnám vidění nebo se objeví zarudnutí oka, OKAMŽITĚ čočky vyjměte a poraďte se se svým očním specialistou, protože daný problém by se mohl zhoršit.

UPOZORNĚNÍ:

- Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist® používejte vždy čerstvý. Roztok v pouzdře pro uložení čoček nepoužívejte nikdy opakovaně
- Aby se zabránilo kontaminaci, nedotýkejte se ničím ústí kapací láhve. Po použití nasadte zpět uzávěr
- Uchovávejte při pokojové teplotě
- Pokud roztok nepoužíváte, nechte láhev vždy dobře uzavřenou
- Používejte do doby použitelnosti, vyznačené na přípravku 
- Šest měsíců po prvním otevření veškerý zbylý roztok zlikvidujte
- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Nepoužívejte spolu s tepelnou dezinfekcí

BALENÍ:

Víceúčelový dezinfekční roztok OPTI-FREE® PureMoist® který je sterilizován filtrací, se dodává v umělohmotných láhvích ve velikosti od 60 ml do 300 ml

STERILE A

Pouzdro na čočky ALCON®

VÝROBCE:

Alcon Laboratorie, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

DISTRIBUTOR:

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3

CE 0123

©2011 Novartis AG

ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE V EU:

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Boundary Way, Hemel Hempstead Hertfordshire,
HP2 7UD Velká Británie

EU patenty č. 0 639 070; 0 669 803; 0 948 357