

PEČLIVĚ LETÁK PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

BAUSCH + LOMB

ReNu MultiPlus®
multi-purpose solution

POKYNY: Při denním čištění, dezinfekci a odstraňování proteinů postupujte dle těchto jednoduchých kroků.

KROK 1:

Na každou stranu povrchu čoček naneste 3 kapky víceúčelového roztoku ReNu MultiPlus® a zlehka otírejte 20 sekund na každé straně.

KROK 2:

Každou stranu čoček důkladně oplachujte 5 sekund roztokem ReNu MultiPlus®.

KROK 3:

Vyčištěné kontaktní čočky uložte do pouzdra na čočky a pouzdro naplňte roztokem ReNu MultiPlus®. Roztok nechte působit nejméně 4 hodiny. Pamatujte si: vždy používejte čerstvý roztok - nikdy nepoužívejte již použitý roztok.

Vaše čočky jsou nyní připraveny k použití. V případě, že se na čočce objeví nečistoty, opláchněte čočku roztokem ReNu MultiPlus® před vložením do oka. Vždy dodržujte pokyny svého očního specialisty. Na základě individuálního chemického složení vašich slz a rozvrhu nošení čoček vám váš oční specialista může doporučit další výrobky nebo postupy.

UCHOVÁVÁNÍ:

Čočky můžete uchovávat v neotevřeném pouzdru na čočky připravené k použití maximálně 30 dní.

SLOŽENÍ:

Sterilní izotonický roztok, který obsahuje HYDRANATE® (hydroxyalkylfosfonát) 0,03%, kyselinu boritou, edetát disodný, poloxamin 1 %, boritan solný a chlorid sodný; DYMED™ - (polyaminopropyl biguanid) 0,0001%.

PŮSOBNÍ:

Čistí, uvolňuje a odstraňuje nahromaděné usazeniny a proteiny z měkkých kontaktních čoček. Ničí škodlivé mikroorganismy na povrchu čoček. Oplachuje, uchovává a lubrikuje čočky před vložením do oka.

INDIKACE:

BAUSCH + LOMB ReNu MultiPlus® roztok je určen k dennímu čištění, dennímu odstraňování proteinů, oplachování, chemické (ne tepelné) dezinfekci a uchování všech měkkých kontaktních čoček dle doporučení Vašeho očního specialisty.

KONTRAINDIKACE:

Máte-li alergii na některou složku tohoto výrobku, nepoužívejte jej.

VAROVÁNÍ: problémy se zrakem včetně rohovkového vředu se mohou objevit náhle a mohou vést ke ztrátě zraku. Kontaktní čočky určené pro denní nošení nejsou vhodné k používání během spánku. Klinické studie vykazují zvýšené riziko nepříznivé reakce v případě nošení těchto čoček během spánku. Kontaktní čočky určené k prodlouženému nošení, musí být pravidelně čištěné a dezinfikovány. Dbejte pokynů vašeho očního specialisty. Klinické studie vykazují, zvýšené riziko nežádoucích účinků při prodlouženém nošení kontaktních čoček v porovnání s denním nošením. Studie také vykazují vážné nebezpečí nepříznivého účinku při prodlouženém nošení v případě nesprávného čištění a nedodržení plánované výměny čoček. Studie prokázaly zvýšené riziko nežádoucích reakcí u kuřáků. V případě pocitu nepohodlí v očích, zvýšeného slzení, změny vidění nebo zarudnutí očí, vyjměte kontaktní čočky z očí a vyhledejte svého očního specialistu. Doporučujeme návštěvu očního specialisty 2x ročně, v případě potřeby častěji.

Pouzdro na čočky byste měli naplnit čerstvým roztokem pokaždé, když do něj vkládáte čočky, nikdy nepoužívejte roztok znovu. Když čočky vyjmete z pouzdra, vždy byste z něj měli roztok okamžitě vylít. Jakoukoliv vodu - vodovodní, balenou nebo destilovanou jakýkoli jiný nesterilní roztok, nikdy nepoužívejte pro uchování, čištění nebo oplachování kontaktních čoček.

Pouzdro na čočky vždy vyprázdněte, očistěte a propláchněte ReNu MultiPlus® roztokem. Pouzdro nechte pokaždé oschnout na vzduchu. Vyměňujte pouzdro na čočky každý měsíc.

Varování: Nevyměňujte-li se roztok v pouzdře na čočky za nový po každém použití nebo použije-li se obyčejná voda k péči o čočky, může dojít ke kontaminaci a poškození Vašich očí, což může vést až ke ztrátě zraku. Čtěte další důležité bezpečnostní informace.

POKYNY:

- Vždy dodržujte pokyny k použití. Jejich nerespektování může vést ke ztrátě zraku.
- Navštěvujte pravidelně svého očního specialistu.
- Před manipulací s čočkami si vždy umyjte a osušte ruce.
- Pro péči o čočky nepoužívejte vodu z vodovodu, balenou vodu nebo sliny.
- K čištění a dezinfekci kontaktních čoček vždy používejte čerstvý roztok.
- Vždy vylijte zbývající roztok z pouzdra na čočky po každé dezinfekční proceduře.
- Sliny nebo zvlhčující kapky nedezinfikují kontaktní čočky.
- Vždy nahrazujte roztok a kontaktní čočky dle instrukcí.
- Pouzdro na čočky vyměňte za nové po 30 dnech používání.
- Abyste zabránili kontaminaci roztoku, nedotýkejte se horního okraje láhve žádnou částí těla ani svým okem a žádným jiným předmětem. Po použití víčko znovu nasadte.
- Nepoužívejte při tepelné dezinfekci.
- Láhev pečlivě zavírejte.
- Používejte jen do data expirace uvedeného na obalu a láhvi.
- Vylijte zbývající roztok po 90 dnech od otevření.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Skladujte při pokojové teplotě.

POZOR: Jestliže se vyskytne, přetrvává nebo vzrůstá podráždění či nadměrné slzení, nebo pokud se Vám zhoršuje vidění, přestaňte roztok používat a okamžitě se poraďte se svým očním specialistou.



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman St.
Rochester, NY 14609, USA

EC REP

Autoryzowany przedstawiciel w UE: Bausch & Lomb Inc.
106 London Road, Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Manufactured by/Wytwórca: Bausch & Lomb-IOM Spa,
20846 Macherio, (Milan) Italy.
Wyprodukowano we Włoszech/Vyrobena v Itálii/Made in Italy.
www.bausch.com