


MEGJEGYZÉS:

1. A STANDARDTM CodeFree[®] Plus vércukor tesztsík használata előtt olvassa el ezt a tájékoztatót.
2. A STANDARDTM CodeFree[®] Plus vércukor tesztsíkot a STANDARDTM CodeFree[®] Plus vércukormérővel vagy a STANDARDTM CodeFree[®] Plus NFC vércukormérővel kell használni. Más vércukormérővel nem használható.
3. A vércukormérés elvégzésével kapcsolatos további információkért olvassa el figyelmesen a mérőeszköz használati útmutatóját.

BEVEZETÉS

A vércukorszint rendszeres ellenőrzése segít a cukorbetegség jobb kezelésében. Orvosi tanulmányok azt mutatják, hogy orvosának irányításával Ön képes lehet arra, hogy vércukorszintjét a normális szint közelében tartsa. Ez megakadályozhatja vagy lelassíthatja a cukorbetegség szövődményeinek kialakulását.

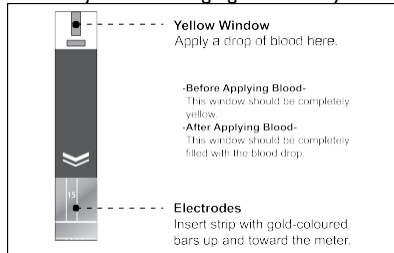

Rendeltetésszerű használat

A STANDARDTM CodeFree[®] Plus vércukor tesztsíkot a vércukorszint önellenőrzéséhez tervezték, ujjbegyből, tenyéből, alkarból vagy felkarból származó friss kapilláris teljes vérrrel. Ezt a csíkot a testen kívüli (*in vitro* diagnosztikai felhasználásra) otthoni használatra szánják.

A termék leírása és a használat elve

A STANDARDTM CodeFree[®] Plus vércukor tesztsíkot a glükózsztint mérő elektródával tervezték. A vérmintában lévő glükóz keveredik a tesztsíkon lévő reagenssel, amely kis elektromos áramot gerjeszt. A keletkező áram mennyisége attól függ, hogy mennyi glükóz van a vérben.

A mérőműszer méri a keletkező áramot, és a mérést a vérben lévő glükóz mennyiségére számolja át. A vércukorszint eredmény a mérő LCD-kijelzőjén jelenik meg.

Ha egy csepp vért a tesztsík hegyéhez érintünk, a csík reakciókamrája kapilláris hatás révén automatikusan a csíkba szívja a vért. Amikor a kamra megtelt, a mérő elkezd mérni a vércukorszintet. Ez egy egyszerű és praktikus rendszer a vércukorszint napi ellenőrzésére.

Reagens összetétele : Hatóanyag (100 csíkonként)

Glükóz-oxidáz (GOD) 300 egység
Kálium-ferricyanid (követítő) 9,0 mg

ÖVINTÉZKEDÉSEK

1. A vércukorszint-vizsgálathoz csak friss kapilláris teljes vért használjon ujjbegyből vagy alternatív helyekről (tenyér, alkar és felkar).
2. A tesztsíkot a rendeltetésnek megfelelően kell használni.
3. A tesztsík csak egyszeri használatra szolgál. Ne használja fel ismét.
4. A használt tesztsíkot és a lándzsát óvatosan dobja ki.
5. Helyezze be a tesztsíkot a mérőműszer "tesztsíkos nyílásába" úgy, hogy az aranyszínű sávok nyomtatott nyíl szimbóluma felfelé és a mérőműszer felé nézzen.
6. A tesztsík érzékeny a páratartalomra. Ezért a tesztsíkot a megadott tárolóban kell tartani, és miután kihúzta a tesztsíkot a tárolóból, azonnal zárja le a tesztsík tárolóját a kupakjával.
7. Miután kihúzta a tesztsíkot a tartályából, 3 percen belül fel kell használnia.
8. Ne használjon tesztsíkot, amelynek a felbontástól számított 6 hónapos lejárta lejárt. A felbontástól számított 6 hónap elteltével ne használja a lejáratú tárt tesztsíkot.

9. Ha a tesztsíkot erővel helyezi be, könnyen meghajlik. Ezért óvatosan helyezze be a tesztsíkot a mérőbe akadásig.
10. A tesztsíkhöz szükséges vérminta térfogatának 0,9 µl-nek kell lennie. Ha a vér nem elegendő mennyiségű, akkor pontatlan lesz a teszteredmény, ezért dobja ki a használt tesztsíkot.
11. Ne használjon más területet, kivéve a tesztsík sárga ablakát.
12. A tesztsík sárga ablakát lehetőleg ne érintse meg.
13. Az ellenőrző szalag nem a vércukorszint mérésére szolgál.
14. Ne hajlítsa meg, ne vágja el és ne módosítsa a tesztsíkot és az ellenőrző csíkot.
15. Ezt a rendszert a tengerszint és a 3776 méteres magasság között tesztelték.
16. Az extrém páratartalom befolyásolhatja az eredményeket.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ALTERNATÍV HELYEK TESZTELÉSÉRŐL

Az ujjbegytől eltérő helyeken kevesebb idegvégződés lehet, így a vérvétel ezekről a helyekről kevésbé lehet fájdalmas. Az alternatív helyről történő vizsgálat technikája eltér az ujjbegyről történő vizsgálatától. Az ujjbegytől eltérő helyekről származó vércukorszint-eredmények jelentősen eltérhetnek az étkezés, inzulin vagy testmozgás után gyorsan változó vércukorszint miatt.

Az ujjbegytől eltérő helyen történő tesztelés előtt konzultáljon a cukorbetegséggel foglalkozó egészségügyi szakemberrel.

Fontolja meg az alternatív helyről tesztelést, ha;

- Étkezés előtti tesztelés
- Önnek éhgyomorja van
- Két óra telt el az étkezés óta
- Két óra telt el az inzulin adagolása óta
- Két óra telt el a fizikai aktivitás óta

Használja az ujjbegyes tesztelést;

- Étkezést követő két órán belül
- Az inzulin adagolását követő két órán belül
- A fizikai aktivitást követő két órán belül
- Ha korábban már volt hipoglikémiája, alacsony vércukorszintet tapasztal, vagy hipoglikémiás tudatlanságban szenved (nem tudja megállapítani, hogy alacsony a vércukorszintje).
- Stressz vagy betegség idején

Kérdezze meg a cukorbetegséggel foglalkozó egészségügyi szakembert az ajánlott vizsgálati eljárásokról. Ha gépeket kezel vagy autót vezet, az ujjbegyes vizsgálat általában az ilyen körülmények között előnyben részesített vizsgálati módszer. Ha vérálfutás jelentkezik, akkor helyette az ujjbegy lándzsát is választhatja.



VIGYÁZAT


Ha az ismételt Alternatív hely eredménye még mindig nincs összhangban azzal, ahogyan érzi magát, erősítse meg vércukorszintjét ujjbegyes vizsgálatlalt.

TESZT ELVÉGZÉSE

Vizsgálati eljárás


Vércukorszint vizsgálata

1. Vegyen ki egy új tesztsíkot a tárolóból. Ügyeljen arra, hogy a tesztsík eltávolítása után szorosan zárja vissza a tároló kupakját.
2. Helyezze be a tesztsíkot a tesztsík nyílásba, amíg az aranyszínű sávokkal nyomtatott nyíl szimbólummal felfelé és a mérő felé mutatva nem megy tovább. Ezután a mérő automatikusan bekapcsol.

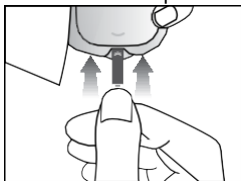

3. Vegyen egy csepp vérmintát a lándzsa és a szűrőeszköz segítségével.
4. Érintse meg és tartsa a vércseppet a csík széléhez, amíg a sárga ablak teljesen megtelik vérrrel. A vér automatikusan felszívódik a csíkra.



5. Amikor a vér a csíkra kerül, a kijelző 5 másodperctől 1 másodpercig visszaszámol, és az eredmény mindössze 5 másodperc alatt megjelenik a kijelzőn.

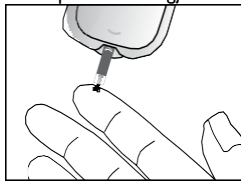



6. Vegye ki és dobja el a használt tesztsíkot.

Vérvétel ujjbegyből



1. Mosson kezét meleg, szappanos vízzel. Öblítse le jól és szárítsa meg teljesen. Az ujjak bemelegítése fokozhatja a véráramlást.
2. Fordítsa el a lándzsa tartó kupakját az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy eltávolítsa, majd helyezze a lándzsát a lándzsa tartó szerkezetbe, és nyomja bele rendesen, amíg teljesen be nem ül. Csavarja le a lándzsa védőtokját, amíg az el nem válik a lándzsától.

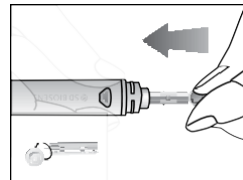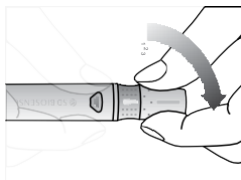

3. Helyezze vissza a lándzsa tartó kupakját, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg szorosan be nem záródik. Állítsa be a szűrési mélységet a szűrési mélységállító csavar elforgatásával, amely 1-5 fokozatú, minél magasabb a fokozat, annál erősebb a vérvétel ereje a szűrési helyén.

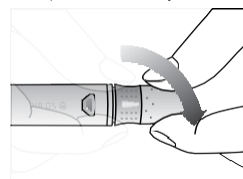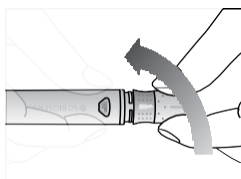

4. Miután hátrahúzta a szűrőeszközetet, tartsa a szűrőeszközetet erősen az ujjá oldalához, majd nyomja meg a kioldógombot.

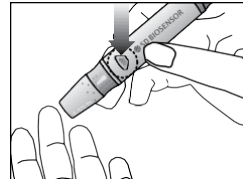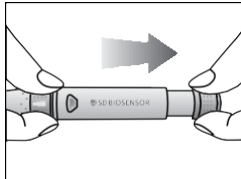

5. A használt lándzsát fertőzésveszély csökkentés érdekében dobja ki.




MEGJEGYZÉS

- A lándzsák csak egyszeri használatosak, hogy csökkentsék a fertőzés esélyét.
- A lándzsa tartó eszköz behelyezett lándzsával veszélyes a szemre, a nyelvre vagy egy fertőzés helyén alkalmazva, kérjük, legyen óvatos.
- Tartsa a lándzsát és a szűrőeszközt gyermekektől távol


Alternatív hely

1. Helyezzen egy lándzsát és egy AST kupakot a lándzsázó eszköz tetejére, és húzza fel a lándzsázó eszközt.

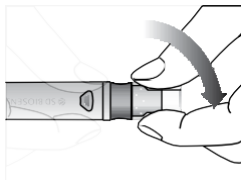


Vércukorszint-monitorozó rendszer


2. Válasszon egy puha, húsos területet a tenyéren, alkaron vagy felkaron, amely mentes a látható erektől, anyajegyektől és szőrszálaktól, és távol van a csontoktól.

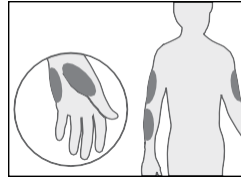


3. Nyomja meg és dörzsölje erőteljesen a kiválasztott területet 10 másodpercig, amíg az érintésre melegnek nem érződik.

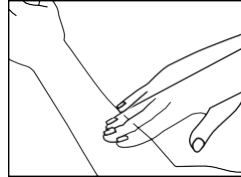


4. Mossa le a területet meleg, szappanos vízzel. Öblítse le és szárítsa meg teljesen. Ha alkoholtörölőkendőt használ a terület megtisztításához, győződjön meg róla, hogy a terület száraz, mielőtt megszűrná a helyet.
5. Szilárdan tartsa a felhúzott lándzsát 5-10 másodpercig a tiszta bőrhöz.

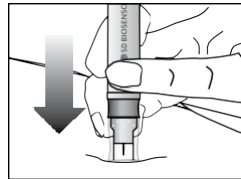

6. Nyomja meg a lándzsázó eszköz kioldógombját a bőrbe történő beszúráshoz. Tartsa továbbra is erősen a bőrhöz a szűrőeszközt, amíg vércsepp nem képződik.

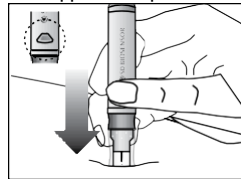

7. Amint elég nagy vércsepp keletkezett, vegye el a lándzsázó eszközt.

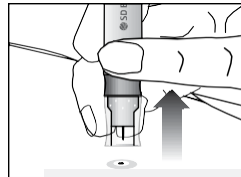

MEGJEGYZÉS

- Ismétlje meg a vérvételt, ha a folyadék tiszta.
- Ha 20 másodpercnél tovább tart a vérminta vétele és a csík vércsepphez való érintése, ismétlje meg a vérvételt.

A VIZSGÁLATI EREDMÉNY MEGÉRTÉSE

Normál vércukorszint-eredmény

- Várható értékek tartománya
Az önellenőrzés segíthet a vércukorszint ellenőrzésében. Konzultáljon orvosával, hogy meghatározza az Ön számára legmegfelelőbb várható vércukorérték tartományt.
- A nem cukorbeteg felnőttek várható vércukorértékei a következők(1.):
 - Étkezés előtt < 100 mg/dl (5,6 mmol/l)
 - Egy-két órával étkezés után < 140 mg/dl (7,8 mmol/l)

Vizsgálati eredménytartomány

A mérő 10-600 mg/dl (0,6-33,3 mmol/l) közötti vércukorszint értékeket mér.

- Ha a kijelzőn "HI" jelenik meg, akkor a vércukorszintje magasabb lehet, mint 600 mg/dl (33,3 mmol/l). Lehet, hogy magas a vércukorszintje.
- Ha a kijelzőn "Lo" jelenik meg, akkor a vércukoreredménye 10 mg/dl-nél (0,6 mmol/l) alacsonyabb lehet. Lehet, hogy alacsony a vércukorszintje.

Váratlan eredmények

A magas vagy alacsony vércukorszint eredmények potenciálisan súlyos egészségügyi állapotokat jelezhetnek. Váratlan eredmény esetén azonnal meg kell ismételni a vizsgálatot egy új tesztcscikkal. Ha az eredmény még mindig váratlan, vagy az eredmény nem áll összhangban az Ön érzésével, akkor az egészségügyi szakember által előírt módon kell kezelnie és/vagy azonnal kapcsolatba kell lépnie az egészségügyi szakemberrel.

A váratlan eredmények ellenőrzése

Ha a vércukorszint eredménye szokatlanul magasnak, alacsonynak vagy a korábbi eredményekkel vagy a vércukorszint trendekkel összeegyeztethetetlennek tűnik, és nem tükrözi az Ön érzését, ellenőrizze a következőket:

- Ismételje meg a vizsgálatot egy új csikkal.
- Végezzen el egy kontrolloldatos vizsgálatot a STANDARDTM Glükóz kontrolloldattal.
- Ha a kontrolloldat vizsgálati eredménye az elfogadható tartományon belül van, vizsgálja felül a megfelelő vizsgálati eljárást, és ismételje meg a vércukorszint vizsgálatot új tesztcscikkal. Ha vércukorértéke továbbra sem egyezik a korábbi eredményekkel, a vércukorszint alakulásaival vagy azzal, ahogyan Ön érzi magát, kérjük, forduljon egészségügyi szakemberéhez. A terápia megváltoztatása előtt kövesse egészségügyi szakembere tanácsát.

A váratlan eredmények oka

- Ha a mintavétel és a mérés között több mint 20 másodperc telt el (a vérminta párolgása a pontos értéknél magasabb vizsgálati eredményt okozhat).
- A vérmintát 3 percen belül a tesztcscikra helyezték a tárolóból való kivételtől számítva?
- A vérminta mérete elegendő volt-e a reakcióhely kitöltéséhez?
- A tesztcscik tárolójának kupakja szorosan le volt zárva?
- A tesztcscikot a lejáratú idő előtt használták fel?
- A tesztcscikokat szélsőséges hőmérsékleten tárolták, például az autóban nagyon hideg vagy meleg időjárás alatt?
- A tesztcscikokat magas páratartalmú helyiségekben, például a konyhában vagy a fürdőszobában tárolták?
- Az AST esetében a vérminta tiszta folyadékkal hígítottnak tűnt-e?
- Az AST esetében nem dörzsölte meg erőteljesen a vizsgálati helyet?

ELLENŐRZŐ OLDATTAL TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉS

Ellenőrző oldat vizsgálata

Az ellenőrző oldat ellenőrzése biztosítja, hogy a tesztet helyesen végzi el, és hogy a rendszer megfelelően működik. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő ellenőrző oldatot használja a tesztcscikokhoz: STANDARDTM CodeFree® Plus vércukor tesztcscikhoz STANDARDTM Glükóz ellenőrző oldat szükséges.

Mikor végezzen el kontrolloldatos tesztet?

- Ha a tesztcscikok tárolójának kupakját nem teszi vissza.
- A mérőműszer első használata előtt.
- Amikor kinyit egy új tesztcscik tárolót.
- Ha leesik a mérő.
- Amikor az eredmény nem egyezik azzal, ahogy érzi magát.
- Ha megismételt egy vizsgálatot, és a vércukorszint eredmény még mindig alacsonyabb vagy magasabb a vártnál.
- Ha ellenőrizni szeretné a mérő és a tesztcscik teljesítményét.

- A felbontástól számított 3 hónap elteltével ne használjon ellenőrző oldatot. Ezért a mérő és a tesztcscik pontos felülvizsgálatához először ellenőrizze a kinyitás dátumát.
- A kontrolloldatot 18-30 °C (64-86 °F) környezetben vizsgálja.

Ellenőrzési eljárás

- Nyomja meg a mérőműszer bal oldali gombját 3 másodpercig, hogy ellenőrizze a vizsgálati rendszert egy ellenőrző oldat segítségével.
- Rázza fel a kontrolloldat tartályát, és dobja ki az első csepp oldatot. Óvatosan nyomja össze a tartályt, hogy egy kis cseppet képezzen. Vigye a cseppet a csik széléhez, és hagyja, hogy a csik automatikusan a sárga ablakba szívja a kontrolloldatot. Amikor a kontrolloldat a tesztcscikra kerül, a kijelzőn a mérőműszer 5-től 1 másodpercig visszaszámol. Szorosan helyezze vissza a kupakot a mérőoldatra.
- Az ellenőrző oldat eredménye mindössze 5 másodperc alatt megjelenik a kijelzőn.

Az ellenőrző oldat tesztjének megértése

- Ha az Ön glükózkontroll oldatának vizsgálati eredménye az elfogadható tartományon belül van, akkor biztos lehet abban, hogy a tesztcscikok és a mérőműszer megfelelően működik.
- Ha az Ön glükózkontroll oldatának teszteredménye az elfogadható tartományon kívül esik, akkor előfordulhat, hogy a rendszer nem működik megfelelően.

Ellenőrizze a következőket:

- Olyan ellenőrző oldatot vagy tesztcscikokat használt, amelyeknek lejárt a szavatossági ideje?
- A tesztcscikok vagy a kontrolloldat tartályának kupakját levéve hagyta?
- Pontosan követte a tesztelés lépéseit?
- Használta a megfelelő ellenőrző oldatot az Ön által használt tesztcscikokhoz?

Ismételje meg a glükóz kontrolloldat vizsgálatot. Ha az eredmény még mindig nem elfogadható, kérjük, lépjen kapcsolatba az SD Biosensor Healthcare Private limited vállalattal az 1800-10-23105 (díjmentes) telefonszámon vagy e-mailben a india@sdbiosensor.com címen.

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS

- A tesztcscikokat szobahőmérsékleten, 2 °C és 32 °C (36 °F és 90 °F) között tárolja. Ne hűtse vagy fagyassza le. A fagyasztott és felolvasztott reagensek hibás glükózeredményeket okozhatnak.
- Tartsa pormentesen a tesztcscik nyílását.
- A tesztcscik érzékeny a páratartalomra, tartsa száraz és hűvös környezetben, és ne tárolja közvetlen napfényben.
- Miután kihúzta a tesztcscikot a tartályból, szorosan zárja le a tartály kupakját a tesztcscikok védelme érdekében.
- A tesztcscik tartálya képes a rendszeres páratartalom fenntartására, ezért nem szabad cserélni a tesztcscik tartályát.
- Tartsa a kontrolloldatot 8-30 °C (46-86 °F) hőmérsékletű környezetben.

Teljesítményjellemzők

A STANDARDTM CodeFree® Plus/Plus NFC BGMS minden teljesítményjellemzőjét rövid időintervallumon belüli méréssorozattal kell értékelni az EN ISO 15197:2015 szabványnak megfelelően.

Precízió


Az elfogadható kritérium szórás (STD) értékei: 100 mg/dl (5,55 mmol/l) alatt 3 mg/dl, 100 mg/dl (5,55 mmol/l) felett 4%-os szóráskoefficiens (CV).

1. Ismételhetőség

Átlagos glükózsztint (mg/dl)	STD(mg/dl) / CV(%)
47.6	1,1 mg/dl
82.8	2,0 mg/dl
135.0	2.9%
209.9	3.1%
312.5	2.3%

2. Közepes pontosság

100mg/dl (5,55mmol/L) alatt	100 mg/dl (5,55 mmol/l) felett
1. szint	2. szint
STD (mg/dl)	CV (%)
1,4 mg/dl	2.9%

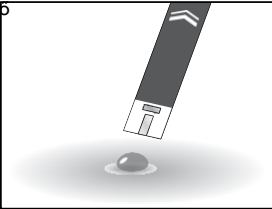

A rendszer pontossága

A rendszer pontosságát úgy értékelték, hogy összehasonlították a vércukorszint-eredményeket a YSI 2300 STAT Plus modellel, egy glükózközlaboratóriumi műszerrel, mint referenciával. A következő eredményeket 600 minta alapján értékelték.

A rendszer pontosságának elfogadható kritériumai a következők;

A mért glükózértékek 95%-ának a referencia mérési eljárás során mért átlagos értékek $\pm 15\text{mg/dl}$ ($\pm 0,83\text{mmol/L}$) értékén belül kell lennie $<100\text{mg/dl}$ ($5,55\text{mmol/L}$) glükózkoncentráció esetén, vagy $\pm 15\%$ -on belül $\geq 100\text{mg/dl}$ ($5,55\text{mmol/L}$) glükózkoncentráció esetén.

1. 100mg/dl (5,55mmol/L) alatt

$\pm 5\text{ mg/dl}$ -en belül ($\pm 0,28\text{ mmol/l}$ -en belül)	$\pm 10\text{ mg/dl}$ -en belül ($\pm 0,56\text{ mmol/l}$ -en belül)	$\pm 15\text{ mg/dl}$ -en belül ($\pm 0,83\text{ mmol/l}$ -en belül)
80.1%(149/186)	98.4%(183/186)	99.5%(185/186)

2. 100 mg/dl felett (5,55 mmol/l)

$\pm 5\%$ -on belül	$\pm 10\%$ -on belül	$\pm 15\%$ -on belül
67.4% (279/414)	97.1%(402/414)	99.8%(413/414)

3. Teljes rendszerpontosság

$\pm 15\text{ mg/dl}$ (0,083 mmol/l) vagy 15%-on belül
99.7% (598/600)

Befolyásoló mennyiségek

A befolyásoló mennyiségek elfogadható kritériumai a következők;

- 100 mg/dl (5,55 mmol/l) alatt a vizsgálati minta és a kontrollminta közötti átlagos különbség 10 mg/dl (0,55 mmol/l).
- 100 mg/dl (5,55 mmol/l) felett a vizsgálati minta és a kontrollminta közötti átlagos különbség 10%-on belül van.
- 1. Tömött sejtek térfogatának értékelése: A STANDARDTM CodeFree® Plus/Plus NFC BGMS az EN ISO 15197:2015 szabvány 6.4.3. pontja szerint történik. A STANDARDTM CodeFree® Plus/ Plus NFC BGMS esetében a megfelelő 20-60%.
- 2. Interferencia-vizsgálat: A STANDARDTM CodeFree® Plus/Plus NFC BGMS az EN ISO 15197:2015 szabvány 6.4.4. szakasza szerinti interferencia tesztelését végezték. Az alábbi interferenciaanyagok befolyásolhatják a vizsgálati eredményeket.

Anyag	Korlátozás	Anyag	Korlátozás
Paracetamol	> 6 mg/dl	Heparin	> 3,000U/L
Aszkorbinsav	> 4 mg/dl	Ibuprofen	> 50 mg/dl
Bilirubin	> 40 mg/dl	Levodopa	> 4 mg/dl
Teljes koleszterinsztint	> 506 mg/dl	Maltóz	> 60 mg/dl
Kreatinin	> 30 mg/dl	Metil-Dopa	> 2mg/dl
Dopamin	> 5mg/dl	Nátrium-szalicilát	> 20 mg/dl
EDTA	> 0,1 mg/dl	Tolazamid	> 8,4 mg/dl
Galaktóz	> 60 mg/dl	Tolbutamid	> 4 mg/dl
Gentisinsav	> 1,8 mg/dl	Trigliceridek	> 1,026 mg/dl
Glutatione	> 4,6 mg/dl	Húgysav	> 9 mg/dl
Hemoglobint	> 200 mg/dl	Xilóz	> 60 mg/dl
Pralidoxim-jodid	> 1,3 mg/dl	Icodextrin	>750mg/dl

Felhasználói teljesítmény

A felhasználói teljesítményt az EN ISO 15197:2015 szabvány szerint végzik. Ez a 171 laikus személy által vett ujjbegyi kapilláris vérmintákból származó glükózértékeket értékelő vizsgálat a következő eredményeket mutatta; "100 mg/dl (5,55 mmol/l) alatti glükózkoncentráció esetén az orvosi laboratóriumi értékek $\pm 15\text{ mg/dl}$ (0,83 mmol/l) 100%-án belül, 100 mg/dl (5,55 mmol/l) vagy azt meghaladó glükózkoncentráció esetén az orvosi laboratóriumi értékek $\pm 15\%$ -án belül."

BIBLIOGRÁFIA

- American Diabetes Association: Clinical Practice Recommendations (2013) Diabetes Care, Vol 36, Supplement 1, p. S1-S100

Felelősségi nyilatkozat:

Bár minden óvintézkedést megtettek a termék diagnosztikai képességének és pontosságának biztosítása érdekében, a terméket a gyártó és a forgalmazó ellenőrzésén kívül használják, és az eredményt ennek megfelelően befolyásolhatják környezeti tényezők és / vagy felhasználói hiba. A diagnózis tárgyát képező személynek orvoshoz kell fordulnia az eredmény további megerősítése érdekében.

Figyelmeztetés:

A termék gyártói és forgalmazói nem vállalnak felelősséget semmilyen veszteséért, felelősséget, követelésért, kártért vagy kárért, legyen az közvetlen vagy közvetett, illetve következményes, amely a termék használata során felmerül, akár pozitív, akár negatív helytelen diagnózisból ered vagy azzal összefüggésben áll

L23CF1ENR4

Issue date: 2017.10

Cat. No.: 01GS50/01GS50A/01GS50B/01GS50C/01GS50D

Authorized Representative
MT Promedti Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone : +49 6894 581020, Fax : +49 6894 581021

SD BIOSENSOR
Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheong-si, Chungcheongbuk-do, 28161, REPUBLIC OF KOREA
Tel : +82-31-300-0400 Fax : +82-31-300-0499 www.sdbiosensor.com



MEGJEGYZÉS